


Phonak TVLink basestation

Données techniques

Station de base Phonak TVLink (Phonak TVLink base-station) – avec l'émetteur Bluetooth® TVLink, les aides auditives Phonak deviennent le plus léger des casques télé sans fil. La station de base TVLink envoie sans fil à iCom, jusqu'à 30 mètres (100 ft) de distance, le signal audio du téléviseur ou de toute autre source audio. La qualité unique StereoSound garantit une expérience auditive parfaite, et le temps de transmission incroyablement bref assure un grand plaisir d'écoute, même avec des appareillages ouverts. La station de base TVLink sert aussi de chargeur pour iCom.



Description

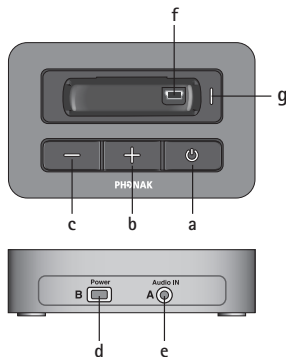

Touches

- a Touche marche/arrêt
- b Contrôle de volume (plus fort)
- c Contrôle de volume (moins fort)

Entrée

- d Prise d'alimentations (mini-USB)
- e Entrée audio (jack 3,5 mm)
- f Support de recharge iCom
- g Indicateur d'état

Fonctions spéciales

- Compatible avec toutes les aides auditives sans fil de Phonak
- Installation simple et rapide
- Livré complet avec alimentation et câbles
- Inutile d'être en vue des aides auditives
- Jusqu'à 30 mètres (100 ft) de portée
- Ajustement numérique du volume avec confirmation audio-visuelle
- Chargeur intégré pour iCom
- Option d'économie d'énergie

Informations générales

Dimensions:	L x l x H: 90 x 60 x 23 mm (3,8 x 2,5 x 1 pouces)
Poids:	100 g
Couleur:	Argent métallisé
Conditions de fonctionnement:	Sauf cas particulier précisé dans le mode d'emploi, ce produit a été conçu pour fonctionner correctement quand il est utilisé dans les règles. Température -10°/ +55° Celsius et humidité relative < 95% (sans condensation).
Conditions de transport stockage:	Température -20°/+60° Celsius et 90% d'humidité relative pour une période prolongée

Indicateur d'état

- Marche
- Transmission à iCom
- - - Fonction pause par iCom
- Couplage Bluetooth

Couplage Bluetooth manuel:

- Presser la touche marche/arrêt pendant 5 secondes

Suppression du couplage Bluetooth:

- Presser la touche marche/arrêt pendant 10 secondes



Données techniques

Phonak TVLink basestation

Source d'alimentation

Type:	Continue stabilisée
Tension au secondaire:	5 volts continus
Courant maximal	500 mA
Prise	mini-USB
Remarque importante	Utiliser exclusivement l'alimentation originale Phonak ou un adaptateur d'alimentation certifié USB > 500 mA

Informations audio

Entrée audio:	Câblée (jack 3,5 mm)
Qualité audio:	Stéréo, 20 Hz - 22 kHz

Basé sur la technologie Bluetooth®

Profil Bluetooth: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	<ul style="list-style-type: none">Optimisé pour l'iCom de PhonakLa conformité avec les appareils autres que Phonak n'est pas garantie
Bande passante:	2402,0 à 2480,0 MHz
Puissance RF:	100 mW max.
Portée Bluetooth:	Jusqu'à 30 m (100 ft)
Conformité Bluetooth	Bluetooth version 2.1, Classe 1
Maximum d'appareils couplés:	4
QDID:	B016567

Normes

Europe

Radio:	EN 300 328
CEM:	EN 301.489
Sécurité électrique:	EN 60950-1

USA	CFR 47, part 15
-----	-----------------

Canada	RSS-210 Issue 7
--------	-----------------

Accessoires

- Câble audio avec prise de 3,5 mm
- Câble audio RCA/Cinch
- Adaptateur SCART/Peritel (UE uniquement)
- Prise d'alimentation: selon les pays
- Mode d'emploi
- Guide d'installation rapide



Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Phonak est faite sous licence. Toutes les autres marques déposées ou appellations commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Cet appareil est un appareil de classe 2 qui peut fonctionner sans restriction dans tous les pays membre de l'Union Européenne quand il est utilisé à l'intérieur, mais il ne doit pas être utilisé à l'extérieur en France.