


# myPilot guide simplifié

## Description

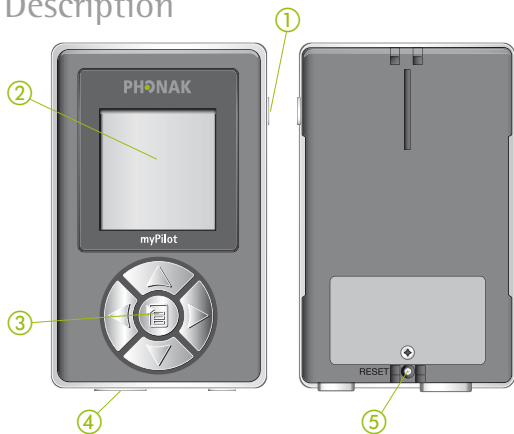

- ① Touche marche / arrêt
- ② Ecran LCD couleurs
- ③ Clavier
- ④ Connecteur Mini USB
- ⑤ Touche de réinitialisation

Haut    △ Volume plus fort  
Bas     ▽ Volume plus faible  
Droite ▷ Programme suivant  
Gauche ◁ Programme précédent  
Centre 📄 Menu / Sélection /  
          Accueil

PHONAK


life is on

---

## Mise en service

### Recharge de l'accumulateur

Quand vous chargez myPilot pour la première fois, laissez-le en charge pendant cinq heures, même si le symbole de l'accumulateur a cessé de clignoter.

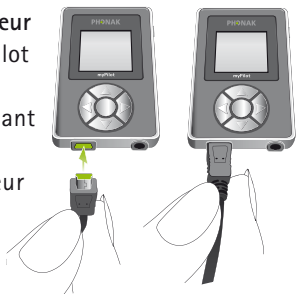


### Mise en marche ou à l'arrêt

Pour mettre en marche ou arrêter myPilot, pressez la touche marche / arrêt pendant deux secondes, jusqu'à ce que l'écran s'allume ou s'éteigne.



### Touche «Accueil»

A partir de n'importe quel écran ou ligne de menu, pressez la touche centrale  pendant 4 secondes pour revenir dans les réglages par défaut de votre système auditif et dans l'écran d'accueil de myPilot.

# Utilisation de myPilot


## Choix de l'écran d'accueil


Pour choisir un des écrans d'accueil, appelez le menu en pressant la touche centrale , sélectionnez ensuite *Réglages*, puis *Ecran d'accueil*.

Le mode «Standard» vous donne une vue générale du volume sonore et du programme, avec l'icône du programme.



Dans le mode «Contrôle direct», chaque touche sélectionne directement le numéro de programme indiqué. Ce mode permet uniquement de contrôler le volume sonore et le programme auditif et ne donne pas accès au menu, ni au ZoomControl

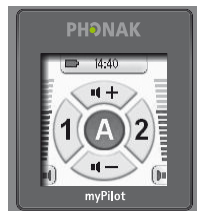

 L'aspect des écrans de votre myPilot peut être différent, selon vos préférences programmées par votre audioprothésiste.



---

## Utilisation de myPilot

### Mode «Standard»

Le mode «Standard» donne une vue d'ensemble complète, dont des informations sur le programme auditif et le volume sonore.



- Pressez la flèche gauche ou droite (◀/▶) pour faire défiler les programmes auditifs
- Pressez la flèche vers le haut ou vers le bas (△/▽) pour régler le volume sonore. Voir détails page 6
- Pressez brièvement la touche centrale  pour accéder aux sous-menus
- Pressez pendant 2 secondes la touche centrale  pour accéder au ZoomControl. Voir détails page 7

## Utilisation de myPilot

### Mode «Contrôle direct»

Dans le mode «Contrôle direct», chaque touche sélectionne le numéro de programme indiqué.



Programmes	Gauche ◀	Centre 📄	Droite ▶
Pression brève	1	A	2
Pression de 2 secondes	3	4	5

Les noms de programmes s'affichent pendant 10 secondes après la sélection d'un nouveau programme.

- Pressez les touches vers le haut ou vers le bas (△/▽) pour régler le volume sonore
- Pressez simultanément les touches gauche et droite (◀+▶) pendant deux secondes pour quitter le mode «Contrôle direct»

- 👤 Les programmes auditifs disponibles ont été programmés par votre audioprothésiste.
- 👤 Dans le mode «Contrôle direct», les écrans de contrôle de volume, les sous-menus et le ZoomControl ne sont pas disponibles. Mais l'accès rapide est disponible.

## Réglage du volume sonore

A partir de l'écran d'accueil du mode «Standard», allez dans l'écran Volume en pressant  $\triangle$  ou  $\nabla$ . Quand vous êtes dans l'écran Volume, vous pouvez modifier simultanément le volume sonore des deux aides auditives en pressant  $\triangle$  pour l'augmenter et  $\nabla$  pour le diminuer.



Vous pouvez de même modifier séparément le volume sonore de votre aide auditive gauche (ou droite) en pressant  $\triangleleft$  pour choisir le côté gauche (ou  $\triangleright$  pour le côté droit), après avoir accédé à l'écran Volume comme décrit ci-dessus. Réglez ensuite le volume sonore en pressant  $\triangle$  pour l'augmenter et  $\nabla$  pour le diminuer.


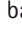





---

## Utilisation de myPilot

### ZoomControl (optionnel)

Cette fonction spéciale vous permet de choisir où concentrer votre audition, vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite.



- A partir de l'écran d'accueil «Standard», pressez pendant 2 secondes la touche centrale  pour accéder à l'écran ZoomControl
- Pressez brièvement la touche gauche, vers le haut, droite ou vers le bas (///) pour choisir la direction d'audition gauche, avant, droite ou arrière
- Pressez brièvement la touche centrale  pour accéder aux sous-menus
- Pressez à nouveau la touche centrale  pendant 2 secondes pour retourner dans l'écran de sélection des programmes et activer le dernier programme utilisé
- Pressez l'une des touches vers le haut ou vers le bas pour accéder à l'écran de contrôle du volume

**Remarque:** Demandez à votre audioprothésiste si ZoomControl est disponible sur vos aides auditives.

---

## Utilisation de myPilot

### Fonctions spéciales

A partir du menu *Réglages* → *Accès rapide* → *touche marche / arrêt*, vous pouvez sélectionner une fonction spéciale qui sera activée en pressant brièvement la touche marche / arrêt.

#### Accès rapide

Une brève pression sur la touche marche / arrêt, même en mode de veille, activera les réglages de programme / volume sonore enregistrés.

#### Lecture d'état


Une brève pression sur la touche marche / arrêt lancera la procédure de lecture d'état des aides auditives.

### Carte de visite

Si elles sont enregistrées, vous trouverez les coordonnées de votre audioprothésiste dans le menu principal, sous *Contact*.

---

## Information importante

Pour votre sécurité et pour profiter au mieux de toutes les fonctions de votre myPilot, veuillez lire attentivement son mode d'emploi. Soyez tout particulièrement attentif au chapitre «Informations importantes» et aux symboles  qui se rapportent à des précautions de sécurité.

Adressez-vous à votre audioprothésiste pour toute assistance supplémentaire.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

