

EINZELTEILÜBERPRÜFUNG – HÖRSYSTEM

Ist das Hörsystem für die FM Benutzung eingestellt?

- Ist das FM+M oder MT* Programm erhältlich? Wenn nötig, benutzen Sie die Anpassungs-Software, um das FM+M oder MT Programm zu aktivieren.

Ist das Hörsystem für die FM Benutzung vorbereitet?

- Funktionsfähige Batterie eingelegt?
- Hörsystem eingeschaltet?

Befindet sich das Hörsystem im richtigen Programm?

- FM+M oder MT* Programm ausgewählt? Überprüfen Sie dies mit Hilfe der Gebrauchsanweisung des Hörsystems.

EasyFM:

Wenn das Hörsystem EasyFM anbietet, müssen Sie in den FM Sender sprechen, um das Hörsystem in das FM Programm zu manövrieren.

Die Fernbedienung des Hörsystems am Sender ist eingeschaltet:

Einige FM Sender senden einen Fernbedienungsbefehl zum Hörsystem, um das Programm zu ändern. Sollte ihr Hörsystem diese Funktion bereithalten, dann halten Sie den Sender und das Hörsystem beim Einschalten innerhalb eines Abstandes von 50 cm.

*MT Programm für MyLink/MyLink+



INTERFACE-TEST – HÖRSYSTEM/EMPFÄNGER

Benutzen Sie den richtigen Audioschuh oder Patchkabel?

- Überprüfen Sie dies mit dem Konfigurator: www.phonak.com/fm_konfigurator.

Ist der Audioschuh oder das Patchkabel korrekt mit dem Hörsystem verbunden?

- Benutzen Sie die Monitoring-Funktion von inspiro, um die Verbindung zu überprüfen.

Ist der Empfänger korrekt mit dem Audioschuh oder Hörsystem verbunden?

- Überprüfen Sie die mechanischen Verbindungen.

Ist das Batteriefach gut verschlossen?

- Es darf keine Spalte zwischen dem Hörsystem und dem Audioschuh/Empfänger geben.
- Beim Schliessen des Batteriefaches von ML10i müssen zwei Klicks hörbar sein.

MLxi BAHÄ: Korrekte Ausrichtung, beim Verbinden mit BAHÄ?

- Der zylinderförmige Stift des MLxi BAHÄ wird in die Öffnung mit dem roten Punkt eingeführt.



EINZELTEILÜBERPRÜFUNG – EMPFÄNGER

Empfänger eingeschaltet?

- **MicroMLxS:** schieben Sie den Schalter auf den einzelnen Punkt oder die zwei Punkte.
- **MLxi:** drücken Sie zwei Sekunden auf die Drucktaste (sollte diese aktiviert sein).
- **MyLink/MyLink+:** schieben Sie den Schalter auf die Position «ON».

Empfänger ist korrekt eingestellt?

- **MicroMLxS:** überprüfen Sie die korrekte Position (einer/zwei Punkte).
- **MyLink/MyLink+:** erhöhen Sie die Lautstärke.

Startkanal des Empfängers = Kanal des Senders?

- Wir empfehlen, den Startkanal des Empfängers so zu programmieren, dass er mit dem Kanal des Senders übereinstimmt. Einige Empfänger bieten Ihnen die Funktion «letzgebrauter Kanal». Wenn diese Funktion ausgewählt wurde, startet der Empfänger immer mit dem Kanal, mit dem er vor dem Ausschalten benutzt wurde. Dadurch entfällt die Synchronisation des Empfängers beim Aufstarten.

MyLink/MyLink+: Batterie aufgeladen?

MicroLink CI S: funktionsfähige Batterie eingelegt?



INTERFACE-TESTS – EMPFÄNGER/SENDER

Ist der Empfänger synchronisiert?

- Drücken Sie den «Sync»-Taste am Sender, während Sender und Empfänger sich in einem Abstand von einem halben Metern befinden.
- Für den Komfort des Kunden: stellen Sie den Startkanal des Empfängers auf den Kanal des Senders ein.

Empfänger und Sender befinden sich auf demselben Frequenzband?

- Das Frequenzband (H oder N) wird normalerweise am Gehäuse oder auf dem Display des Senders angezeigt.



EINZELTEILEÜBERPRÜFUNG – SENDER

Ist der Sender eingeschaltet?

- Batteriestatus wird im Display angezeigt.
- Laden Sie ihn für eine Stunde auf, wenn er sich nicht einschalten lässt.
- Benutzen Sie die Reset-Funktion, wenn der Sender sich immer noch nicht einschalten lässt (schauen Sie in der Gebrauchsanweisung nach).

Ist das Mikrofon aktiv?

- **Aktivieren** Sie das Mikrofon am Sender, sollte es stumm geschaltet sein.
- **MiniMic 8*:** schalten Sie es ein, indem Sie an der Kappe drehen.

Ist das Antennen- oder Mikrofonkabel abgewickelt?

Ist die externe Antenne verbunden (z.B. Umhängekordel von SmartLink+)?



*nicht für inspiro erhältlich

ZUBEHÖR

Um einen Hörtest durchführen zu können, benötigen Sie:

1 funktionierenden FM Sender, z.B. *inspiro*



1 funktionierenden FM Empfänger, z.B. *MLxi*



1 funktionierendes Hörsystem mit Audioschuh und Steto-Clip



1 Demo-Headset-Kit (optional)

- Demo-Headset-Kit mit 220 V Ladegerät: 052-3122
- Demo-Headset-Kit mit 110 V Ladegerät: 052-3126



Relevante Internetseiten

www.phonak.com/fm

Der direkte Link zur Online FM Kollektion von Phonak. Hier finden Sie relevante Informationen zu allen FM Produkten, interessante Hintergrundinformationen, inspirierende Benutzer und verschiedene nützliche Downloads.

www.FMeLibrary.com

Eine ausführliche und nachschlagenswerte Kollektion von FM Artikeln von Publikationen aus der ganzen Welt. Wählen Sie einfach einen Suchbegriff und finden Sie den Artikel der Ihr Interesse geweckt hat. Alle Berichte sind im Adobe PDF-Format erhältlich.

www.eSchoolDesk.com

eSchoolDesk ist ein FM Supporttool, das sich gezielt an Lehrkräfte und Hörspezialisten richtet, allerdings können auch andere Interessenten diese Informationen hilfreich finden. Es bietet eine deutliche Erklärung der FM Technologie und deren Vorteile, einen Produktkonfigurator, Links für weitere Nachschlagewerke und Kurzfilme zur Verdeutlichung der Anwendung.

Benutzen Sie die Adapter für MicroLink Freedom und MLxi Baha, damit Sie mit ihnen über ein Hörsystem oder das Demo-Headset-Kit hören können

ML Freedom-Adapter: 052-3379



MLxi Baha-Adapter: 052-3002



Programmierungs-Software um die Einstellungen von FM Produkten zu ändern

FM SuccessWare

