

iCube

Bluetooth Kopplungs-Anleitung



PHONAK life is on

1. Schritt

iPFG Successware

Installieren Sie iPFG 2.0a oder höher

2. Schritt



Mit NOAHlink:

- Sie können den selben Bluetooth-Adapter wie für NOAHlink verwenden (Ezurio BRBLU03 oder Belkin F8T003). Falls Sie NOAHlink bereits installiert haben, gehen Sie direkt zum 3. Schritt.

Ohne NOAHlink:

- Phonak empfiehlt den Ezurio USB Bluetooth-Adapter BRBLU03 (erhältlich bei Phonak).
- Stecken Sie den USB Bluetooth-Adapter nach der Installation der iPFG in einen freien USB-Anschluss. Es wird keine Installations-CD benötigt.

3. Schritt



iCube-Assistenten starten

Starten Sie die iPFG und öffnen Sie den iCube-Assistenten durch anklicken des iCube-Symbols am rechten Bildschirmrand.

Wichtige Information

Verwenden Sie für die Kopplung von iCube und Ihrem Computer ausschliesslich den iPFG iCube-Assistenten. Versuchen Sie nicht, iCube über die Bluetooth-Umgebung zu koppeln oder die bereits vorhandenen Windows-Bluetooth-Einstellungen zu ändern.

4. Schritt



iCube mit dem Computer koppeln

Wählen Sie "iCube via Bluetooth benutzen" aus. Der iCube-Assistent führt Sie durch den Kopplungsprozess.

Wichtige Information

Falls die Kopplung fehlschlägt, verwenden Sie den empfohlenen Ezurio Bluetooth-Adapter oder nehmen Sie mit der Phonak iPFG Support Hotline Kontakt auf.