

Het volgende hoofdstuk van Paradise begint



Phonak ActiveVent™-speaker

Niets klinkt als het geluid van Paradise

Welkom bij een
nieuw hoofdstuk
van Paradise



Toen we Phonak Audéo™ Paradise op de markt brachten, hadden we een hoortoestel ontwikkeld dat cliënten een ongeëvenaarde hoorervaring bood¹. Dat eerste hoofdstuk speelde zich twaalf maanden geleden af; inmiddels ziet ons dagelijks leven er heel anders uit. Het dragen van een mondkapje wordt gezien als het nieuwe normaal. Het mondkapje brengt voor sommige gebruikers van hoortoestellen een extra uitdaging met zich mee, omdat men niet meer met de lippen mee kan lezen.

Phonak Paradise-hoortoestellen met AutoSense OS™4.0 kunnen eenvoudig aangepast worden aan veel verschillende luistersituaties, zodat cliënten zich kunnen redden in verschillende omgevingen.

Uw cliënten hoeven hun hoortoestellen niet aan te passen, waardoor er een van de moeilijkheden wegvalt.

Dit kan directe positieve gevolgen hebben op het welzijn van personen met hoortoestellen. Als het cliënten gemakkelijker wordt gemaakt om te communiceren, kunnen ze sociaal actief blijven en genieten ze een betere mentale gezondheid.

Phonak is verheugd het volgende hoofdstuk van Paradise aan te kondigen. Paradise, met zijn kenmerkend haarscherp natuurlijk geluid, biedt een ongeëvenaarde hoorervaring¹ in nu nog meer situaties.



Nieuw: de ActiveVent™-speaker

's Werelds eerste intelligente hoortoestelspeaker

Paradise staat bekend om een ongeëvenaarde¹ geluidskwaliteit⁴ met waanzinnig spraakverstaan^{3,4,5} en gepersonaliseerde ruisonderdrukking. Nu slaan we de bladzijde om naar een nieuw hoofdstuk: de ActiveVent-speaker.


De geheel nieuwe ActiveVent™-speaker is 's werelds eerste intelligente hoortoestelspeaker. Deze kan op intelligente wijze de spraakhelderheid in lawaai en het luistercomfort in evenwicht te brengen² voor een nog betere ongeëvenaarde¹ geluidskwaliteit⁴ van Phonak Paradise, voor cliënten met mild tot matig gehoorverlies.

Deze innovatieve speaker is voorzien van mechanisch schakelend venting, naadloos aangestuurd door AutoSense OS 4.0. Deze functionaliteit combineert de hoorprestaties van een gesloten pasvorm met het comfort van een open pasvorm². Hierdoor is de cliënt voorzien van de perfecte hooroplossing, zodat ze zich volledig bewust van hun omgeving kunnen zijn, de natuurlijke klanken van hun eigen stem kunnen horen en eenvoudiger spraak in lawaai kunnen verstaan⁶.




Hoe werkt de ActiveVent-speaker?

ActiveVent is een speaker die ingebouwde venting combineert met een kleine schijf die tussen twee standen schakelt: open en gesloten. Dit wordt intelligent aangestuurd door AutoSense OS 4.0. Dankzij een klikgeluid weet de cliënt dat de schijf van stand is gewisseld.

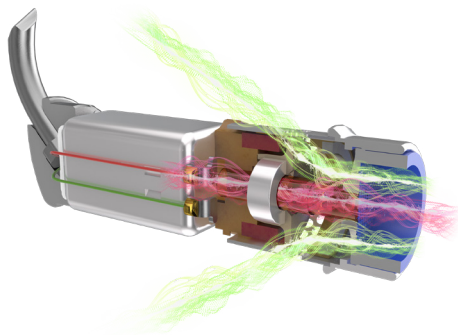

Wanneer de schijf in de open stand staat, kan rechtstreeks geluid door het ingebouwde ventingsysteem van de speaker passeren, zodat de drager het comfort van een open pasvorm ervaart, met de natuurlijke klanken van de eigen stem, en hij/zij omgevingsgeluiden kan opvangen².

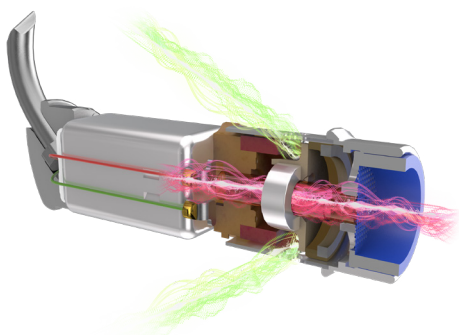

Bij uitdagende luistersituaties met spraak in lawaai of bij het streamen van media, schakelt de schijf naar de gesloten stand, zodat omgevingsgeluid niet rechtstreeks het oor binnenkomt. Zo is spraak van voren of de gestreamde audio beter te verstaan.

Waarmee kan ik de ActiveVent koppelen?

1. Universele SlimTip AV

U kunt eenvoudig de ActiveVent-speaker demonstreren aan uw cliënten dankzij de nieuwe Universele SlimTip AV. Universele SlimTips zijn ontworpen op basis van gegevens verzameld van duizenden oorscans. Zo konden de ontwikkelaars vier modellen vormen voor een hoog paspercentage. Universele SlimTips zijn een ideale tijdelijke oplossing voor demonstraties en proefperioden terwijl u wacht op de voor uw cliënt op maat gemaakte SlimTip Titanium AV.

2. Op maat gemaakte SlimTip Titanium AV

Ten behoeve van optimale akoestische prestaties is de ActiveVent-speaker ontworpen voor langdurig gebruik met de SlimTip Titanium. Deze biedt een volledig aangepast schaalte van duurzaam, comfortabel materiaal.

Belangrijkste productkenmerken

- Spraakhelderheid in lawaai en luistercomfort op intelligente wijze in evenwicht gebracht²
- Superieure geluidskwaliteit voor het streamen van media^{6,7}
- Intelligent aangestuurd door AutoSense OS 4.0
- Compatibel met alle Audéo Paradise oplaadbare hoortoestellen⁸

Overwegingen voor ActiveVent-aanpassing

- Voor optimale prestaties dienen de speakers iedere zes maanden te worden vervangen. Vervanging kan eenvoudig in de winkel
- Ideale kandidaten zijn personen met minimaal oorsmeer en goede behendigheid
- Dient regelmatig te worden gereinigd en het cerumenfilter dient regelmatig te worden vervangen
- Niet geschikt voor personen met ernstige tinnitus en hyperacusis



ActiveVent Performance + voordelen voor uw cliënten

De ActiveVent-speaker is compatibel met alle Audéo Paradise oplaadbare hoortoestellen, zodat de gebruiker verschillende voordelen geniet, afhankelijk van het prestatieniveau van het hoortoestel. ActiveVent Performance + is de verzameling voordelen die cliënten kunnen verwachten die de ActiveVent-speaker in hun hoortoestellen mogelijk maakt.


Spraakhelderheid in lawaai en luistercomfort op intelligente wijze in evenwicht gebracht²

ActiveVent-speakers zijn ideaal voor cliënten die een actief leven leiden en veel tijd doorbrengen in lawaai, zoals restaurants, sociale bijeenkomsten of openbare plekken met veel extern lawaai. Op deze plekken kan het nog lastiger zijn om goed te horen. AutoSense OS 4.0, waarvan de ActiveVent-speakers zijn voorzien, sluit automatisch het ventingsysteem zodra het geluidsniveau stijgt, zodat de gebruiker van de hoortoestellen hoort met de verbeterde prestaties van een gesloten pasvorm (beschikbaar bij prestatieniveau Premium). Zodra het geluidsniveau daalt opent het ventingsysteem, zodat de cliënten weer kunnen genieten van het comfort van een open pasvorm. Met ActiveVent-speakers beschikken cliënten ook over handmatige programma's met een gesloten ventingstand. (Beschikbaar bij prestatieniveaus Premium, Advanced, Standard)

Superieure geluidskwaliteit voor het streamen van media^{6,7}

Cliënten kunnen nu ook genieten van een geweldige geluidskwaliteit bij het streamen van media dankzij het gesloten ventingsysteem. Het ware bijzondere kenmerk van deze speakers is dat als uw cliënt van streamen naar een gesprek voeren wilt schakelen, hij of zij simpelweg kan dubbeltikken om het streamen te pauzeren. De ActiveVent-speaker zal dan moeiteloos naar de open stand gaan (beschikbaar op alle prestatieniveaus).

Voordelen

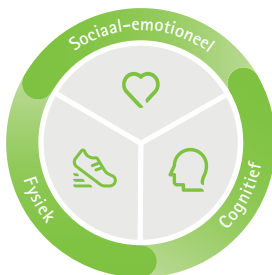

- De ActiveVent-speaker biedt gemiddeld 10% beter spraakverstaan in lawaai en natuurlijk geluid in verschillende luistersituaties⁶
- Met de Universele SlimTip is het eenvoudig om direct de ActiveVent-speaker uit te laten proberen en demonstreren
- De ActiveVent-speaker helpt cliënten de omgeving mee te krijgen in zowel lawaai als stilte, zodat ze gesprekken met vrienden en familie kunnen voeren en goede relaties kunnen onderhouden



Niets klinkt als het geluid van Paradise

Toen Phonak Paradise op de markt bracht, verstevigde Phonak zijn positie als een van topbedrijven in de branche op het gebied van uitstekende audiologie. Paradise biedt nu nog meer functies, gebaseerd op de principes van de toonaangevende hardware in de branche, zodat cliënten het wonder van geluid in nog meer situaties kunnen herontdekken en hun algehele welzijn verbetert. Deze functies, mogelijk gemaakt door de beproefde prestaties van de PRISM™-chip, vullen elkaar naadloos aan voor een ongeëvenaarde hoorervaring¹.

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- **Nieuwe ActiveVent-speaker**
 - Nieuw: ActiveVent Performance +
- **Bewegingssensor**
- **APD 2.0**
- **AutoSense OS™ 4.0**
 - Speech Enhancer
 - Dynamic Noise Cancellation
 - Motion Sensor Hearing



▶ Vertrouwde oplaadbare lithium



Digitale oplossingen op maat

- Bijgewerkte myPhonak-app
 - Gevoeligheid van Tap Control op persoonlijke voorkeur af te stellen
 - AudiogramDirect via Remote Support
 - Remote Control
- Nieuw Target 7.1.9

Universele connectiviteit

- Verbindingsmogelijkheden met smartphone, TV en meer
- RogerDirect™
- Made for all
- Meerderde Bluetooth®-verbindingen
- Tap Control voor eenvoudige toegang tot Bluetooth-functionaliteiten



life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin 'life is on' voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien.

www.phonakpro.com

