

Phonak Audeo™ L ●

Termékinformációk

A Phonak Audeo L átfogó külső hangszórós hallókészülék-megoldás, amely a kis-közepestől a nagyfokú-súlyosig terjedő hallásvesztéssel élők számára is segítséget nyújt. A Phonak Audeo L három kialakítást, öt teljesítményszintet és öt külső hangszórót foglal magába, köztük az ActiveVent™ hangszórót.

A Phonak Lumity platform innovatív technológiájával a Phonak Audeo L hallókészülékek megoldást jelentenek azon ügyfelek számára, akik a rugalmas és diszkrét RIC készülékházakat részesítik előnyben.





Termékleírás

				
		Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30/L20	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30
Többfunkciós gomb		•	•	•
Telefontekercs			•	
Bluetooth®		•	•	•
Víztesztő bevonat		•	•	•
IP-besorolás		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Méret	H x Sz x M	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")	30,3 x 12,6 x 8,1 mm (1,19 x 0,5 x 0,32")	29,5 x 12,9 x 9 mm (1,16 x 0,51 x 0,35")
	Súly	2,2 g (0,08 oz)	2,6 g (0,09 oz)	2,8 g (0,1 oz)
Töltési idő ²	0–100%	3 óra	3 óra	3 óra
	0–80%	1,5 óra	1,5 óra	2,0 óra
	30 perces illesztés	15 perc	15 perc	20 perc
S vevő				
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló adatok	111	111	111
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló adatok	47	47	47
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 – >8000	<100 – >8000	<100 – >8000
M vevő				
Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL)	2 cm ³ csatoló adatok	114	114	114
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló adatok	51	51	51
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 – >8000	<100 – >8000	<100 – >8000
MAV vevő				
Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL)	2 cm ³ csatoló adatok	119	119	119
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló adatok	50	50	50
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 – >8000	<100 – >8000	<100 – >8000
P vevő				
Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL)	2 cm ³ csatoló adatok	122	122	122
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló adatok	59	59	59
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 – 6300	<100 – 6300	<100 – 6300
UP vevő				
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatoló adatok	132	132	132
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatoló adatok	71	71	71
Frekvenciatartomány (Hz)		<100 – 6100	<100 – 6100	<100 – 6100

A burkolat színei

							
P1	H0	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Homokbész	Bész	Szantálfa	Gesztenye	Pezsgő	Ezüstsürke	Grafitfürke	Bársonyfekete

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.
² A tényleges töltési idő az elem hátralévő töltöttségének függvényében változik, azonban a 3 órát nem haladja meg.

Teljesítményszintek

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced	Standard	Essential	Low Essential
Komfort visszhangos környezetben	•				
Beszélgetés autóban	•				
Beszéd hangos környezetben	•				
Zene	•	•			
Komfort zajban	•	•	•		
Beszéd zajban	•	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•	•
Média (beszéd) + mikrofon	•	•	•	•	•
Média (zene) + mikrofon	•	•	•	•	
További programok					
További programok maximális száma	4	4	4	4	4
Komfort visszhangos környezetben	•				
Beszéd hangos környezetben	•	•			
Beszéd 360°-ban	•	•			
Beszéd zajban	•	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•	
Zene	•	•	•	•	
Akusztkus telefon	•	•	•	•	•
Egyéni program	•	•	•	•	•
Hangtovábbító programok					
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•	
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•	
Telefonhívás + mikrofon	•	•	•	•	•

Funkciók	Premium	Advanced	Standard	Essential	Low Essential
SpeechSensor	•				
Beszédkiemelő	•				
StereoZoom 2.0	•	•			
Dinamikus zajsűrűs	•	•			
Beszédirány érzékelő szenzor	•	•	•		
RogerDirect™	•	•	•	•	
Roger és direkcionalitás hangközvetítés	•	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•	•
Visszhangesőkentő	•				
Tap control					
– Siri/Google Asszisztens	•	•			
– Hangtovábbítás szüneteltetése/újraindítása	•	•			
– Hívás fogadása/befejezése	•	•			
SoundRelax	•	•			
DuoPhone	•	•	•		
Real Ear Sound	•	•	•		
Egészségügyi funkciók	•	•	•	•	
WindBlock	•	•	•	•	
Felhasználói szokások naplózása	•	•	•	•	
Tinnitus Balance	•	•	•	•	
Auto Acclimatization	•	•	•	•	
Környezeti egyensúly	•	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•
Finomhangolás csatorna	20	20	16	12	8

Illesztés

	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial
Phonak Target	8.0 vagy újabb	8.0 vagy újabb	8.0 vagy újabb
Noahlink Wireless	•	•	•


A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik.



Akusztikus csatoló

Hosszúság	S vevő	M vevő	MAV vevő	P vevő	UP vevő
Négy méretben kapható (0, 1, 2, 3), bal és jobb	•	•	•	•	•
Dóm					
Kupak dóm	•	•		•	
Nyitott harang	Három méretben kapható (S, M, L)	•		•	
Szellőzős harang	Három méretben kapható (S, M, L)	•		•	
Power harang	Három méretben kapható (S, M, L)	•		•	
SlimTip*					
Akril	•	•		•	
Szilikon	•	•		•	
Titanium AV			•		
Univerzális AV	Négy formában kapható (A, B, C, D)		•		
cShell					
Akril	•	•		•	•
Titanium	•	•		•	•
Illesztési tartományok					

*Kapható extra hallójárártalossággal

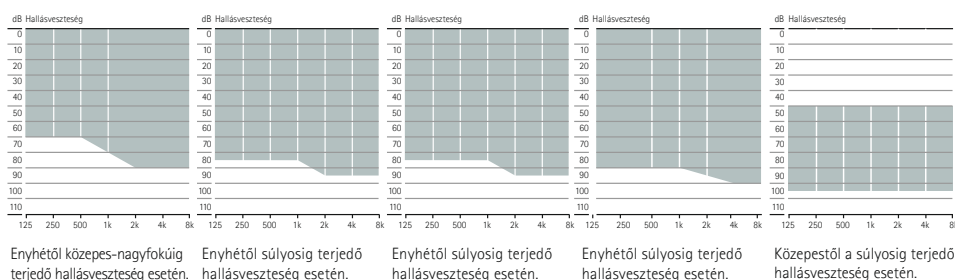

SmartSpeech™ technológia

A SmartSpeech technológia a Phonak elkötelezettségét képviseli olyan funkciók tervezése iránt, amelyek javítják a beszédértést és csökkentik a hallási figyelmet különböző hallgatási környezetekben¹. A funkciók közé tartozik a beszédkiemelő, a dinamikus zajszűrés és a beszédírány érzékelő szenzor. A Phonak Audéo™ Lumityvel két új funkciót, a StereoZoom 2.0-t és a SpeechSensort is bevezettük az ActiveVent™ vevő és a RogerDirect™ technológia mellé.

Phonak Audéo L Trial™

A Phonak Audéo L Trial hallókészülékek gyorsan beállíthatók a kívánt teljesítményszintre, hogy megfeleljenek az Ön ajánlásának. A Phonak Audéo L Trial hallókészülékben megtalálható technológia számos lehetőséget biztosít arra, hogy már az első alkalommal biztosíthassuk a megfelelő készüléket, vagy hogy áthidaljuk a javítások közötti időszakot.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News Forrás: www.phonakpro.com/ evidence, hozzáférés időpontja: 2022. február

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News, előkészületben. 2022 közepére várható.

Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411.

Phonak Audéo L töltési opciók



Phonak Charger Ease

A Phonak Charger Ease töltőnyílásokban található mágnesekkel rendelkező kompakt töltő, ez megkönnyíti az Audéo L-R és RT készülék behelyezését és eltávolítását. Standard USB-C töltőportot használ, amely világít, amikor áramellátást kap.



Phonak Charger Case Go Töltő és Phonak Life Charger Töltő

Az Audéo L-RL készülékhez két lehetőség áll rendelkezésre. A Phonak Charger Case Go Töltő beépített akkumulátorral rendelkezik, amely két hallókészüléket akár háromszor is fel tud tölteni. Mindkét töltő standard USB-C töltőportot használ, és a hátoldalon lévő LED világít, amikor áramellátást kap.

Phonak Audéo L Bluetooth® verziók

Közvetlen hívások/hangadatátvitel

Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli technológiát támogató, illetve a legtöbb korábbi Bluetooth technológiával rendelkező telefon

A Bluetooth® szövevény és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Sonova AG által történő mindennemű használatuk licencmegállapodás keretében történik.

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-R Audéo L-R Trial L20
Vezeték nélküli kiegészítő				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	
Phonak RemoteControl	•	•	•	
Roger				
RogerDirect™	•	•	•	
Alkalmazások				
myPhonak	•	•	•	•

További információkért kérjük, keresse fel a www.phonakpro.com/audeolumity weboldalt

A Roger mikrofonokkal kapcsolatban a www.phonakpro.com/roger oldalon olvashat bővebben

További információkért kérjük, keresse fel a www.phonakpro.com/smartapps weboldalt



life is on

A Phonak 1947 óta elkötelezetten dolgozik azért, hogy új hangokat megszólaltatva segítsen megőrizni a hallásvesztéssel élők életminőségét. Már a vállalat alapításakor is az a meggyőződés vezérelt minket, hogy a jobb hallás egyenlő a jobb élettel, így elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. A hallás valóban közvetlen kapcsolatban áll a társadalmi, érzelmi, szellemi és testi jóléttel. Most és a jövőben is arra törekszünk, hogy innovatív hallási megoldások lehető leg szélesebb skáláját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

www.phonak.com



027-0667-13(V3.00/2022-08/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28.
CH-8712 Stäfa · Svájc



0459