

Phonak Target 7.1

Phonak Desktop Fitting Guide voor ALPS

Phonak Target™/ALPS biedt u de mogelijkheid om de gegevens via Phonak Target direct in ALPS in te voeren. Dit proces dat uit één stap bestaat, voorkomt dat er gegevens dubbel worden ingevoerd en biedt u de mogelijkheid om alle relevante aanpassings- en abonnementsgegevens voor de Lyric eenvoudig te beheren.

Voor gebruik van Phonak Target/ALPS dient de computer die u gebruikt voor de aanpassing over een internetverbinding te beschikken.

Na het installeren van Phonak Target, zijn de nieuwe functies automatisch beschikbaar. Bij elke Lyric-aanpassing, maakt Phonak Target automatisch verbinding met ALPS. Een wizard begeleidt u bij de noodzakelijke stappen.

Meer informatie, waaronder de Target/ALPS-video, is ook beschikbaar via [web help](#).

Content

Een nieuwe klant aanmaken in Phonak Target/ALPS.....	2
Toegang tot huidige cliënt in uw Phonak Target/ALPS-account verkrijgen	6
Het toestel verwisselen (incl. observatie gehoorgang).....	7
Tourist case: een toestel verwisselen voor een cliënt van een andere praktijk.....	10
Tourist case: er is bij een cliënt van u een nieuwe aanpassing uitgevoerd door een andere erkende Lyric partner.....	11
Automatisch verlengen van een abonnement.....	12
Een actief abonnement annuleren.....	13
Een offline gebeurtenis synchroniseren	14
De startpagina van ALPS en rapporten.....	16
Uitgebreidere logregistratie voor support inschakelen	19
Informatie en beschrijving van de symbolen en systeemeisen	19

Een nieuwe klant aanmaken in Phonak Target/ALPS

Om een nieuwe cliënt in Phonak Target aan te maken en een Lyric-toestel uit de voorraad te selecteren:

1. Ga naar **[Hoortoestellen]** en selecteer de Lyric-toestellen in **[Hoortoestellen]**
2. Ga naar **[Lyric-configuratie]** en klik op **[Kies toestel]** om het Phonak Target/ALPS-wizard te openen.



De ALPS-knop geeft de huidige status van de verbinding weer:


- Groen - verbonden
- Zwart - niet verbonden




Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen op uw Lyric-account.

Wij adviseren u de **[Automatische login]** functie te selecteren. Deze tijdbesparende feature maakt het mogelijk ingelogd te blijven in ALPS zonder dat u uw gegevens opnieuw moet ingeven.


In het geval dat u het wachtwoord bent vergeten, klik op de link **[wachtwoord vergeten]** en verander het in www.phonakpro.com direct.

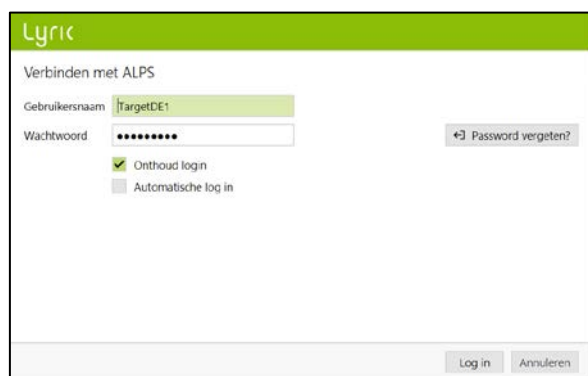

Nu verschijnt de volgende melding **[Voeg nieuwe cliënt toe aan uw ALPS account]**. Uw Accountgegevens staan in dit scherm, wat nuttig is voor praktijken die met verschillende logins werken.

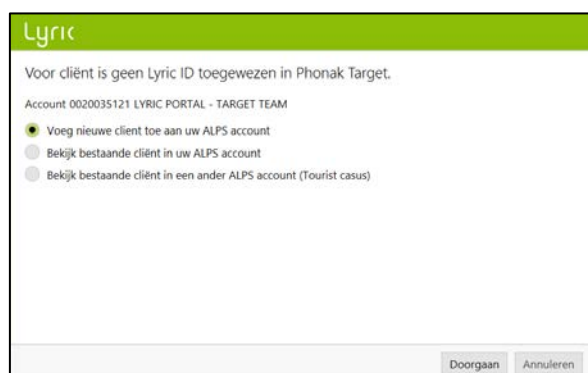

Indien u niet van plan bent de laatst getoonde loginte gebruiken, kies **[Wissel login]** onder de ALPS knop en login met een andere naam.

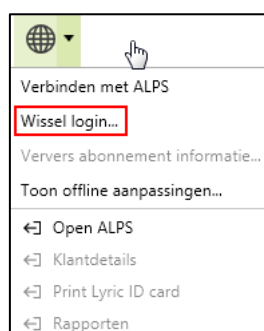

U kunt nu de voor- en achternaam, geboortedatum en het geslacht van de cliënt zien, zoals deze zijn ingevoerd in Phonak Target.

De overige informatie (geboortedatum en geslacht) is optioneel. Als u deze informatie niet wilt overbrengen, kunt u de optie **[Voer aanvullende informatie in]** uitvinken.

U wordt vervolgens gevraagd te bevestigen dat de cliënt toestemt dat zijn/haar data wordt gebruikt door Sonova voor product proces doeleinden. Als het vakje niet is aangevinkt, kan de aanpassing niet worden vervolgt.

The screenshot shows the 'Voer gegevens cliënt in' (Enter client data) form. It includes input fields for 'Voornaam' (First name) and 'Achternaam' (Last name), both with 'Voer in...' placeholder text. The 'Geboortedatum' (Date of birth) is set to '01.01.1948' and 'Geslacht' (Gender) is empty. There is a checked checkbox for 'Voer aanvullende informatie in' (Enter additional information). At the bottom, there is a disclaimer: 'Hierbij onderschrijf ik dat ik mijn cliënt volledig heb geïnformeerd over het feit dat zijn/haar persoonlijke data ter verwerking wordt verzonden naar de hoortoestelafabrikant. Mijn klant heeft ingestemd met een dergelijke overdracht.' (I hereby declare that I have fully informed my client about the fact that their personal data is being sent for processing to the hearing aid manufacturer. My client has consented to such a transfer.) Buttons for 'Create Lyric ID' and 'Annuleren' (Cancel) are at the bottom right.

Selecteer het gewenste type en kies het bovenste toestel aangezien de vervaldatum van dit toestel het eerst verstrijkt.

Let op: gedateerde toestellen (expired) kunnen niet langer worden aangepast. Ga daarvoor naar uw dashboard via "wereldbol" en selecteer "open ALPS". Selecteer [device return], kies het serienummer en als reden "expired" en stuur het toestel terug naar Phonak.

The screenshot shows the 'Selecteer Lyric toestel van consignatie voorraad' (Select Lyric device from consignment stock) screen. It features a search bar for 'Serie#' and a 'Datum plaatsing' (Placement date) of '19.08.2014'. Below is a table of devices:

Serie#	Model	Lyric3	Verzegelingsgrootte	M	Invoegen door
1420NY85P	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85R	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85T	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85N	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85K	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85L	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85M	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85V	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY860	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY861	Lyric3		M		03.07.2015

Buttons for 'Selecteer' (Select) and 'Annuleren' (Cancel) are at the bottom right.

Selecteer de gemeten plaatsingsdiepte.


The screenshot shows the 'Geef gemeten diepte plaatsing aan' (Specify measured fitting depth) screen. It asks for the 'Eerste plaatsing in het oor.' (First fitting in the ear.) and has a dropdown menu with options from 3 mm to 15 mm. The '3 mm' option is currently selected. Buttons for 'Doorgaan' (Next) and 'Annuleren' (Cancel) are at the bottom right.

Het type abonnement voor deze cliënt staat standaard ingevuld. Kies de wijze waarop **Phonak aan u factureert**.

Zorg dat u een vinkje plaatst in het geval dat de klant Lyric voor tinnitus behandeling gebruikt.


The screenshot shows the 'Kies type inschrijving' (Choose subscription type) screen. It includes dropdown menus for 'type Abonnement' (set to '1-jarig abonnement') and 'Betaalmethode' (set to 'Jaarlijkse termijn'). The 'Start datum' (Start date) is '19.11.2019'. There is a checked checkbox for 'Lyric is used for tinnitus treatment'. Buttons for 'Doorgaan' (Next) and 'Annuleren' (Cancel) are at the bottom right.

Phonak Target bevestigt de toestelselectie. U krijgt **[Meer informatie]** over het contract in dit scherm of kies **[sluit]**. Na het selecteren van een toestel wordt de einddatum van de proefperiode weergegeven in een overzicht. Voor binaurale aanpassingen wordt u gevraagd om **[vervolg met de andere kant]**. Deze actie leidt u direct naar het andere toestel uit uw depotvoorraad.

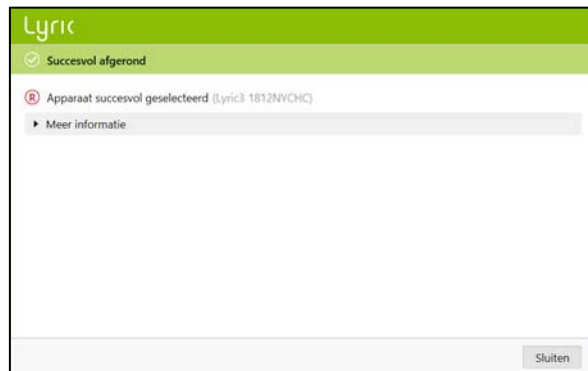


Hieronder worden de start- en einddatum van het abonnement, de einddatum van de proefperiode en de resterende hoeveelheid toestellen weergegeven.


Nu is het mogelijk de proef eenmalig te verlengen met 10 dagen. De nieuwe einddatum zal worden weergegeven in Target/ALPS.

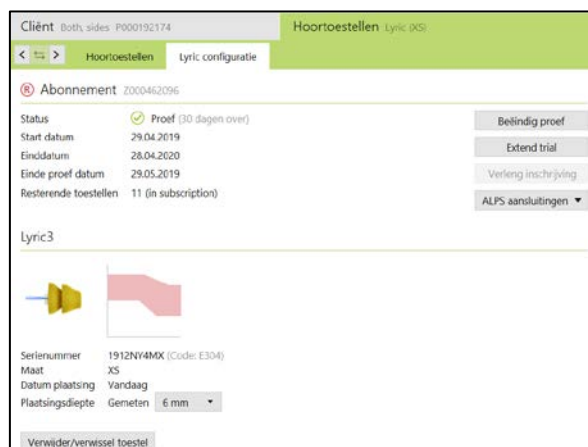


In het geval dat er een verkeerd serienummer is gekozen, kan het terug op voorraad worden gezet door op "terug op voorraad" te klikken.

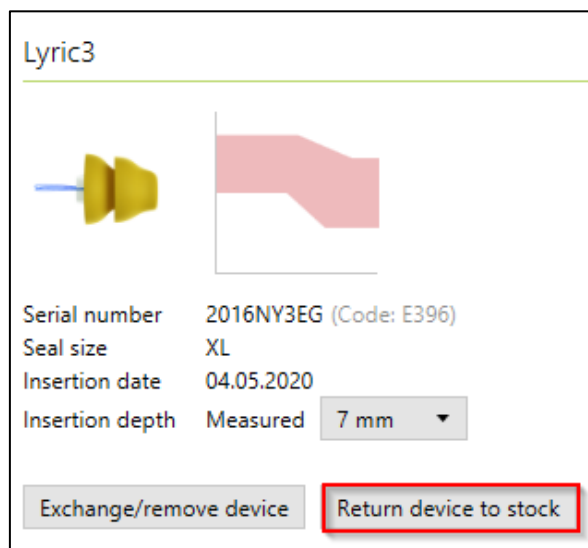


Door aan het einde van de sessie **[Opslaan in database]** te kiezen, worden uw aanpasgegevens gesynchroniseerd met ALPS.

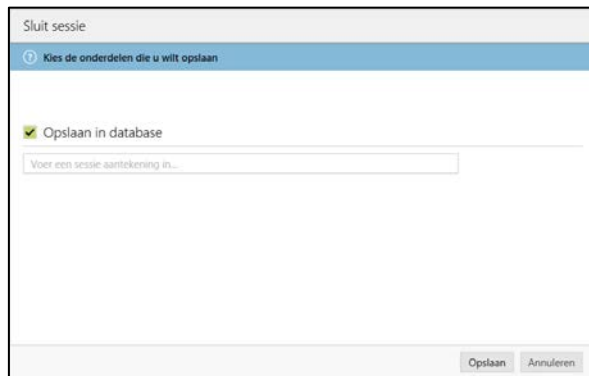


In het geval dat er meer notities over de klant nodig zijn, gebruik dan een nieuwe notitie sectie.

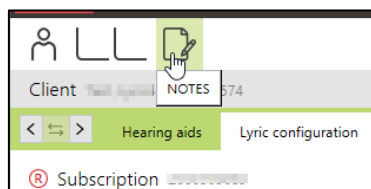


Een nieuwe notitie kan worden toegevoegd en Target maakt gebruik van een "herinner mij opnieuw in de volgende sessie" functie.

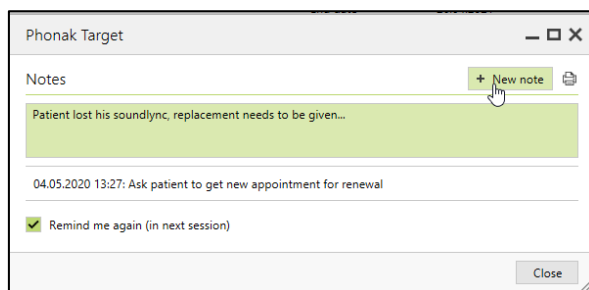

Alle notities zijn dan zichtbaar onder **[Client, Notities]**.

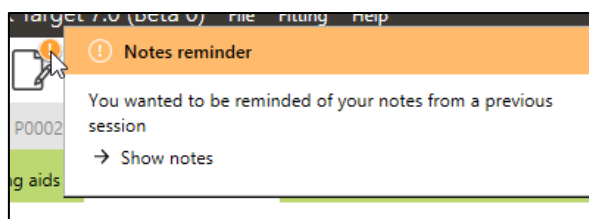

De onderstaande rapporten kunnen worden afgedrukt vanuit het Afdrukmenu:

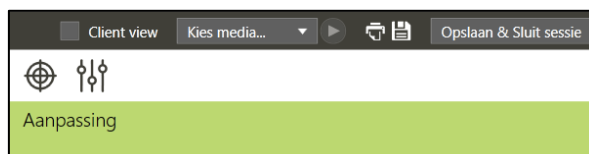

Voor de audicien:


- Aanpasrapport
- Gegevensblad Lyric

Voor de cliënt:

- Hoortoestelinstructies
- Communicatietips
- Dagboek met waarnemingen
- Gehoorverlies begrijpen

De diagram rapporten kunnen als volgt worden geprint:
Kies **[Instelling]**, **[Rapporten]**, **[Diagram]** en kies tussen Versterking of Output.

Het geselecteerde diagram wordt op het rapport afgedrukt.

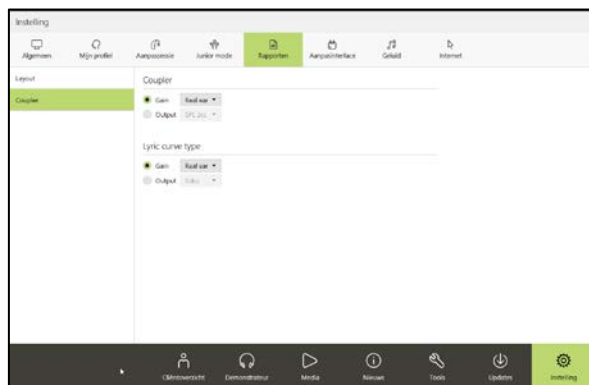

Toegang tot huidige cliënt in uw Phonak Target/ALPS-account verkrijgen

Als de cliënt wel in ALPS staat, maar niet in Target (of bij een eerste invoer vanuit een ander filiaal) kiest u **[Voeg bestaande cliënt toe aan uw ALPS account]**.

U dient eerst een cliënt aan te maken in Noah. Hierna worden de cliëntgegevens overgebracht naar Phonak Target. Ga verder tot u bij het scherm komt dat u vraagt een cliënt toe te voegen of de gegevens van een huidige klant te bekijken.

Om Phonak Target-gegevens met de ALPS-gegevens van uw Lyric klant te verbinden, selecteert u **[Bekijk bestaande cliënt in uw ALPS account]**.

Voeg de juiste Lyric-ID en/of de voor- en achternaam in zoals deze zijn opgeslagen in ALPS.

U kunt de Lyric-ID terugvinden door in een afzonderlijke browser de ALPS-portal te openen of deze te zoeken op de afgedrukte Lyric-ID-kaart. Klik op Zoek voor het vinden van P#(Lyric ID)

U hoeft alleen de Lyric-ID in te vullen wanneer u voor de eerste keer een huidige cliënt probeert te verbinden. Bij het opnieuw openen van de sessie, heeft u automatisch toegang tot de ALPS-gegevens.

Door op de zoekknop te klikken zal P# automatisch worden ingevuld. Wanneer P# niet automatisch wordt ingevuld, betekent dit dat de cliënt geen huidige cliënt is of de naam komt niet overeen met de ALPS-informatie.

Wanneer de gegevens van de cliënt gevonden zijn, zal het Cliëntinformatie scherm alle relevante informatie tonen.

Lyric

Voor cliënt is geen Lyric ID toegewezen in Phonak Target.

Account 0020035121 LYRIC PORTAL - TARGET TEAM

Voeg nieuwe client toe aan uw ALPS account

Bekijk bestaande cliënt in uw ALPS account

Bekijk bestaande cliënt in een ander ALPS account (Tourist casus)

Doorgaan Annuleren

Lyric

Lyric client

Voornaam: John

Achternaam: Doe

Lyric ID: P000087954

Geboortedatum: -

Geslacht: -

Zoek

Doorgaan Annuleren

Lyric

Clientinformatie inschrijving

Voornaam: John

Achternaam: Doe


Lyric ID: P000087954

Informatie	Rechts	Links
Abonnement	Proef	Geen inschrijving
Start datum	05.08.2014	
Einddatum		
Andere toestellen	6	
Toestel	Lyric3	
Serienummer	1406NV238	


Doorgaan Annuleren

Het toestel verwisselen (incl. observatie gehoorgang)


Voor het verwisselen van een Lyric-toestel, logt u in bij Phonak Target/ALPS, gaat u naar **[Hoortoestellen]**, **[Lyric-configuratie]** en klikt u op **[Verwissel/verwijder toestel]**.

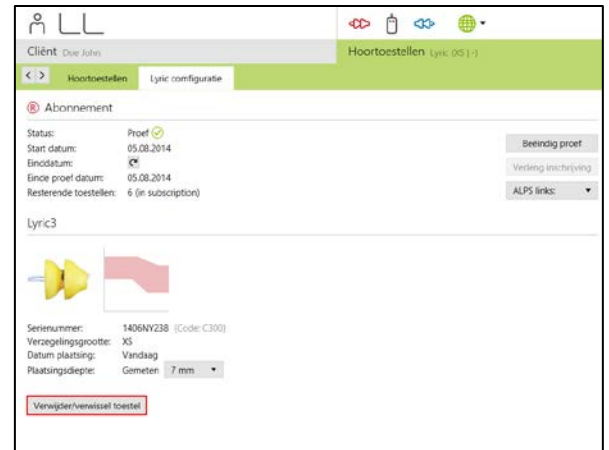

Selecteer of de aanpasser of de patiënt het toestel heeft verwijderd en noteer de datum van verwijdering als het voor vandaag was. Selecteer de bijbehorende verwijderingsreden. Deze redenen zijn onderverdeeld in vier categorieën (ongemak, toestel- of aanpassing gerelateerd en proactieve verwijdering).

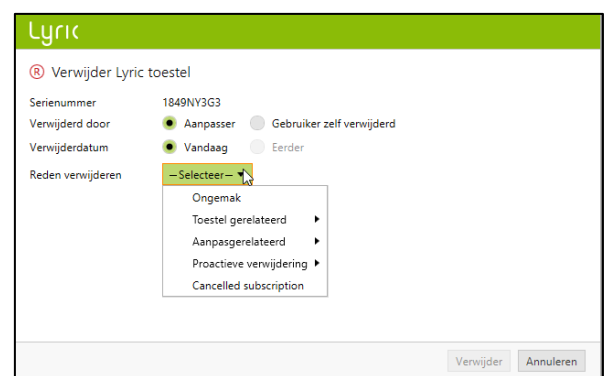

Door met uw muis over elke verwijderingsreden te bewegen, verschijnen de 'tooltips'. Deze geven u informatie die u helpt bij het kiezen van de juiste reden.

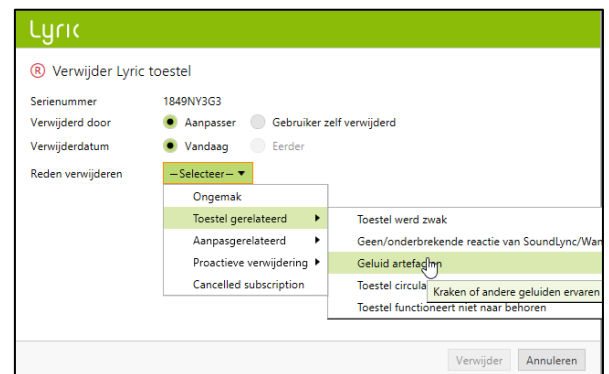





Phonak Target vraagt u ook naar de conditie van de gehoorgang. U kunt uit de volgende opties kiezen: **[OK, gelijk heraanpassing mogelijk]**, **[OK voor heraanpassing na rust]** en **[Vereist medische verwijzing]**. Wanneer u voor **[OK, gelijk heraanpassing mogelijk]** kiest, kunt u het toestel direct verwisselen. Als de gehoorgang geïrriteerd is en rust nodig heeft of zelfs medische verwijzing vereist, zal het systeem u de daarbij passende informatie verstrekken.*

De opties voor het toevoegen van opmerkingen bij de verwijderingsreden en de observatie van de gehoorgang zijn beide optioneel.

In geval er voor **[Vereist medische verwijzing]** is gekozen, kunnen aanvullende details over het oorkanaal moeten worden gekozen.

Als het tweede toestel verwijderd moet worden, kunt u voor **[Verder gaan met andere zijde]** kiezen. Bij sommige redenen (geplande verwijdering, benadering van levensduur toestel en proactieve verwijdering door clinicus) wordt standaard dezelfde reden ingevuld voor het tweede toestel. Deze kan echter worden aangepast indien de verwijderingsreden per zijde verschilt.

* Als u voor **[OK voor heraanpassing na rust]** heeft gekozen of **[Vereist medische verwijzing]**, toont Phonak Target de informatie in het hoofdscherm.

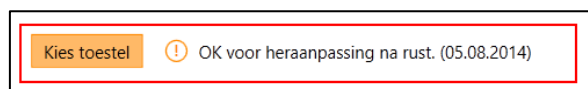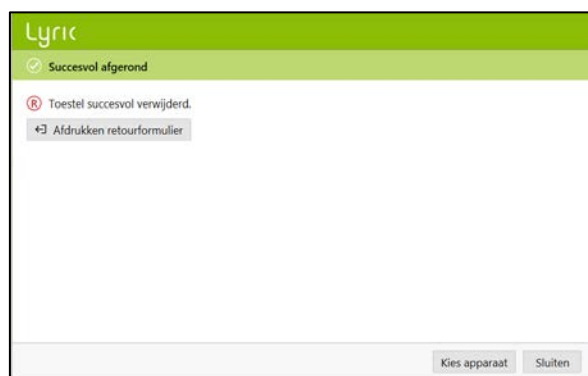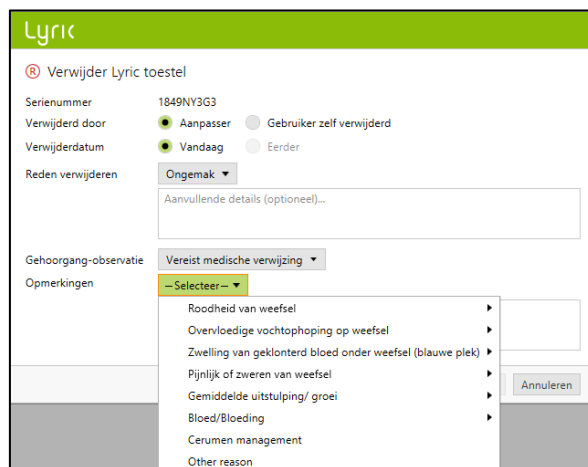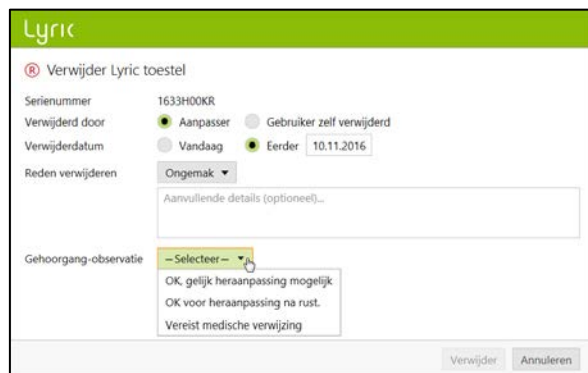

Voor het verwisselen van een toestel, bent u verplicht te bevestigen dat het oor de status **[OK, gelijk heraanpassing mogelijk]** (vandaag) heeft. Dit doet u door onder in het scherm dit vakje te selecteren. Het toevoegen van opmerkingen over de gehoorgang van de cliënt is optioneel.

Na te hebben bevestigd dat het oor direct voor heraanpassing geschikt is, kunt u een ander Lyric-toestel kiezen om te verwisselen.

Serie#	Model	Lyric3	Verzegelingsgrootte	M	Invoegen door
1420NY85P		Lyric3		M	03.07.2015
1420NY85R		Lyric3		M	03.07.2015
1420NY85T		Lyric3		M	03.07.2015
1420NY85N		Lyric3		M	03.07.2015
1420NY85K		Lyric3		M	03.07.2015
1420NY85L		Lyric3		M	03.07.2015
1420NY85M		Lyric3		M	03.07.2015
1420NY85Y		Lyric3		M	03.07.2015
1420NY860		Lyric3		M	03.07.2015
1420NY861		Lyric3		M	03.07.2015

De opmerkingen die u invoert, worden opgeslagen onder **[Cliënt], [Aantekeningen]**.

Let op; wanneer het toestel langer dan 30 dagen werd gedragen, **[Easy Refit]** niet werkt en de standaard waarden worden getoond.

- Toestel is verwijderd door aanpasser
- Toestel is vandaag verwijderd
- Geplande verwijdering
- OK, gelijk heraanpassing mogelijk

Klik **[Vervang]** en kies voor een nieuw toestel.


Indien de criteria niet overeenkomen met de standaard waarden, deze aanpassen svp.

Tourist case: een toestel verwisselen voor een cliënt van een andere praktijk


Voor het verwisselen van een Lyric-toestel bij een cliënt waarvoor de oorspronkelijke aanpassing is uitgevoerd door een andere erkende Lyric partner, moet u de ALPS-aanpassingsgegevens van deze cliënt kunnen inzien. Om deze in te kunnen zien, heeft u de persoonlijke Lyric-ID van de cliënt nodig.

Om de procedure voor deze eenmalige cliënt uit te voeren, dient u de stappen die bij een nieuwe cliënt horen te doorlopen. Log in bij uw ALPS-account en selecteer vervolgens **[Bekijk bestaande cliënt in een ander ALPS account (Tourist case)]**

Voer de Lyric-ID van de cliënt in en controleer of de naam correct wordt weergegeven (zoals deze gedrukt staat op de Lyric-ID-kaart). Ga verder met het verwisselen van het toestel en, indien nodig, het aanpassen van de aanpassingsparameters. Indien de cliënt niet weet wat zijn/haar Lyric-ID is, kunt u deze opvragen door de klantenservice van Lyric te bellen.

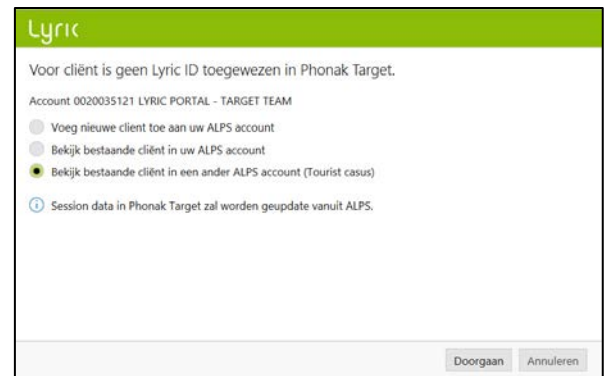

The screenshot shows the Lyric portal interface. At the top, there is a green header with the Lyric logo. Below the header, a message states: "Voor cliënt is geen Lyric ID toegewezen in Phonak Target." Underneath, the account information is displayed: "Account 0020035121 LYRIC PORTAL - TARGET TEAM". There are three radio button options: "Voeg nieuwe client toe aan uw ALPS account", "Bekijk bestaande cliënt in uw ALPS account", and "Bekijk bestaande cliënt in een ander ALPS account (Tourist casus)". The third option is selected. A note below the options says: "Session data in Phonak Target zal worden geupdate vanuit ALPS." At the bottom right, there are two buttons: "Doorgaan" and "Annuleren".

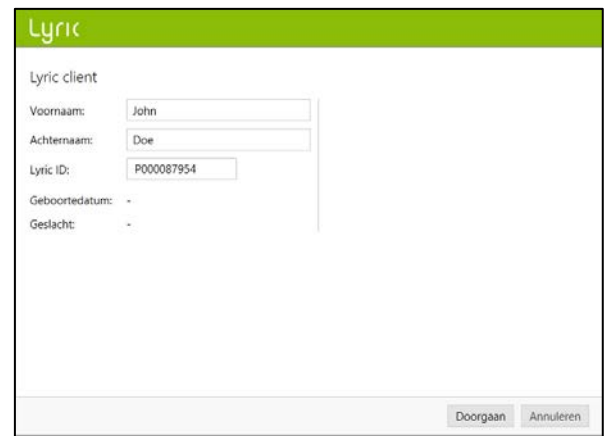

The screenshot shows the Lyric portal interface for the "Lyric client" form. The form has the following fields: "Voornaam:" with the value "John", "Achternaam:" with the value "Doe", "Lyric ID:" with the value "P000087954", "Geboortedatum:" with a dash "-", and "Geslacht:" with a dash "-". At the bottom right, there are two buttons: "Doorgaan" and "Annuleren".

Tourist case: er is bij een cliënt van u een nieuwe aanpassing uitgevoerd door een andere erkende Lyric partner

Wanneer er bij een cliënt van u een nieuwe aanpassing uitgevoerd is door een andere Lyric-partner, ontvangt u een melding dat ALPS (nieuwe aanpassing cliënt) niet overeenkomt met Phonak Target (uw aanpassing). Dit geeft aan dat het serienummer is gewijzigd.

Door op **[Doorgaan]** te klikken, zal het systeem het nieuwe serienummer synchroniseren.

The screenshot shows the Lyric interface with a green header. Below the header is an orange bar with the title "Data conflict tussen ALPS en Phonak Target". The main content area displays the following information:

Voornaam John
Achternaam Doe
Lyric ID P000104795

Toestelgegevens in ALPS en Phonak Target komen niet overeen:

Informatie	Rechts	Links
Abonnement	Proef (30 dagen over)	Geen inschrijving
ALPS	1432NY4WC (Tourist wissel)	Geen toestel
Phonak Target	Geen serienummer	Geen toestel

Action

- Het serienummer zal geupdate worden in Phonak Target
- Geen actie vereist

At the bottom, there is a message: "Kies 'Annuleren' om het conflict handmatig op te lossen." and two buttons: "Doorgaan" and "Annuleren".

Als de andere aanpasser ook de aanpassingsparameters heeft gewijzigd, wordt er ook melding gemaakt van deze verschillen. U kunt dit oplossen door de gewenste optie te kiezen.

Let op: de ALPS-gegevens zijn de nieuwste gegevens van de andere aanpasser en de Phonak Target-gegevens zijn de gegevens die u zelf eerder al heeft ingevoerd.

The screenshot shows the Lyric interface with a green header. Below the header is an orange bar with the title "Verkeerde aanpas parameter!". The main content area displays the following information:

De aanpasparameters in ALPS en Phonak Target komen niet overeen.

Rechts	Links
Los probleem op	Fitting parameters zijn identiek
Gebruik gegevens Phonak Target Laatste update: 29.08.2014 13:09	
gebruik ALPS data (nieuwer) Laatste update: 29.08.2014 13:14 Update elders gedaan.	

At the bottom, there is a message: "Kies 'Doorgaan' om het probleem op te lossen. Kies 'Annuleren' om dit handmatig te doen." and two buttons: "Doorgaan" and "Annuleren".

Automatisch verlengen van een abonnement



Twee maanden voordat het abonnement verloopt, krijgt u een informatie pop-up in Target / ALPS dat het abonnement klaar is voor automatische verlenging.

Zodra het abonnement gereed is om te vernieuwen, wordt het automatisch voor nog een jaar verlengd met een jaarlijkse betaling.


Het vernieuwde abonnement wordt automatisch een actief abonnement zonder proefversie.

In het geval dat de klant anders wenst, heeft u nog steeds de volgende keuzes voordat het abonnement automatisch wordt verlengd:

1. Vernieuw het contract en kies een ander betalingstype (jaarlijks of maandelijks)
2. Annuleer de verlenging van het komende abonnement

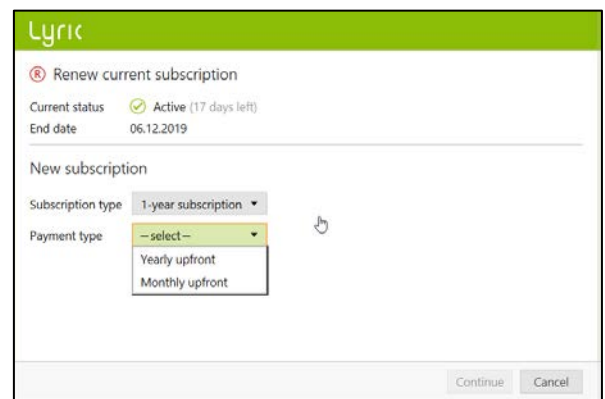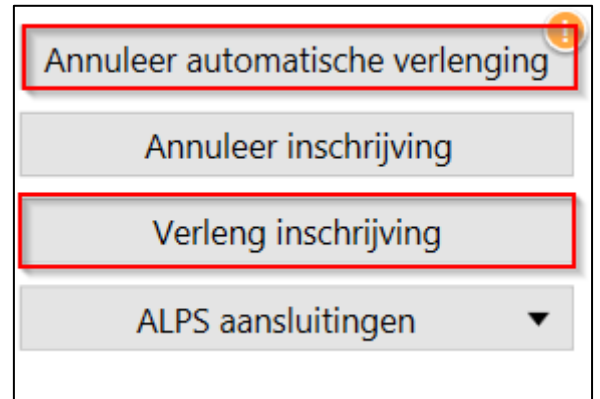


In het geval dat de klant het abonnement niet meer wil verlengen, dan is het verplicht om een reden aan te geven wanneer een annulering van het komende abonnement wordt ingevoerd.

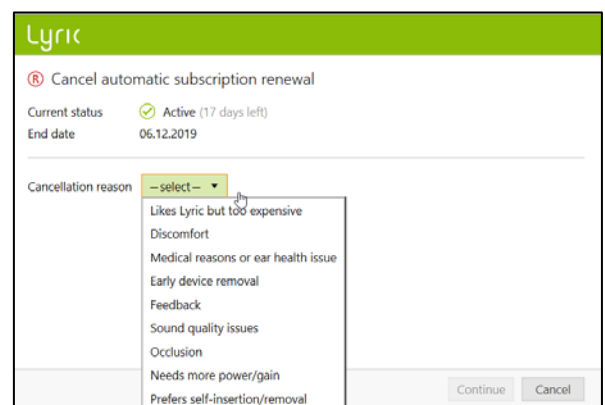


Een actief abonnement annuleren

Mocht het nodig zijn om een actief abonnement op te zeggen (op basis van medische complicaties), kunt u dit doen door in het scherm Lyric-configuratie **[Annuleer inschrijving]** te kiezen.

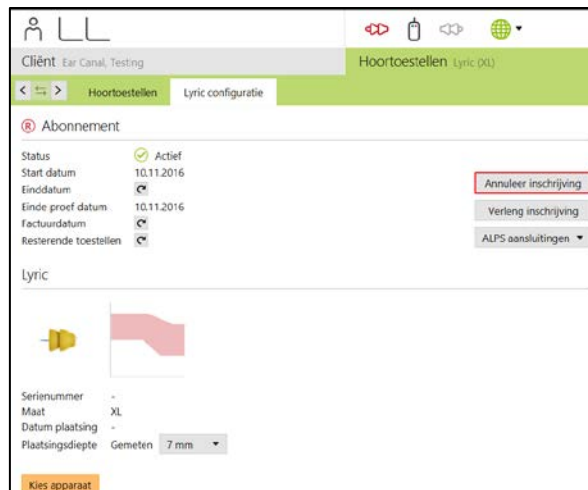

Het systeem waarschuwt u dat u op het punt staat een actief abonnement te annuleren. Om de annulering uit te voeren, kiest u de bijbehorende annuleringsreden en klikt u op Doorgaan. Het annuleringsverzoek wordt naar Phonak verzonden.

Let op dat **[patiënt overleden]** en **[heraanpassen is bezwaarlijk]** als nieuwe redenen voor het stoppen van het abonnement zijn toegevoegd.

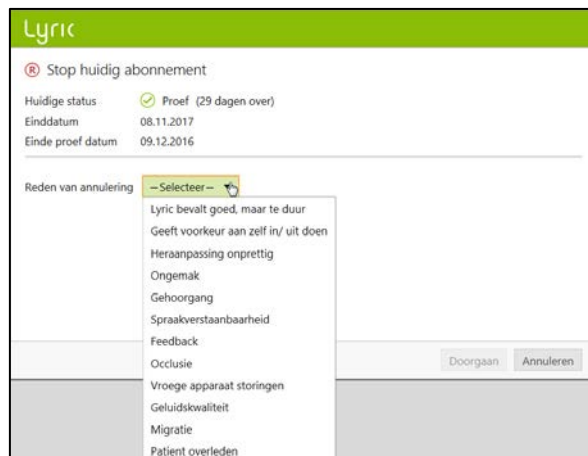


Een offline gebeurtenis synchroniseren

Het kan voorkomen dat u een cliënt heeft waarvan de gegevens al via Phonak Target/ALPS zijn ingesteld, maar u door verschillende redenen (tijdelijk geen internetverbinding of problemen met uw pc, etc.) genoodzaakt bent om tijdens een of meerdere sessies offline te werken. Hierdoor zijn de nieuwe gegevens in Phonak Target niet gesynchroniseerd met ALPS.

Het verwijderen van een toestel in de offline modus verloopt op dezelfde manier als het verwijderen van een toestel in de online modus.


U wordt gevraagd een nieuw toestel in te voeren.

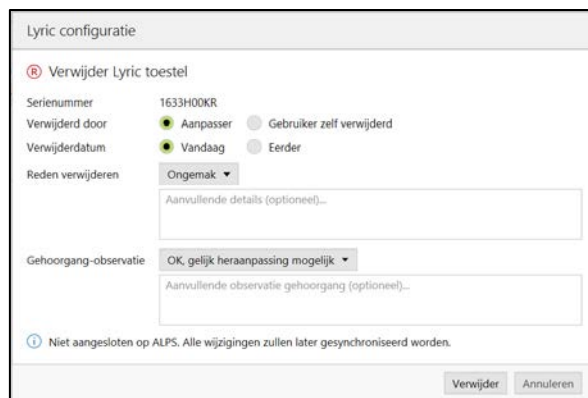

The screenshot shows the 'Lyric configuratie' dialog box with the title 'Verwijder Lyric toestel'. It contains the following fields and options:

- Serialnummer: 1633H00KR
- Verwijderd door: Aanpasser Gebruiker zelf verwijderd
- Verwijderdatum: Vandaag Eerder
- Reden verwijderen: Ongemak (dropdown menu)
- Aanvullende details (optioneel)... (text input field)
- Gehoorgang-observatie: OK, gelijk heraanpassing mogelijk (dropdown menu)
- Aanvullende observatie gehoorgang (optioneel)... (text input field)

At the bottom, there is an information icon and the text: 'Niet aangesloten op ALPS. Alle wijzigingen zullen later gesynchroniseerd worden.' Below this are two buttons: 'Verwijder' and 'Annuleren'.

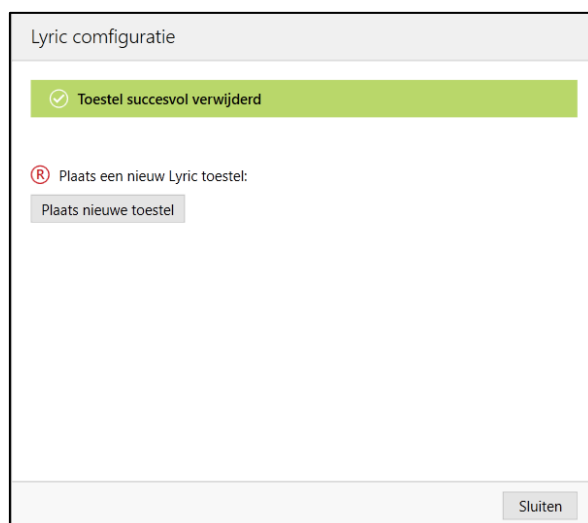

The screenshot shows the 'Lyric configuratie' dialog box with a green success message at the top: 'Toestel succesvol verwijderd'. Below this, there is a red warning icon and the text: 'Plaats een nieuw Lyric toestel:'. Underneath is a button labeled 'Plaats nieuwe toestel'. At the bottom right, there is a 'Sluiten' button.

Voer zowel het serienummer als de code die zichtbaar is op de Lyric-verpakking in. Vervolgens voert u de gemeten plaatsingsdiepte in. Indien nodig, kunnen de aanpassingsparameters aangepast worden.

Lyric configuratie

Geef toestel informatie in

Serienummer 1633H00KE

Code E394

Model Lyric3

Maat XL

Niet aangesloten op ALPS. Alle wijzigingen zullen later gesynchroniseerd worden.

Selecteer Annuleren

Wanneer het probleem verholpen is en u Phonak Target/ALPS weer kunt gebruiken, ontvangt u voor elke cliënt waarvoor offline de aanpassing is uitgevoerd een melding met een oranje uitroepteken: **[Sessie niet opgeslagen in ALPS]**.

Doe John

Sessie 1 07.08.2014 16:11

Geen audiogram beschikbaar

Lyric
SN: 1419NY7DR

Sessie niet opgeslagen in ALPS

Zodra Phonak Target weer met ALPS is verbonden, zal de synchronisatie automatisch plaatsvinden

Na een offline aanpassing, zijn er logboeken beschikbaar op uw pc.

Lyric

Synchroniseer offline toestelwijzigingen

Wijzig	Serienummer	Datum	Reden	Sync status
Verwijdering	1633H00KR	10.11.2016	Ongemak	In afwachting
Insertion	1633H00KE	10.11.2016		In afwachting

Sync met ALPS Annuleren

Een groen vinkje geeft aan dat de synchronisatie is gelukt.

Lyric

Alle offline veranderingen gesynchroniseerd naar ALPS

Wijzig	Serienummer	Datum	Reden	Sync status
Verwijdering	1633H00KR	10.11.2016	Ongemak	Gesynchroniseerd
Insertion	1633H00KE	10.11.2016		Gesynchroniseerd


Succesvol gesynchroniseerd

Doorgaan Annuleren


De startpagina van ALPS en rapporten

Sommige handelingen vereisen een directe link met ALPS:

- Open ALPS
- Klantdetails
- Print Lyric ID card
- Rapporten

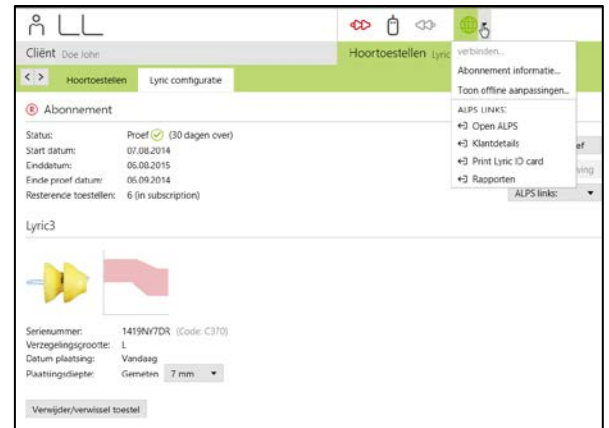


- Rapporten afdrukken
- Toestelhistorie
- Toesteldetails

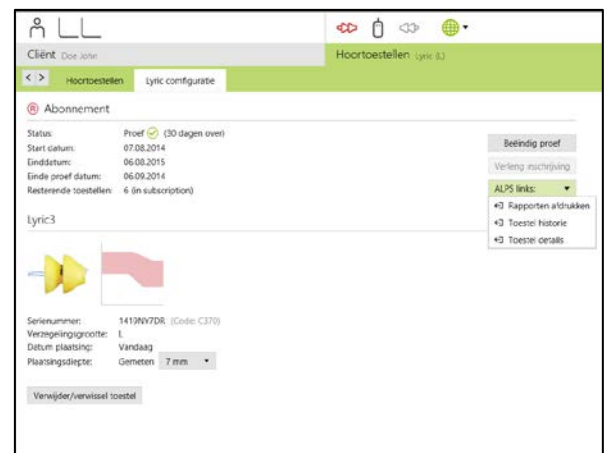

In ALPS kunt u de volgende details op het beginscherm zien:

- Onvoltooid(e) (abbonementen)
- Abbonementen die de vervaldatum naderen
- Proeven
- Toestellen die de vervaldatum naderen
- Toestellen die zich meer dan 120 dagen in het oor bevinden

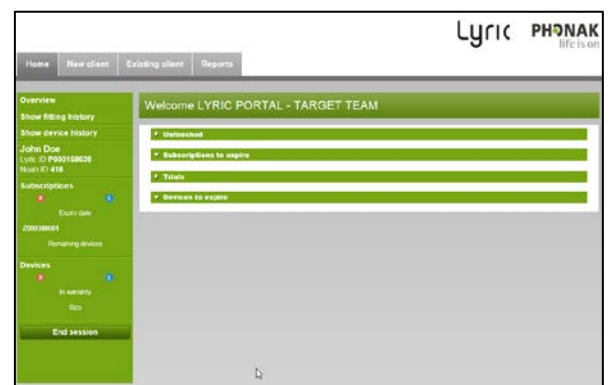

Onder **[Home]**, **[Proef]** kunt u op de afzonderlijke velden sorteren en binnen deze velden zoeken. Hiermee kunt u eenvoudig te weten komen wat de einddatum van de proefperiode van uw cliënt is.

Lyric ID	First name	Last name	Subscription no	Trial end date	Email
P0000000	John	Doe	2000152403	15-05-2014	View
P0000001	John	Doe	2000151116	12-02-2014	View
P0000002	John	Doe	2000152021	12-07-2014	View
P0000003	John	Doe	2000151427	25-05-2014	View
P0000004	John	Doe	2000151796	23-03-2014	View
P0000005	John	Doe	2000151902	26-03-2014	View
P0000006	John	Doe	2000151839	26-03-2014	View
P0000007	John	Doe	2000151825	26-03-2014	View
P0000008	John	Doe	2000151831	26-03-2014	View
P0000009	John	Doe	2000151832	26-03-2014	View
P0000010	John	Doe	2000151833	26-03-2014	View
P0000011	John	Doe	2000151834	26-03-2014	View


Om te registreren voor een automatische email, logt u in via **[Patient notification settings]** en noteert u het gewenste emailadres. Deze informatie email geeft meer details over de volgende zaken:

- Trials die aflopen
- Contracten die vernieuwd kunnen worden


Wanneer de cliënten zijn geïnformeerd, kunt u ze van de lijst verwijderen door te klikken op **[Renewed]** of **[Confirmed]**. De cliëntnaam zal niet langer op de lijst voorkomen van cliënten die in aanmerking komen voor contractverlenging of einde trial. De lijst is te vinden onder **[List of contacted patients]**.

First name	Last name	Subscription no	End date	Renewed	Comment
John	Doe	2000027245	7/2/2015	<input type="checkbox"/>	
John	Doe	2000027246	7/2/2015	<input type="checkbox"/>	
John	Doe	2000026636	7/2/2015	<input type="checkbox"/>	
John	Doe	2000026637	7/2/2015	<input type="checkbox"/>	
John	Doe	2000026920	7/2/2015	<input type="checkbox"/>	
John	Doe	2000026921	7/2/2015	<input type="checkbox"/>	
John	Doe	2000026596	7/2/2015	<input type="checkbox"/>	
John	Doe	2000026600	7/2/2015	<input type="checkbox"/>	


Onder **[Inventory Audit]** kunt u het overzicht van uw depotvoorraad van Lyric-hoortoestellen bekijken of afdrucken.

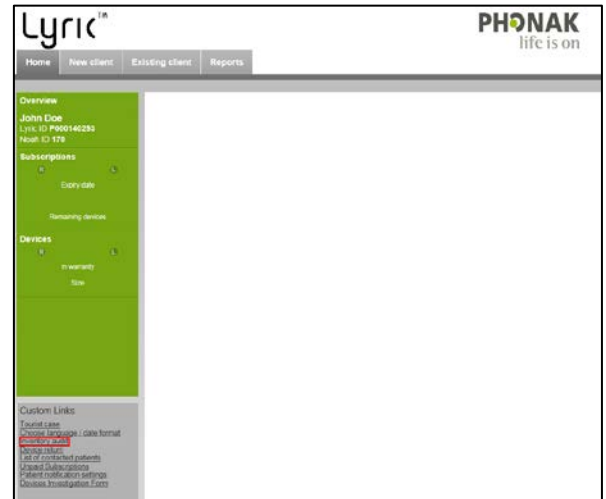


Indien een toestel geretourneerd moet worden aan Phonak, kiest u voor **[Device Return]** en klikt u op het bijbehorende serienummer en de desbetreffende reden voor het retourneren.

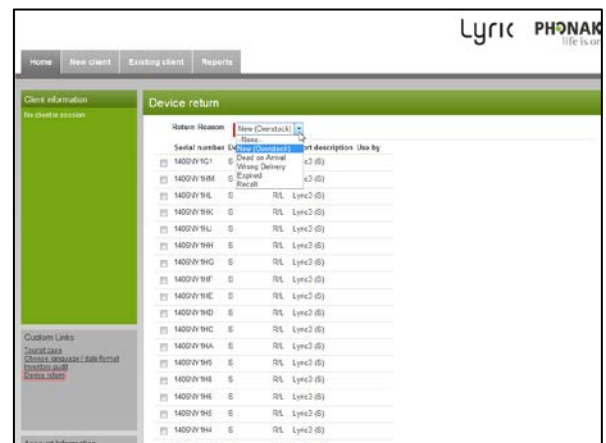

In het tabblad **[Rapporten]** vindt u alle belangrijke rapporten die u nodig heeft voor het afhandelen van abonnementen en het verwerken van toestellen

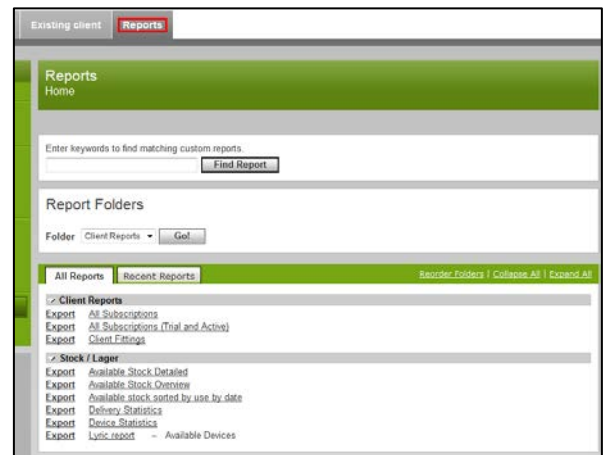


Deze rapporten zijn te sorteren op start- en einddatum en ze kunnen bewerkt en geëxporteerd worden als Microsoft Excel-bestand.

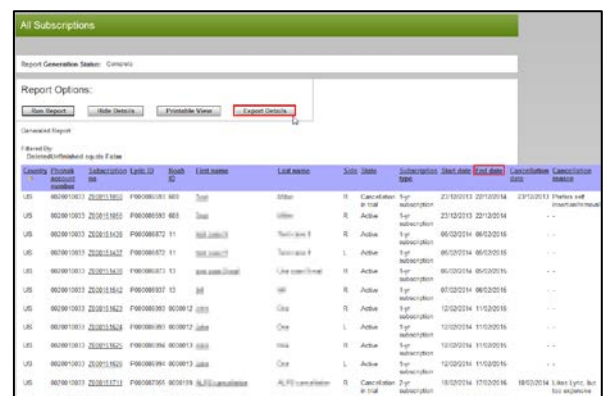

Uitgebreidere logregistratie voor support inschakelen

Als u problemen ondervindt met Phonak Target, kan een uitgebreidere logregistratie onze Target-software-support helpen de oorzaak te traceren.

Sla de logbestanden op uw pc op en verstuur ze naar uw Lyric-contactpersoon.

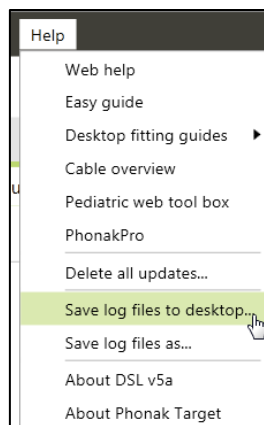

Informatie en beschrijving van de symbolen en systeemeisen

Informatie en beschrijving van de symbolen en een overzicht van de systeemeisen staan in de Phonak Target Aanpasgids

CE-markering toegepast 2021



2021-02-22

Fabrikant:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa