

Phonak

Roger™ iN-Mikrofone

Installationsanleitung für Roger iN-Mikrofone


Inhalt

Installation von Roger-Empfängern in ein oder zwei Hörgeräte mit RogerDirect™.....	1
Anzahl der Roger-Empfänger in einem Roger iN-Mikrofon prüfen.....	2
Roger-Empfänger von einem Hörgerät deinstallieren.....	3


Installation von Roger-Empfängern in ein oder zwei Hörgeräte mit RogerDirect™

Installationsschritte:


1. Das Roger iN-Mikrofon anschalten
2. Drücken Sie die Installationstaste zwei Sekunden, bis die Statusanzeige grün zu blinken beginnt oder das Hörgerätesymbol auf dem Display des Roger On iN erscheint.

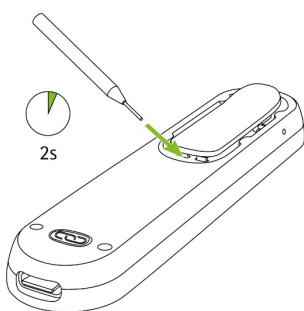


Roger On™ iN

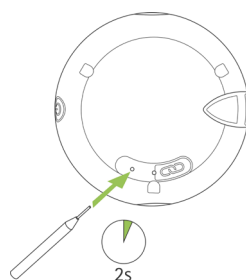

Roger Select™ iN

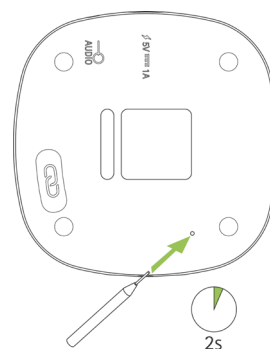


Roger Table Mic II iN

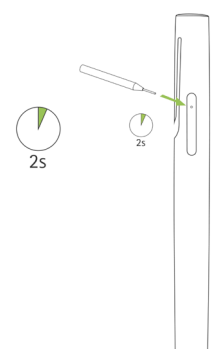

Roger Pen™ iN

3. Das Roger iN-Mikrofon auf den Tisch stellen
4. Eines der beiden Hörgeräte einschalten und **alle anderen Hörgeräte ausgeschaltet lassen**

5. Das Hörgerät nah an das Roger iN-Mikrofon heranführen (max. 10 cm Abstand)

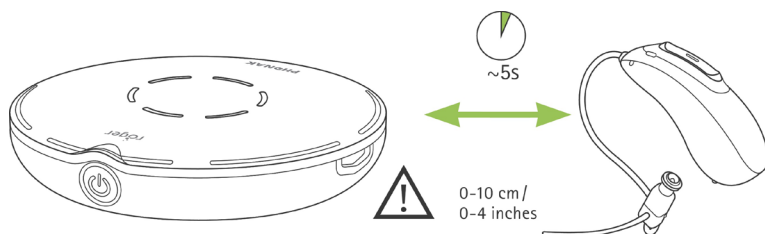

6. Ungefähr 5 Sekunden warten, bis die Statusanzeige auf dem Roger iN-Mikrofon konstant grün leuchtet oder ein Häkchen auf dem Display des Roger On iN erscheint.
7. Die Schritte 2 bis 6 mit dem zweiten Hörgerät wiederholen.

Hinweis: Die Hörgeräte verbinden sich automatisch mit dem Roger iN-Mikrofon.

Wenn die Statusanzeige nach dem Installationsvorgang rot leuchtet, war die Installation nicht erfolgreich. Das kann folgende Gründe haben:

- Der Abstand zwischen Ihrem Roger iN-Mikrofon und dem Hörgerät ist zu groß
- Im Roger iN-Mikrofon sind keine Roger-Empfänger installiert
- Im Hörgerät ist Roger bereits installiert
- Das Hörgerät verfügt nicht über RogerDirect.

Anzahl der Roger-Empfänger in einem Roger iN-Mikrofon prüfen

Nach Anschalten des Roger-Mikrofons kurz die Installations-Taste am Roger-iN Mikrofon drücken:

Roger On iN zeigt nun auf dem Display an, wie viele Roger-Empfänger verfügbar sind.


Beim Roger Select iN, Roger Pen iN und Roger Table Mic II in gibt die Statusanzeige die Anzahl der installierten Roger-Empfänger an:

- | | |
|-----|----------------------------------|
| ● ● | Zwei Roger-Empfänger installiert |
| ● ● | Ein Roger-Empfänger installiert |
| ● ● | Kein Roger-Empfänger installiert |


Roger-Empfänger von einem Hörgerät deinstallieren

Schritte zur Deinstallation:


1. Das Roger iN-Mikrofon anschalten
2. Drücken Sie die Installationstaste zwei Sekunden, bis die Statusanzeige grün zu blinken beginnt oder das Hörgerätesymbol auf dem Display des Roger On iN erscheint

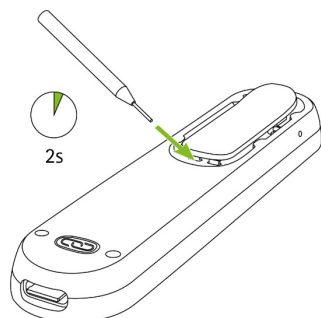


Roger On™ iN

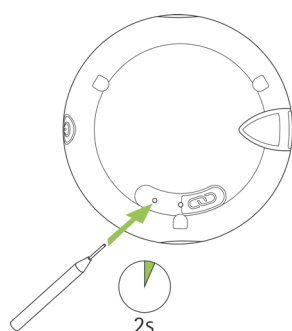

Roger Select™ iN

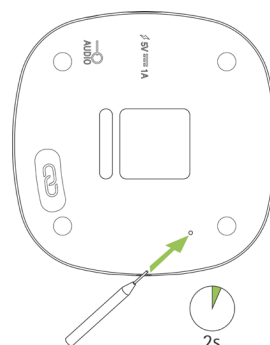


Roger Table Mic II iN

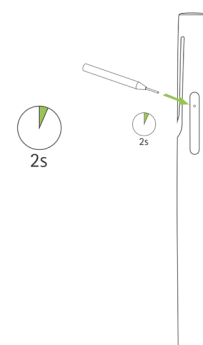

Roger Pen™ iN

3. Das Roger iN-Mikrofon auf den Tisch stellen
4. Eines der beiden Hörgeräte einschalten und **alle anderen Hörgeräte ausgeschaltet lassen**
5. Das Hörgerät nah an das Roger iN-Mikrofon heranhelfen (max. 10 cm Abstand)

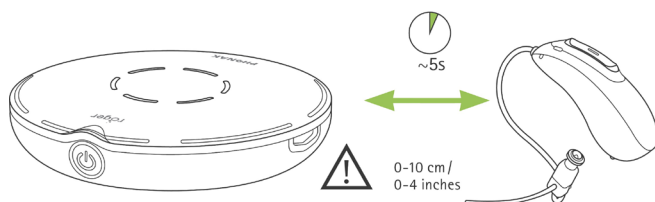

6. Ungefähr 5 Sekunden warten, bis die Statusanzeige auf dem Roger iN-Mikrofon konstant grün leuchtet oder ein Häkchen auf dem Display des Roger On iN erscheint.
7. Die Schritte 2 bis 6 mit dem zweiten Hörgerät wiederholen, falls erforderlich.

Wenn nach der Deinstallation die Statusanzeige rot leuchtet oder auf dem Display von Roger On iN ein Kreuz oder ein Fragezeichen erscheint, dann war die Deinstallation nicht erfolgreich. Das kann folgende Gründe haben:

- Der Abstand zwischen Ihrem Roger iN-Mikrofon und dem Hörgerät ist zu groß
- Im Roger iN-Mikrofon sind bereits zwei Roger-Empfänger installiert
- Auf dem Hörgerät ist kein Roger installiert
- Das Hörgerät verfügt nicht über RogerDirect.