

Phonak CROS B

Information produit



Phonak CROS B est un produit conçu pour les patients atteints d'une perte auditive unilatérale non appareillable. Il se porte sur l'oreille non appareillable, accompagné de l'aide auditive Belong™ placée sur la meilleure oreille. CROS B transfère le signal d'entrée du microphone à l'aide auditive. Celle-ci reçoit le signal et le diffuse dans la meilleure oreille pour rendre audibles les sons arrivant dans l'oreille non appareillable. CROS B ne dispose pas de sortie acoustique.

CROS B est compatible avec les aides auditives de tous les niveaux de performances utilisant la plateforme Phonak Belong. Il peut être appareillé avec des aides auditives fonctionnant avec la version 5.0 ou ultérieure de Phonak Target.

Description des produits



CROS B-R



CROS B-312



CROS B-13



CROS B-312 Custom



CROS B-13 Custom

	CROS B-R	CROS B-312	CROS B-13	CROS B-312 Custom	CROS B-13 Custom
Taille de la pile		312	13	312	13
Courant de fonctionnement (mA)		2,6	2,6	2,1	2,1
Bouton-poussoir	•	•	•	•	•
Contrôle de volume			•	En option	En option
Compartiment pile avec sécurité enfant			•		
Protection par « nano coating »	•	•	•	•	•
Indice de protection	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹		
Dimensions (L x l x P)	29,7 x 12,9 x 7,9 mm	26,6 x 10,8 x 6,9 mm	31,6 x 14,4 x 8,4 mm		
Poids	2,4g	1,3g	2,15g		
Compatibilité	Audéo B-R	RIC/BTE Belong	RIC/BTE Belong	Produits sans-fil sur-mesure Belong	Produits sans-fil sur-mesure Belong

¹ L'indice IP68 indique que l'aide auditive est protégée contre l'eau et la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529. Aucune trace de poussière n'a été retrouvée à l'intérieur du boîtier.

Couleurs

CROS B-312 CROS B-13 CROS B-R	P1 Dune de Sable	P3 Santal	P4 Noisette	P5 Champagne	P6 Gris Argenté	P7 Gris Carbone	P8 Velours Noir	T7 Blanc Alpin	O1 Beige
CROS B-13	Q2 Vert Electrique	Q3 Bleu Caraïbes	T3 Rose Poudré	T7 Blanc Alpin	M6 Rouge Volcan	M7 Bleu Océan	M8 Violet Pourpre		
Coude (CROS B-13 uniquement)	R1 Vert	R2 Jaune	R3 Rose	O6 Bleu	13 Transparent Pur	Q7 Violet	R4 Orange		
Coque	14 Tan	22 Cocoa	26 Beige	28 Marron	19 Blanc	21 Transparent	36 Rouge Transparent	37 Bleu Transparent	
Face-plate	14 Tan	22 Cocoa	26 Beige	28 Marron					

Options de rétention

Coude de démonstration CROS

- Coude permettant de maintenir CROS sur l'oreille pendant l'appareillage et la démonstration
- Pour une utilisation uniquement lors d'une démonstration
- Inclus avec tout dispositif Phonak CROS

Tube fin CROS

- Tube fin standard pour dispositifs CROS
- Disponible en version gauche et droite, dans quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)
- Le dôme doit être fixé. Disponible en version dôme ouvert, fermé et puissant, dans trois tailles (S, M et L)

Coude CROS

- Coude pour la fixation d'un embout sur-mesure avec tube standard au modèle CROS-13
- Disponible uniquement pour le modèle CROS-13
- Fourni avec tous les dispositifs CROS-13 ou à commander séparément (référence : 048-0261)

CROS Tip

- Embout fait sur-mesure pour les dispositifs CROS
- Disponible en version gauche et droite, dans quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)

Appareillage

Logiciel	Phonak Target 5.0 ou supérieur, 5.2 pour les modèles sur-mesure CROS B, 5.3.3 pour CROS B-R
Interfaces	iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

En utilisant iCube II, Phonak CROS B est actif pendant l'appareillage. Vos patients découvrent instantanément les avantages de la solution CROS et peuvent vous donner leur avis lors de la session d'appareillage.

Gamme de communication sans fil

Tous les accessoires sans fil peuvent être connectés et utilisés avec l'aide auditive de la meilleure oreille. Si l'aide auditive reçoit un signal de diffusion, le signal de CROS est automatiquement mis en attente. La connexion à CROS sera rétablie automatiquement lorsque la diffusion provenant de l'accessoire cessera.

Fonctions clés

Présentation de CROS pendant l'appareillage

En utilisant iCube II, CROS B est actif pendant l'appareillage. Le processus d'appareillage devient donc plus rapide et plus précis car le patient peut donner immédiatement ses impressions sur l'équilibre entre les aides auditives et sur la qualité sonore.

StereoZoom

Concentration sur une seule voix dans un environnement de bruit diffus, améliorant l'intelligibilité vocale jusqu'à 60 %.¹ StereoZoom est disponible dans les niveaux de performances 90 (programme manuel et automatique) et 70 (programme manuel).

Contrôle de volume CROS

Pour un meilleur confort dans le bruit, le contrôle de volume CROS permet au patient de régler le volume du signal CROS à sa convenance.

AutoSense OS

AutoSense OS détecte automatiquement le milieu acoustique exact de votre patient en temps réel. Il s'appuie sur plusieurs fonctions et les mélange de manière précise pour créer plus de 200 réglages différents.

¹ StereoZoom : Amélioration de la compréhension vocale dans des appareillages ouverts.
Phonak Field Study News, avril 2011

Performances de CROS B

CROS B propose également le programme Parole dans le bruit intense avec StereoZoom. Il est disponible pour les aides auditives des niveaux de performances B90 et B70. Pour les niveaux de performances moins élevés, CROS B propose Real Ear Sound et les modes de microphone omnidirectionnel.

Sur la meilleure oreille, les patients CROS B profiteront de toutes les caractéristiques de Belong, comme AutoSense OS. Ce système d'exploitation offre des transitions fluides et des réglages optimaux pour différentes situations auditives.

Niveaux de performances de l'aide auditive	Modes de microphone disponibles pour CROS B			
	StereoZoom automatique	StereoZoom manuel	Real Ear Sound	Omnidirectionnel
Premium (B90)	•	•	•	•
Avancé (B70)		•	•	•
Standard (B50)			•	•
Essentiel (B30)				•

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement.

*Et la vie s'exprime!

www.phonakpro.fr