

# Phonak Fast Facts



## TV Connector

### De quoi s'agit-il ?

Le TV Connector est un appareil de diffusion prêt à l'emploi qui permet de connecter directement des aides auditives Phonak Audéo™ B-Direct à un téléviseur ou à un lecteur multimédia sans nécessiter le port d'un appareil de diffusion. Grâce à la technologie AirStream™, le nouveau protocole de diffusion de 2,4 GHz breveté de Phonak, le TV Connector assure une diffusion audio directe depuis de nombreux téléviseurs et équipements audio tout en offrant une excellente qualité sonore stéréo vers les aides auditives Audéo B-Direct.

### Quels sont les avantages ?

Les avantages pour vos patients :

- Inutile de porter un appareil de diffusion
- Transforme les aides auditives Audéo B-Direct en oreillettes sans fil
- Configuration facile, prêt à l'emploi
- Transmission de haute qualité de la parole et de la musique depuis n'importe quelle source audio
- Possibilité d'utiliser la balance environnementale pour régler le volume du signal diffusé par rapport aux sons ambiants
- Avantage unique de pouvoir connecter simultanément plusieurs utilisateurs au même signal audio

### Comment l'utiliser ?

Le TV Connector est prêt à l'emploi et peut être utilisé sur n'importe quelle télévision équipée d'une prise optique ou d'une prise jack de 3,5 mm. Les aides auditives sont automatiquement appairées au TV Connector. Si l'appairage n'est pas automatique, appuyez sur le bouton d'appairage du TV Connector pour vous connecter aux aides auditives situées dans un rayon d'un mètre (3 pieds). Pour connecter plusieurs utilisateurs, appuyez sur le bouton d'appairage du TV Connector. Les patients situés dans un rayon d'un mètre (3 pieds) sont alors automatiquement appairés. Allumez la télévision. Lorsque le patient se trouve à portée (15 m/49 pieds) du TV Connector, la diffusion commence automatiquement.



Pour en savoir plus sur le TV Connector, rendez-vous sur [www.phonakpro.ca/tvconnector](http://www.phonakpro.ca/tvconnector)

# Phonak Fast Facts

## Noahlink Wireless

### De quoi s'agit-il ?

Noahlink Wireless est le nouvel appareil de programmation standard conçu pour les aides auditives compatibles avec la technologie Bluetooth® à basse consommation (Bluetooth Low Energy ou BLE). Fabriqué par HIMSA, l'appareil transfère sans fil les données d'appareillage de l'ordinateur aux aides auditives compatibles BLE (telles que les aides auditives Phonak Audéo™ B-Direct) sans utiliser de câble.

### Quels sont les avantages ?

Noahlink Wireless simplifie le processus d'appareillage :

- Il s'agit d'un appareil de programmation universel, ce qui évite d'avoir à utiliser des dispositifs de programmation brevetés
- Il offre la souplesse nécessaire pour ajuster les réglages des aides auditives sans fil compatibles BLE, sans utiliser de câble
- Exclusivité Phonak : l'aide auditive Audéo B-Direct peut être facilement identifiée. Appuyez sur le bouton-poussoir de l'aide auditive pour la sélectionner dans la liste des appareils disponibles



### Comment l'utiliser ?

Noahlink Wireless est facile à utiliser et à configurer. Installez Phonak Target 5.2 ou une version supérieure et branchez le câble USB de Noahlink Wireless sur l'ordinateur d'appareillage. Noahlink Wireless est automatiquement installé et peut être facilement sélectionné dans le menu déroulant des dispositifs d'appareillage disponibles.

Ouvrez et fermez le compartiment pile, puis cliquez sur **[Connecter]** pour détecter l'aide auditive Phonak Audéo B-Direct. Les appareils à portée sont affichés. Appuyez sur **[Diffuser le bip]** ou sur le bouton-poussoir des aides auditives pour confirmer le(s) côté(s) que vous souhaitez attribuer à un patient.

Pour en savoir plus sur les aides auditives Phonak Audéo B-Direct, rendez-vous sur [www.phonakpro.ca/audeo-b-direct](http://www.phonakpro.ca/audeo-b-direct)

Pour en savoir plus sur Noahlink Wireless, veuillez consulter les FAQ du site Web de HIMSA

<https://www.himsa.com/Products/NoahlinkWireless/ProductInformationSheets/tabid/4794/language/en-US/Default.aspx>