

## Phonak Mini Chargeur



### De quoi s'agit-il ?

Le Mini Chargeur est l'option de charge petite et compacte pour les aides auditives rechargeables Phonak Belong™. Grâce à sa taille, il prend peu de place, ce qui en fait un petit chargeur idéal à transporter ou un chargeur de secours.

### Quels sont les avantages ?

Le Mini Chargeur est la solution idéale pour les patients qui souhaitent un chargeur petit, compact et plus pratique à transporter.

### Comment l'utiliser ?

Pour charger les aides auditives, il suffit de les placer dans les emplacements de chargement du Mini Chargeur et elles s'éteignent automatiquement. Le voyant lumineux vert clignote doucement pour indiquer que les aides auditives sont en train de charger. Lorsque le voyant cesse de clignoter et reste allumé, cela signifie que les aides auditives sont complètement chargées et qu'elles sont prêtes à l'emploi. La durée de recharge d'une aide auditive complètement déchargée est de 3 heures.



Phonak Mini Chargeur pour Bolero B-PR



Phonak Mini Chargeur pour Audéo B-R

Pour plus d'informations sur les aides auditives rechargeables Phonak Belong et les options de charge, consultez [www.phonakpro.ca](http://www.phonakpro.ca) ou contactez votre représentant Phonak.

## Fast Facts Rechargeable



# Aides auditives rechargeables Phonak



## De quoi s'agit-il ?

Phonak Bolero B-PR (BTE) et Audéo B-R (RIC) sont des aides auditives aux caractéristiques complètes avec un capteur-T, un contrôle du volume et une batterie intégrée, ce qui permet de ne plus jamais avoir à remplacer les piles. Les deux aides offrent 24 heures\* d'autonomie avec une seule charge grâce à une batterie lithium-ion (Li-ion). En outre, le design du nouveau boîtier offre les avantages d'être résistant à l'eau et étanche à la poussière (IP68).

## Quels sont les avantages ?

Grâce aux batteries rechargeables, les patients profitent d'une audition en toute simplicité, sans avoir à changer les piles ou à toujours emporter avec eux des piles de rechange. Avec une batterie Li-ion, la détérioration et la dégradation de la batterie dans le temps sont réduites, sans affecter les performances de l'aide auditive. De plus, en retirant le compartiment pile, la durabilité de l'aide auditive a été améliorée. Vous pouvez également profiter de davantage de temps pour prodiguer des conseils aux patients, en abordant des sujets ne concernant pas le changement des piles ou l'entretien.

## Comment l'utiliser ?

Bolero B-PR et Audéo B-R sont faciles à utiliser. Retirer simplement les aides auditives du chargeur et appuyer sur le bouton-poussoir pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote brièvement en vert. Les aides auditives sont alors allumées et prêtes à être utilisées. À la fin de la journée, il suffit de placer les aides auditives dans le chargeur. Les aides auditives se placent dans les emplacements prévus et s'éteignent automatiquement. Le voyant lumineux vert clignote doucement pour indiquer que les aides auditives sont en train de charger. Lorsque le voyant cesse de clignoter et reste allumé, cela signifie que les aides auditives sont complètement chargées et qu'elles sont prêtes à l'emploi. La durée de charge d'une aide auditive complètement déchargée est de 3 heures.

Pour plus d'informations sur les aides auditives rechargeables Phonak Bolero B-PR, Phonak Audéo B-R et les options de charge, consultez [www.phonakpro.ca](http://www.phonakpro.ca) ou contactez votre représentant Phonak.

\*Résultats attendus en cas de charge complète et jusqu'à 80 minutes de temps de diffusion sans fil. Veuillez consulter [www.phonakpro.fr/etudes](http://www.phonakpro.fr/etudes)



Bolero B-PR



Audéo B-R

# Options de charge Phonak



## De quoi s'agit-il ?

L'Ecrin de Charge Phonak est une option de charge pour les aides auditives rechargeables Phonak Belong™. Il sert aussi de kit de séchage et de boîtier rigide. Un chargeur Power Pack amovible en option peut être raccordé à l'écrin de charge pour les moments où il n'y a pas de source d'alimentation externe.

## Quels sont les avantages ?

C'est la solution idéale pour les clients qui souhaitent un chargeur présentant l'avantage de charger, ranger et sécher leurs aides auditives à la fois. L'ajout du chargeur Power Pack permet également de recharger les aides auditives sans source d'alimentation externe pendant un maximum de 7 jours.

## Comment l'utiliser ?

Pour charger les aides auditives, placez-les simplement sur les points de chargement de l'Ecrin de Charge et elles s'éteignent automatiquement. Le voyant lumineux vert clignote doucement pour indiquer le chargement en cours des aides auditives. Lorsque le voyant cesse de clignoter et reste allumé, cela signifie que les aides auditives sont complètement chargées et qu'elles sont prêtes à l'emploi. La durée de charge d'une aide auditive complètement déchargée est de 3 heures.

En l'absence de source d'alimentation externe, le chargeur Power Pack peut être verrouillé sous l'Ecrin de Charge. Ceci fournit ainsi 7 charges complètes pour une paire d'aides auditives rechargeables Belong. Pour recharger le chargeur Power Pack, il est inutile de le sortir de l'écrin de charge. Il suffit de le connecter simplement à une source d'alimentation externe. Les aides auditives et le chargeur Power Pack peuvent être chargés simultanément.

Pour plus d'informations sur les aides auditives rechargeables Phonak Bolero B-PR, Phonak Audéo B-R et les options de charge, consultez [www.phonakpro.ca](http://www.phonakpro.ca) ou contactez votre représentant Phonak.



Écrin de Charge Phonak pour Bolero B-PR

Écrin de Charge Phonak pour Audéo B-R

Phonak Power Pack