


Phonak Guide

Instructions patient : mesure de l'oreille

1. L'image de droite représente la zone à mesurer afin de déterminer la longueur adéquate.

- a. Point 1 : haut de l'entrée du conduit auditif
- b. Point 2 : endroit où les lunettes reposent sur votre oreille

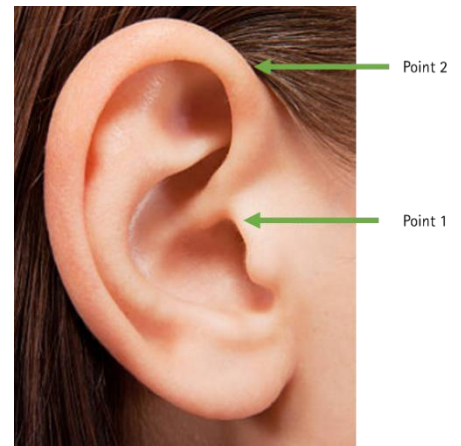

2. Placez la règle à plat contre votre tête, de sorte qu'elle touche à la fois le haut et le bas de votre oreille.



3. Demandez à une autre personne (si possible) de prendre une photo de vos deux oreilles, la règle toujours en place.

Recommandations pour les photos :

- a. Utilisez la caméra de votre téléphone et prenez les photos dans un endroit bien éclairé
- b. La caméra doit être focalisée et directement alignée sur l'oreille
- c. Concentrez-vous sur l'oreille et la règle
- d. Veillez à ce que la règle soit droite sur toute la longueur
- e. Tenez la caméra immobile pour que les détails de la photo soient bien visibles

4. Enregistrez les photos et envoyez-les par email, par WhatsApp ou par SMS à votre audioprothésiste.

5. Votre audioprothésiste vérifiera vos mesures lors de votre rendez-vous de suivi en personne ou à distance.