


Phonak

Anleitung

Kundenanweisungen: Ohrmessung

1. Das Bild auf der rechten Seite stellt den zu messenden Bereich dar, um die entsprechende Länge zu bestimmen.

- a. Punkt 1: Spitze des Gehörgangseingangs
- b. Punkt 2: Wo die Brille auf dem Ohr ruht

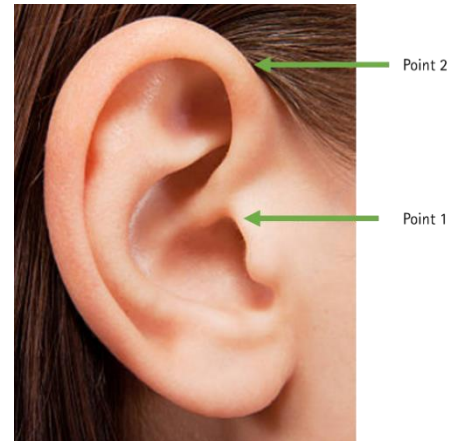

2. Legen Sie das Lineal flach auf Ihren Kopf, so dass es sowohl die Ober- als auch die Unterseite des Ohres berührt.



3. Bitten Sie eine andere Person (wenn möglich), ein Foto von beiden Ohren zu machen, immer mit dem Lineal an Ort und Stelle.

Empfehlungen für Fotos:

- a. Verwenden Sie die Kamera Ihres Telefons und machen Sie Fotos in einem gut beleuchteten Bereich
 - b. Die Kamera sollte fokussiert und direkt am Ohr ausgerichtet sein
 - c. Fokus auf das Ohr und das Lineal
 - d. Stellen Sie sicher, dass das Lineal über die gesamte Länge gerade ist.
 - e. Halten Sie die Kamera so still, dass die Details im Bild deutlich sichtbar sind
4. Speichern Sie die Fotos und senden Sie sie per E-Mail, WhatsApp oder SMS an Ihren Hörakustiker.
 5. Ihr Hörakustiker wird Ihre Messungen während Ihres persönlichen oder entfernten Folgetermins überprüfen.