


Phonak

Anleitung

Kundenanweisungen: Ohrmessung

1. Das Bild auf der rechten Seite stellt den zu messenden Bereich dar, um die entsprechende Länge zu bestimmen.

- a. Punkt 1: Spitze des Gehörgangseingangs
- b. Punkt 2: Wo die Brille auf dem Ohr ruht

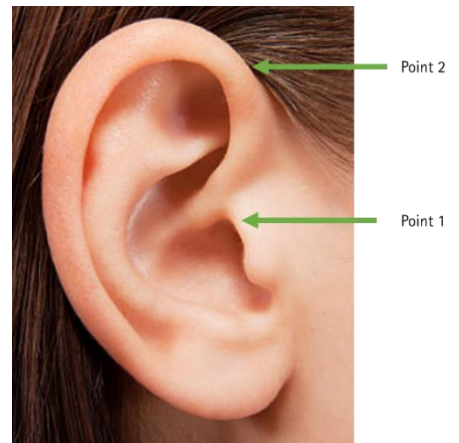

2. Legen Sie das Lineal flach auf Ihren Kopf, so dass es sowohl die Ober- als auch die Unterseite des Ohres berührt.




3. Bitten Sie eine andere Person (wenn möglich), ein Foto von beiden Ohren zu machen, immer mit dem Lineal an Ort und Stelle.

Empfehlungen für Fotos:

- a. Verwenden Sie die Kamera Ihres Telefons und machen Sie Fotos in einem gut beleuchteten Bereich
 - b. Die Kamera sollte fokussiert und direkt am Ohr ausgerichtet sein
 - c. Fokus auf das Ohr und das Lineal
 - d. Stellen Sie sicher, dass das Lineal über die gesamte Länge gerade ist.
 - e. Halten Sie die Kamera so still, dass die Details im Bild deutlich sichtbar sind
4. Speichern Sie die Fotos und senden Sie sie per E-Mail, WhatsApp oder SMS an Ihren Hörakustiker.
 5. Ihr Hörakustiker wird Ihre Messungen während Ihres persönlichen oder entfernten Folgetermins überprüfen.

Klinische Anleitung: Ohrmessung

- Das Bild auf der rechten Seite stellt den zu messenden Bereich dar, um die entsprechende Länge des Hörers oder SlimTubes zu bestimmen.

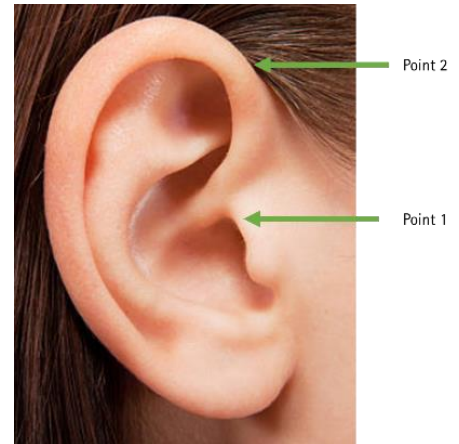

- Ihr Kunde wird Ihnen Bilder seiner Ohren mit einem Lineal am Ohr zur Messung der Distanz zwischen den beiden definierten Punkten zusenden.
- Kopieren Sie die Fotos, und fügen Sie sie in eine Word oder PowerPoint-Präsentation ein.
- Öffnen Sie Word oder Powerpoint, fügen Sie die Bilder des rechten und linken Ohres ins Dokument ein und ziehen Sie zwei horizontale Striche ins Dokument (die Striche finden Sie unter Einfügen, Formen).
- Ziehen Sie eine Linie an Punkt 1 und die andere Linie an Punkt 2, die in der Abbildung oben gezeigt werden.



- Messen Sie den Abstand zwischen den Punkten. Verwenden Sie die Messkonvertierungstabelle, um die richtige Länge zu bestimmen. Wenn die Messung zwei Größen überspannt, wählen Sie die kleinere Größe aus.

| Länge Hörer oder SlimTube | mm | cm |
|---------------------------|-------|---------|
| 0 | 15-23 | 1,5-2,3 |
| 1 | 23-27 | 2,3-2,7 |
| 2 | 27-32 | 2,7-3,2 |
| 3 | 32-45 | 3,2-4,5 |

- Geben Sie Ihre Bestellung basierend auf der richtigen Länge auf und überprüfen Sie die Länge des Hörers bzw. des SlimTubes des Kunden beim ersten Termin in Ihrem Geschäft.