

Brug af Roger inspiro og designintegrerede Roger-modtagere

Referenceblad

roger



Fornavn: _____

Efternavn: _____

Skole: _____

Underviser: _____

Roger-kontaktperson: _____

Telefon: _____

Dato: _____

Mikrofon: Roger inspiro

Brugsanvisning

1. For at tænde for enheden skal du skubbe skydeknappen mod venstre, indtil det grønne mærke bliver synligt, og skærmen oplyses.
2. Sæt mikrofonen fast inden for en afstand af 20 cm fra munden, eller hæng bøjlemikrofonen korrekt på øret, så mikrofonen sidder foran munden.
3. Skal eleven tilsluttes? Hvis det er tilfældet, skal du placere senderen inden for en afstand af 10 cm fra den ene Roger X-modtager. Tryk på højre funktionstast **Tilslut**. Gentag dette for den anden side, hvis eleven har to Roger-modtagere.
4. Lås tasten ved at trykke på , og tryk derefter på **OK**. Der vises et nøglesymbol i statuslinjen.
5. Når dagen er slut, skal du slukke for inspiro ved at skubbe den øverste skydeknapp mod højre, og tilslutte mini-USB-stikket fra opladeren til Roger inspiro.

Serienummer: _____



Modtagere: Designintegrerede Roger-modtagere

Brugsanvisning

1. De designintegrerede Roger-modtagere skal placeres i henhold til den pågældende brugsanvisning.
2. Det burde ikke være nødvendigt at fjerne dem på skolen (disse modtagere er konstrueret til at sidde permanent på høreapparaterne).

Serienumre

Højre: _____ Venstre: _____



☐ 10



☐ 11



☐ 13



☐ 15



☐ 16