


Recommandations d'entretien des intras discrets Phonak

Intras discrets = Virto B-Titanium, B-10 NW O, B-10 O


RECOMMANDÉ

1. Lingette ou chiffon doux
2. Brossage tiroir pile fermé
3. Brossage événements de grosses dimensions
4. Nettoyage des petits événements avec l'outil fourni
5. Laisser les tiroirs piles ouverts la nuit pour le séchage

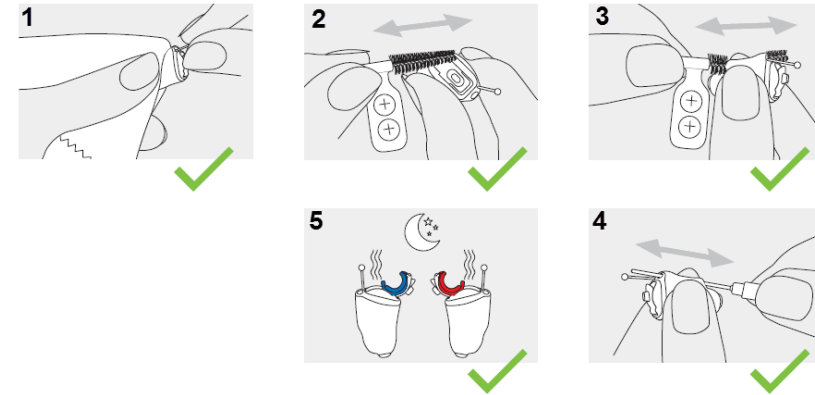

CONTRE-INDIQUÉ

1. Utilisation de solvants ou spray à base d'alcool
2. Utilisation de soufflettes dans le compartiment pile
3. Utilisation de la brosse dans le compartiment pile

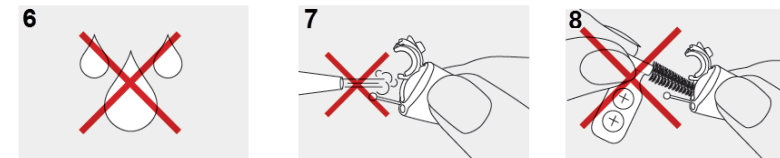

Recommandations d'entretien des intras discrets Phonak (SUITE)

Intras discrets = Virto B-Titanium, B-10 NW O, B-10 O

- Retirer ACA avant utilisation de sprays pour cheveux ou de produits de maquillage.
- Nettoyer quotidiennement et utiliser un système de séchage.
- Ne jamais utiliser de détergents (lessive, savon, etc...)
- IP68 mais non prévu pour activités aquatiques dans l'eau chlorée, savonneuse, salée ou tout autre liquide contenant des produits chimiques.
- Ne pas tremper dans l'eau, protéger contre humidité, retirer avant douche/bain/natation.
- Sécher complètement après emploi.