


Phonak

Écouteur ActiveVent™

Instructions de montage

Éléments nécessaires

1. Écouteur ActiveVent : MAV gauche (bleu) ou droit (rouge)
2. Coque : SlimTip Titanium AV
3. Tube : SlimTip Link AV
4. Filtre anti-cérumen HF3 : gauche (bleu) ou droit (rouge), y compris l'outil de remplacement
5. Outil coupant, p. ex. brucelles coupantes
6. Outil de manipulation de l'écouteur

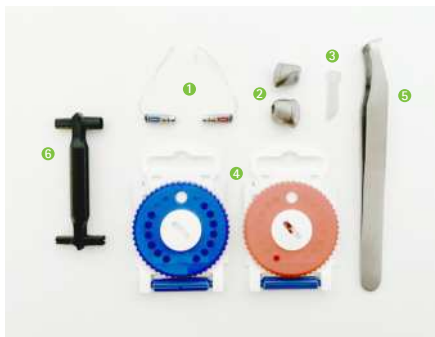

Insertion du SlimTip Link AV

1. Insérez le tube (SlimTip Link AV) dans la coque (SlimTip Titanium AV).



2. Tirez le tube dans la coque et faites-le bouger jusqu'à ce qu'il se place correctement.



3. Coupez le tube au plus près de l'anneau et de manière la plus plate possible.




4. Coque SlimTip Titanium AV complète avec le SlimTip Link AV.




Insertion de l'écouteur ActiveVent (MAV) dans le SlimTip Titanium AV

1. Insérez l'écouteur ActiveVent dans l'outil de manipulation. Utilisez la poignée marquée « MAV ».

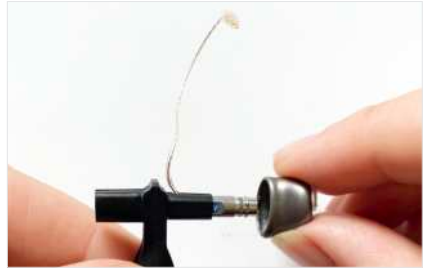

2. Enfoncez l'écouteur dans le tube de la coque jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance.

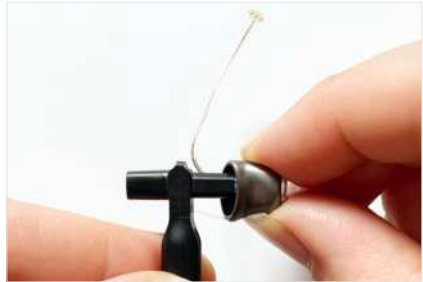

3. L'embout de l'écouteur doit être aligné sur l'anneau du tube.

