

Comment se connecter avec un Roger Inspiro

PHONAK
life is on



Description du produit

1. Curseur Marche/Arrêt
2. Écran couleur
3. Sourdine du microphone
4. Touches de programmation
5. Menu de navigation: Haut/Bas, Retour, OK
6. Entrée audio câble 3.5 mm
7. Prise de recharge (mini-USB)
8. Enrouleur câble microphone
9. Clip pour vêtement
10. Collier portatif
11. Microphone iLapel

Fonctionnement général

- **Pour allumer** le Roger Inspiro, glissez le curseur supérieur vers la gauche jusqu'à ce que la marque verte apparaisse et que l'écran s'allume. Pour l'éteindre, glissez le curseur vers la droite. **Image 1**
- **Pour économiser de l'énergie**, le rétroéclairage de l'écran LCD du Roger Inspiro s'éteint après quelques secondes. Pesez sur n'importe quel bouton pour réactiver le rétroéclairage.
- **Pour vous connecter**, tenez le Roger Inspiro à moins de 10 cm du récepteur Roger.
- Appuyez sur le bouton de connexion situé à droite au bas de l'écran du Roger Inspiro. Le récepteur émettra des bips de confirmation. Le récepteur Roger est maintenant connecté au Roger Inspiro.

Image 1



Connexion aux ordinateurs et tablettes

- Branchez une extrémité du câble 3.5 mm fourni dans la prise de sortie audio de l'appareil multimédia (c'est-à-dire le casque).
- Branchez l'autre extrémité dans la prise jack 3.5 mm (audio) du micro Roger Inspiro. **Image 2**
- Sélectionnez « Headphones » ou « Casques » dans le menu contextuel de l'ordinateur. **Image 3**
- Ajustez le volume en cliquant sur l'icône du haut-parleur dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur. **Image 4**

Image 2

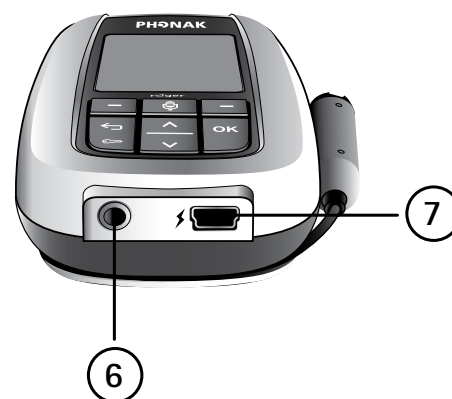


Image 3

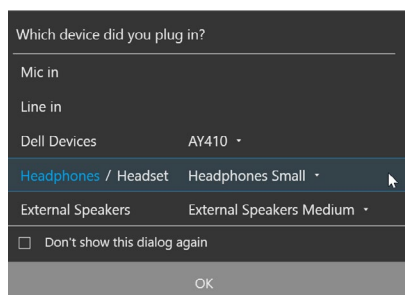


Image 4

