

# Phonak Fast Facts



## Freihändiges Telefonieren mittels Erfassung der Stimme

### Was ist das?

Phonak Audéo™ B-Direct ist das erste MFA-Hörgerät (MFA = Made For All; für alle geeignet) von Phonak, mit dem eine drahtlose Anbindung an jedes Mobiltelefon\* ohne einen am Körper getragenen Streamer möglich ist. Durch das direkte Streaming von Telefonanrufen wird das Audéo B-Direct zu einem Wireless-Kopfhörer. Die Stimme des Hörgeräteträgers wird von den Mikrofonen der Hörgeräte erfasst und per Streaming zum Telefon übertragen. Dank der Erfassung der Stimme können Hörgeräteträger freihändig telefonieren.

### Wozu dient es?

Freihändiges Telefonieren bietet Ihren Kunden folgende Nutzen:

- Der Hörgeräteträger hört das Telefon über die Hörgeräte klingeln und nimmt den Anruf an, ohne das Telefon zu berühren
- Die Stimme des Anrufers wird mittels Streaming direkt vom Mobiltelefon in das Audéo B-Direct übertragen
- Die Stimme des Hörgeräteträgers wird erfasst und zum Mobiltelefon übertragen

Benutzerfreundlich und praktisch für Ihre Kunden. So kann der Hörgeräteträger ein Telefongespräch führen, ohne das Telefon halten zu müssen. Stattdessen hat er die Hände für andere Tätigkeiten frei.



### Wie wird es verwendet?

Nach entsprechender Programmierung in Phonak Target 5.2 oder höher kann Audéo B-Direct mit einem beliebigen Mobiltelefon\* gekoppelt werden. Nach der Kopplung kann durch ein kurzes Drücken eines Tasters eines Hörgeräts bestätigt und der Anruf mittels Streaming direkt in die Hörgeräte übertragen werden. Während des Gesprächs kann mit Hilfe der Streaming-Balance (mittels Taster des Hörgeräts) die Verstärkung des Streaming-Signals gegenüber dem Umgebungsgeräusch angepasst werden. Der Anruf kann entweder herkömmlich über das Telefon beendet werden oder durch ein langes Drücken des Tasters, falls das Telefon nicht zur Hand ist.

\* mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen

Weitere Informationen zu Phonak Audéo™ B-Direct finden Sie unter [www.phonakpro.de/audeo-b-direct](http://www.phonakpro.de/audeo-b-direct)