

# Phonak Fast Facts



## Phonak Audéo B-R

### Was ist das?

Phonak Audéo B-R ist das neue wiederaufladbare RIC-Hörgerät mit integriertem Lithium-Ionen-Akku und vollem Funktionsumfang. Mit Audéo B-R gehören regelmäßige Batteriewechsel der Vergangenheit an. Audéo B-R bietet mit nur einmal Aufladen 24 Stunden\* einzigartigen Hörgenuss. Die neuen Gehäuse sind wasser- und staubresistent (Schutzklasse IP68).

### Wozu dient es?

Der festintegrierte Akku bietet dem Hörgeräteträger zahlreiche verschiedene Vorteile: das mühsame Wechseln und ständige mit sich führen von Ersatzbatterien entfällt; da kein Batteriefach nötig ist, wird eine erhöhte Widerstandsfähigkeit erreicht und es bleibt mehr Zeit beim Beratungsgespräch, weil das Thema Batteriewechsel wegfällt.

Zudem verfügen Lithium-Ionen-Akkus über ein intelligentes Kapazitätsmanagement. Die Kapazität lässt über die Zeit nur sehr gering nach.



### Wie wird es verwendet?

Audéo B-R ist einfach zu handhaben. Nehmen Sie die Hörgeräte einfach aus dem Ladegerät und drücken Sie den Taster 3 Sekunden lang, bis die Statusanzeige kurz grün leuchtet. Die Hörgeräte sind jetzt eingeschaltet und bereit. Legen Sie die Hörgeräte am Ende des Tages in das Ladegerät. Sie rasten in den Ladesteckplätzen ein und schalten sich automatisch aus. Die grüne Statusanzeige blinkt langsam und zeigt dadurch an, dass das Hörgerät aufgeladen wird. Sobald die Statusanzeige konstant leuchtet statt blinkt, sind die Hörgeräte voll aufgeladen. Ein leeres Hörgerät ist in 3 Stunden aufgeladen.

\*Erwartete Betriebszeit wenn voll aufgeladen, inklusive 80 Minuten Wireless-Streaming. Mehr dazu auf [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence).

Weitere Informationen zu den wiederaufladbaren Phonak Audéo B-R Hörgeräten und ihren Ladeoptionen finden Sie unter: [www.phonakpro.com/audéo-b](http://www.phonakpro.com/audéo-b)