

Phonak Fast Facts



Phonak Mini Charger

Was ist das?

Der Mini Charger ist die kleine und kompakte Ladeoption für die wiederaufladbaren Hörgeräte von Phonak. Der Mini Charger ist die platzsparende und kleine Alternative zum Phonak Charger Case und eignet sich ideal für unterwegs oder als Ersatz-Ladegerät.

Wozu dient es?

Für Kunden, die sich ein kleines, kompaktes und handlicheres Ladegerät für unterwegs wünschen, ist der Mini Charger die ideale Lösung.

Wie wird es verwendet?

Um die Hörgeräte aufzuladen, müssen diese einfach in die Ladesteckplätze des Mini Charger eingesteckt werden. Die Hörgeräte schalten sich automatisch aus. Die grüne Statusanzeige blinkt langsam und zeigt dadurch an, dass die Hörgeräte aufgeladen werden. Sobald die Statusanzeige konstant leuchtet statt blinkt, sind die Hörgeräte voll aufgeladen. Ein leerer Hörgeräteakku ist in 3 Stunden voll aufgeladen.

Weitere Informationen zu den wiederaufladbaren Hörgeräten und den Ladeoptionen, finden Sie unter: www.phonakpro.com/audeb

