


# Phonak Fast Facts



## „Receiver Check“ beim Phonak Audeo™ B

### Was ist das?

„Receiver Check“ ist eine Funktion in Phonak Target 5.0, mit der überprüft werden kann, ob der angeschlossene Ex-Hörer dem in der Anpasssoftware ausgewählten Hörer entspricht. Falsch zugeordnete akustische Parameter können während der Anpassung eines Hörgeräts leicht übersehen werden und zu Mess- und Klangqualitätsproblemen führen.

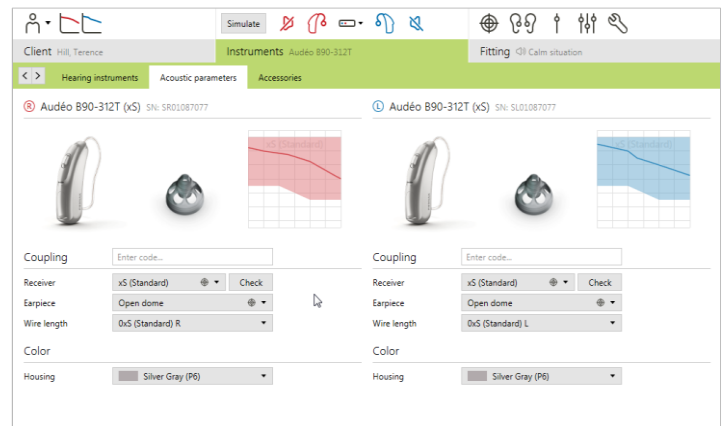

### Wozu dient es?

Mit der Funktion „Receiver Check“ kann sicher gestellt werden, dass der richtige Ex-Hörer angeschlossen ist.

Vorteile:

- Stellt sicher, dass keine falschen akustischen Parameter verwendet werden, sodass der Kunde die bestmögliche Klangqualität erhält.
- Spart Zeit, da weniger Fehler während der Anpassung behoben werden müssen.

### Wie verwendet man es?

Immer wenn Sie ein Audeo B mit der Phonak Target verbinden, überprüft diese, ob der angeschlossene Ex-Hörer dem in der Software Ausgewählten entspricht. Diese Überprüfung kann auch durch Klicken auf [Überprüfen] im Reiter „Akustische Parameter“ durchgeführt werden. Falls eine Diskrepanz besteht, wird Phonak Target Sie zur Überprüfung

des Ex-Hörers auffordern. Sie können dann entweder einen anderen Receiver anschließen oder die Auswahl in Phonak Target ändern.

Detaillierte Informationen zu der Funktion „Receiver Check“, zu Audeo B und Target 5.0 finden Sie unter: [www.phonakpro.de](http://www.phonakpro.de)