


# Phonak

## Fast Fact

### Liebe auf den ersten Klang: Für nicht-drahtlose Virto-Modelle gibt es jetzt die Marvel Vorberechnung

#### Was ist das?

Die Marvel Vorberechnung ist eine spezielle Verstärkungseinstellung für Erstanwender von Hörgeräten. Sie verringert die Verstärkung durch das Hörgerät oberhalb von 3 kHz. Dadurch, dass die Verstärkungsleistung leicht reduziert ist, kann sich der Anwender schneller daran gewöhnen, und erhält dennoch außergewöhnliche Klangqualität ab dem ersten Moment – und damit „Liebe auf den ersten Klang“. Da viele Erstanwender sich ein maßgefertigtes Hörgerät wünschen, ist die Marvel Vorberechnung besonders für Träger der Modelle Virto M-312 NW O, Virto M-10 NW O und Virto M-Titanium geeignet.

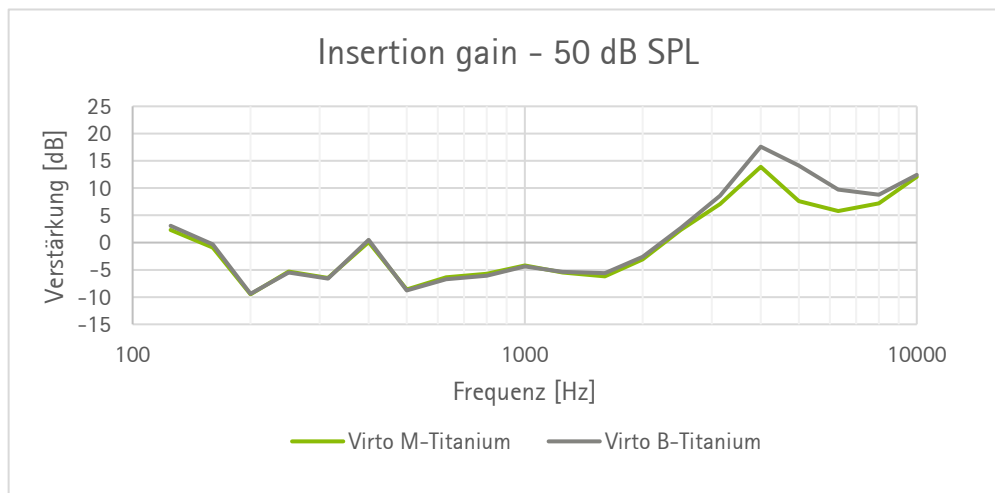

#### Wozu dient es?

Die Marvel Vorberechnung für die Erstanpassung verbessert die Spontanakzeptanz von Hörgeräten und ermöglicht zugleich uneingeschränktes Hören in komplexen Hörumgebungen.<sup>1</sup>

Real Ear Aided Gain-Messungen zeigen den Ausgangsschalldruck des Virto M-Titanium mit Marvel Vorberechnung im Vergleich zum Ausgangsschalldruck des Virto B-Titanium. Beide sind auf 80% der Zielverstärkung eingestellt.

#### Wie wende ich es an?

Um die Vorberechnung für die Erstanpassung beim Virto Marvel zu aktivieren, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Hörgeräte erstmals mit Phonak Target verbinden, wählen Sie unter **[Optimiert für]** die Option **[Erstanwender]** als bisherige Trage-Erfahrung aus.
- Öffnen Sie im Menüpunkt **[Basisanpassung]** das Dropdown-Menü **[Verstärkungsstufe]** und wählen Sie die Option **[80% Zielverstärkung]** aus.

Für weitere Information besuchen Sie unsere Website [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com) oder wenden Sie sich an Ihren Phonak Ansprechpartner.

<sup>1</sup>Rakita, L., Stewart, E., & Drexler, J. (2018). Best first fit experience from Phonak: Phonak Marvel. *Phonak Field Study News*.  
Quelle: [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence). Zugriff am 19. Februar 2020.