

Ein Roger™ Netzwerk im Klassenzimmer einrichten


Reference Sheet

roger



Alle Roger-Systeme für die Schule können einfach miteinander verbunden werden. Dazu müssen sie nur an ein Netzwerk angeschlossen werden – was je nach Gerät auf mehrere Arten möglich sein kann. Sie haben die Wahl.

Roger-Systeme über Connect hinzufügen

Halten Sie das Roger-Mikrofon in die Nähe des Roger-Systems, an das Sie es anschließen möchten (max. 10 cm Abstand), und wählen Sie **Connect** oder tippen Sie auf das **Connect**-Symbol .

- Roger X
- Roger MyLink
- Roger Focus
- Designintegrierte Roger-Empfänger
- Roger-Mikrofone
 - Roger Touchscreen Mic
 - Roger Pass-around
- Roger Multimedia Hub
- Roger DigiMaster 5000*, 7000* Lautsprecher
- Roger DigiMaster X

* Wenn Sie einen Roger DigiMaster Lautsprecher anschließen möchten, positionieren Sie das Roger-Mikrofon in der Nähe des oberen Teils des Roger DigiMaster.

Roger Geräte über Roger WallPilot hinzufügen



Roger-Empfänger: Die Schüler müssen einfach zum Roger WallPilot gehen (Ohren und Empfänger im Abstand von max. 30 cm zum WallPilot) und einige Sekunden warten.

Roger-Mikrofone und Multimedia-Sender: Die folgenden Roger-Mikrofone und Multimedia-Sender können durch einfaches Aus- und erneutes Einschalten verbunden werden, wenn sie in die Nähe des Roger WallPilot gehalten werden (max. 10 cm Abstand):

- Roger Touchscreen Mic
- Roger Pass-around
- Roger Multimedia Hub