

# Verwendung des Roger™ DigiMaster X

Reference Sheet

roger



Für Klassenzimmer, in denen ein anderes Soundfield-System benutzt wird, gibt es den DigiMaster X. Dieser überträgt das hochwertige Roger Sprachsignal an die bestehende Beschallungsanlage. Einfach anschließen, einschalten und unterrichten.








## Erste Inbetriebnahme

- Schließen Sie den Roger DigiMaster X an eine Stromquelle an.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Audiokabel und den Adapter, um den Roger DigiMaster X mit der Beschallungsanlage zu verbinden.
- Halten Sie das Roger Touchscreen Mic in die Nähe des Roger DigiMaster X (max. 10 cm Abstand) und tippen oder drücken Sie auf **Connect**.

## Tägliche Nutzung

- Drücken Sie 2 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste des Roger DigiMaster X, um ihn einzuschalten. Schalten Sie das Roger-Mikrofon ein. Sprechen Sie in das Roger-Mikrofon.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden, um den Roger DigiMaster X auszuschalten.

## Roger DigiMaster X Statusanzeige

-  Konstant rot – Roger DigiMaster X ist ausgeschaltet
-  Konstant blau – Standardbetrieb
-  Blinkt blau – Roger-Mikrofon ist ausgeschaltet oder außer Reichweite
-  Konstant grün – Roger-Mikrofon ist stumm geschaltet
-  Grün zu rot – Lautstärke wird angepasst +/-
-  Blinkt gelb – Software-Update
-  Blinkt rot – wenden Sie sich an den technischen Support für Roger

