

Verwendung von Roger™ Touchscreen Mic in einer kleinen Gruppe

Reference Sheet

roger



Der neue Small Group Modus verwendet ein System aus drei integrierten intelligenten Mikrofonen, die adaptiv arbeiten. Sobald das Roger Touchscreen Mic auf einen Tisch gelegt wird, an dem 2–5 Schüler sitzen, richten sich die Mikrofone automatisch auf den jeweiligen Sprecher in der Gruppe aus.

Small Group Modus

- Trennen Sie das Roger Touchscreen Mic von der Umhängekordel.
- Legen Sie das Roger Touchscreen Mic flach auf die Mitte des Tisches, an dem die Personen sitzen.*
- Das Mikrofon überträgt automatisch die Stimmen der sich in der Nähe befindenden Personen.
- Wenn eine Gruppenaktivität in einer kleinen Gruppe beendet ist, bringen Sie das Roger Touchscreen Mic wieder an der Umhängekordel an.

* Wenn Roger Touchscreen Mic als Hauptmikrofon im Small Group Modus verwendet wird, überträgt es keinen Ton an den DigiMaster Lautsprecher und kann auch nicht in einem MultiTalker Netzwerk verwendet werden.

