

Telefonanrufe mit Roger leicht gemacht

Benutzerleitfaden



roger

Telefonanrufe sind oft immer noch eine Herausforderung für Personen mit einem starken bis hochgradigen Hörverlust. Roger-Produkte von Phonak bieten einen einfachen Weg, die Anruferstimme direkt an die Hörgeräte zu senden. Mit Roger können Sie sich mit verschiedenen Telefonen verbinden und für fast jedes Hörgerät oder Cochlea-Implantat gibt es einen Roger-Empfänger.



Phonak Vierklang
Beratung

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Alle Optionen im Überblick



Alle Optionen im Überblick

Roger Pen

Roger EasyPen

Roger Clip-On Mic

Roger Table Mic

Zusatzgeräte



Tragbare Geräte (drahtlos über Bluetooth)




PC/Laptop für Telefongespräche über das Internet
(drahtlos über Bluetooth)




PC/Laptop für Telefongespräche über das Internet
(mit Kabel)



Optional: externes
Kopfhörer-Mikrofon

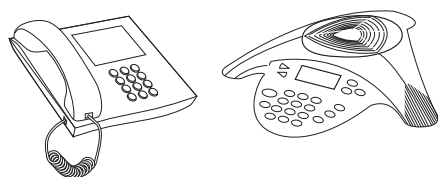


Kabelgebundene Festnetztelefone

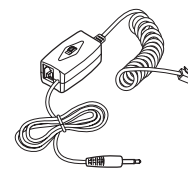

Telefon-Aufnahmeadapter



Callcenter

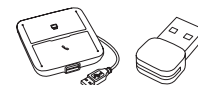

Telefonadapter und Bluetooth
USB-Adapter

Weitere Telefonoptionen von Phonak finden Sie hier: www.phonak.de/telefonieren


Tragbare Geräte drahtlos über Bluetooth



Roger Pen

Bluetooth benutzen

Koppeln Sie den Roger Pen mit Ihrem aktivierten Bluetooth-Gerät. Um zu telefonieren, müssen Sie das Telefon nicht an das Ohr halten. Das Beste daran ist, Sie hören den Anruf auf beiden Ohren!

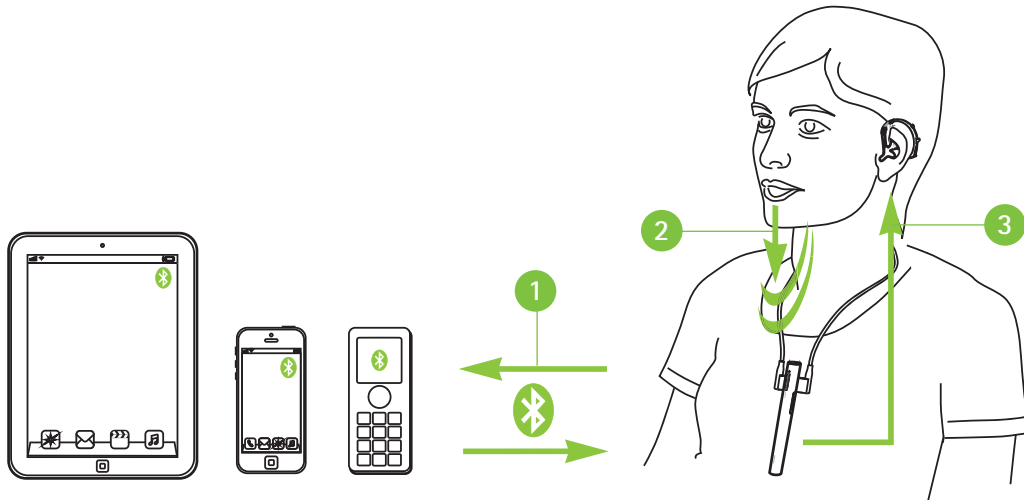


- 1 Koppeln Sie das tragbare Gerät mit dem Roger Pen.
- 2 Sprechen Sie während des Gespräches einfach in den Roger Pen.
- 3 Sie hören die Stimme der anrufenden Person über Roger auf beiden Ohren!

PC /Laptop für Telefongespräche über das Internet (VoIP, z.B. Skype) drahtlos über Bluetooth




Roger Pen

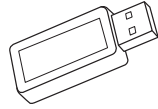

Optional: Bluetooth USB-Adapter (z.B. Sennheiser BTD 500 USB)

Bluetooth benutzen

Das integrierte Bluetooth-Modul oder der verbundene Bluetooth USB-Adapter machen aus dem Roger Pen eine Freisprech-VoIP-Lösung. Wenn Sie den Roger Pen um den Hals tragen, können Sie Telefonanrufe über das Internet jederzeit tätigen und haben die Hände für Notizen frei.

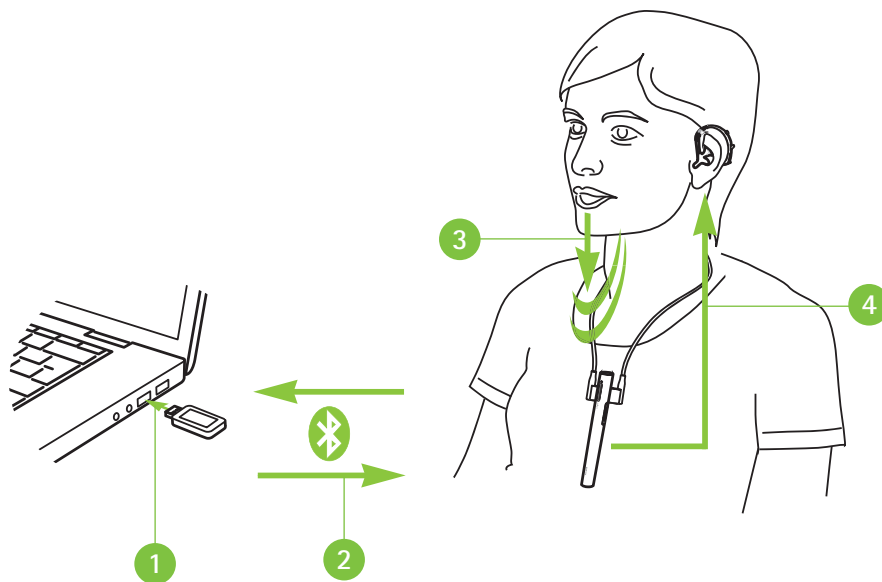

- 1 Stecken Sie den Bluetooth USB-Adapter in eine freie USB-Buchse oder verwenden Sie das integrierte Bluetooth-Modul an Ihrem PC/Laptop.
- 2 Koppeln Sie den Bluetooth USB-Adapter oder das integrierte Bluetooth-Modul mit dem Roger Pen.
- 3 Sprechen Sie während des Gespräches einfach in den Roger Pen.
- 4 Sie hören die Stimme der anrufenden Person über Roger auf beiden Ohren!

PC/Laptop für Telefongespräche über das Internet (VoIP, z.B. Skype) mit Kabel



Roger Pen



Roger EasyPen



Roger Clip-On Mic




Roger Table Mic



Optional: externes
Kopfhörer-Mikrofon

Die integrierten Mikrofone vom PC/Laptop

Diese einfache Option sendet die Stimme der sprechenden Person direkt an beide Ohren.

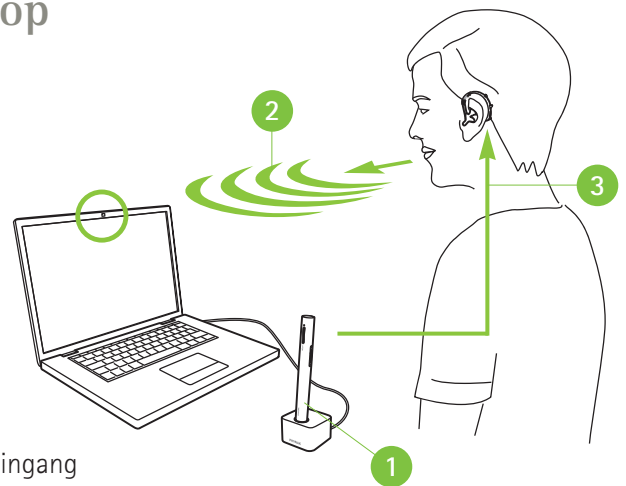


- 1 Verbinden Sie den Kopfhörerausgang Ihres PC/Laptop mit dem Audioeingang der Dockingstation bzw. des Roger Table Mic.
- 2 Sprechen Sie während des Gespräches in das integrierte PC-/Laptop-Mikrofon.
- 3 Sie hören die Stimme der anrufenden Person über Roger auf beiden Ohren!

Externe Kopfhörer-Mikrofone benutzen

Ein Kopfhörer-Mikrofon zu benutzen, ermöglicht eine bessere Klangqualität Ihrer eigenen Stimme.

Hinweis: Sie müssen eventuell die Audioeinstellung Ihrer PC- oder VoIP-Software anpassen, um die 3,5 mm Buchse als Audioausgang und das USB-Mikrofon nur als Mikrofoneingang zu definieren.

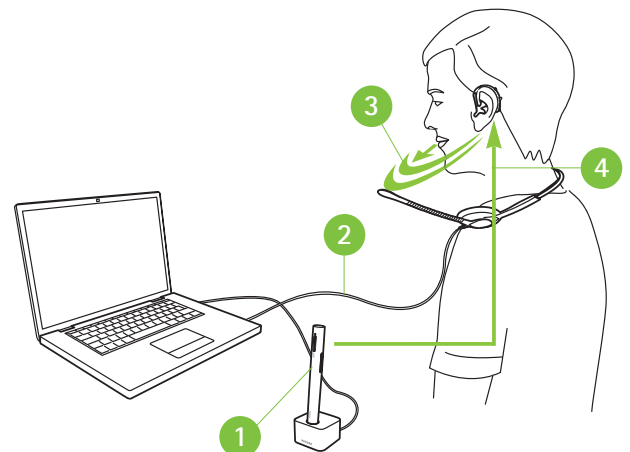

- 1 Verbinden Sie den Kopfhörerausgang Ihres PC/Laptop mit dem Audioeingang der Dockingstation bzw. des Roger Table Mic.
- 2 Verbinden Sie das Kopfhörermikrofon mit dem Mikrofoneingang Ihres PC/Laptop.
Alternativ können Sie ein USB-Headset auch mit dem USB-Port verbinden.
- 3 Sprechen Sie während des Gespräches in das externe Mikrofon.
- 4 Sie hören die Stimme der anrufenden Person über Roger auf beiden Ohren!

Kabelgebundene Festnetztelefone



Roger Pen




Roger EasyPen



Roger Clip-On Mic




Roger Table Mic

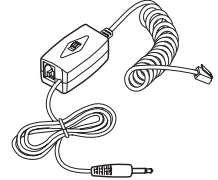

Benötigt: Telefon-Aufnahmeadapter (z.B. VEC TRX-20)

Ein Telefon-Aufnahmeadapter benutzen

Um den Anruf entgegen zu nehmen, heben Sie den Hörer ab und halten diesen an den Mund, da Sie in den Hörer sprechen müssen. Die Stimme derprechenden Person wird auf beide Ohren übertragen.


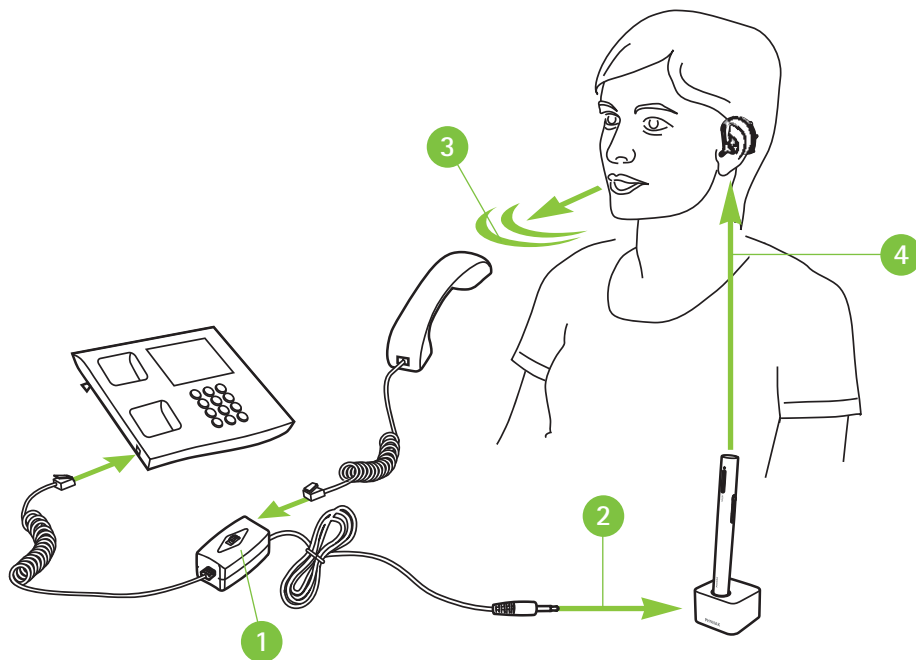


- 1 Bringen Sie den Telefon-Aufnahmeadapter zwischen dem Telefon und dem Hörer an.
- 2 Verbinden Sie den Audioausgang des Telefon-Aufnahmeadapters mit dem Audioeingang der Dockingstation bzw. des Roger Table Mic.
- 3 Sprechen Sie während des Gespräches in den Telefonhörer.
- 4 Sie hören die Stimme der anrufenden Person über Roger auf beiden Ohren!

Callcenter (PC / Laptop und Festnetz) drahtlos über Bluetooth




Roger Pen

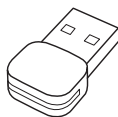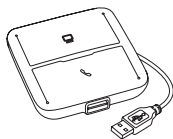

Benötigt: Telefonadapter (z.B. Plantronics MDA200),
Bluetooth USB-Adapter (z.B. Plantronics BT300 HAC)

Bluetooth benutzen

Dies ist die fortschrittlichste Lösung für vielbeschäftigte Callcenter-Mitarbeiter. Die Telefongespräche können wahlweise über PC oder Festnetztelefon geführt werden. In beiden Fällen wird das Telefon mit dem Roger Pen verbunden, der idealerweise um den Hals getragen wird, so haben Sie während der Gespräche beide Hände frei.

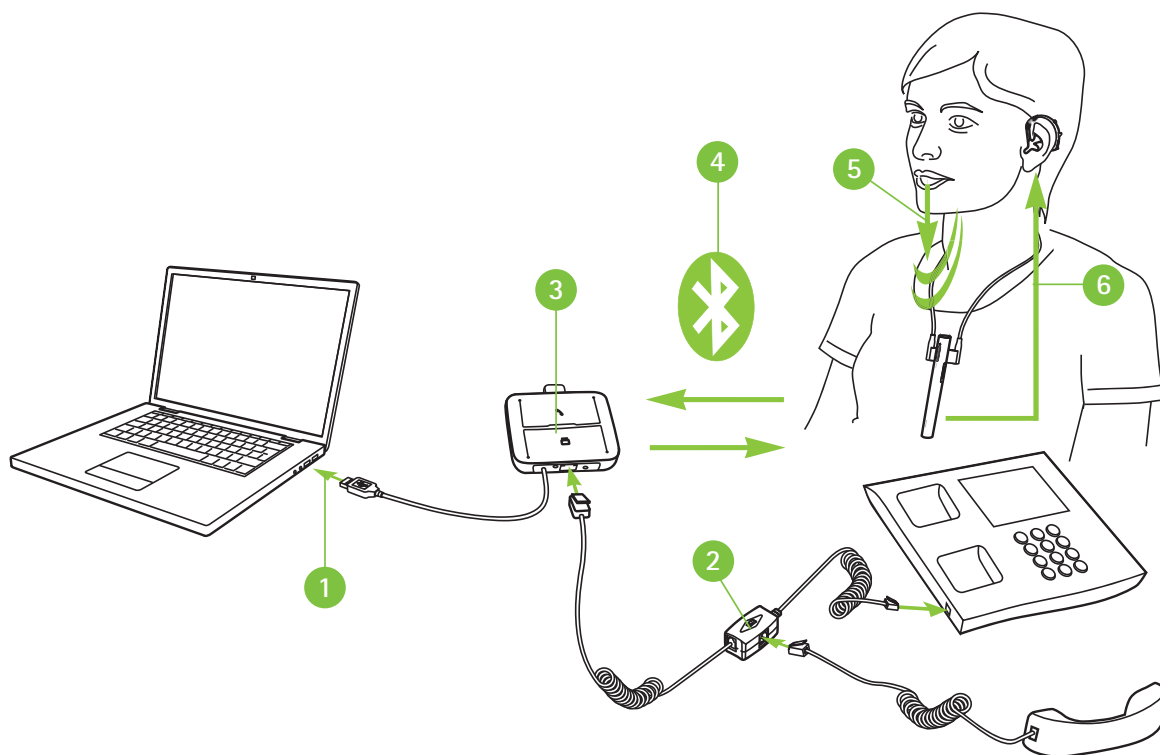

- 1 Verbinden Sie den Telefonadapter mit Ihrem PC/Laptop.*
- 2 Bringen Sie den Telefon-Aufnahmeadapter zwischen dem Telefon und dem Hörer an.
- 3 Verbinden Sie den Telefonadapter mit dem Bluetooth USB-Adapter, dem Telefon-Aufnahmeadapter und dem Netzteil.
- 4 Koppeln Sie den Bluetooth USB-Adapter mit dem Roger Pen.
- 5 Sprechen Sie während des Gespräches in den Roger Pen.
- 6 Sie hören die Stimme der anrufenden Person über Roger auf beiden Ohren!

* Möchten Sie nur ein Telefon anbinden, brauchen Sie das USB Kabel (1) nicht an den PC anzuschließen.

Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonakpro.de



Erleben Sie Phonak auf facebook
www.facebook.com/phonakde