




Technische Daten

Phonak EasyCall

Phonak EasyCall verbindet wirelessfähige Phonak Hörgeräte mit einem Mobiltelefon. Er wird einfach am Telefon angebracht und überträgt jeden Anruf drahtlos und direkt an beide Hörgeräte – für eine einzigartige Klangqualität und optimale Kommunikation am Telefon.

Beschreibung

- 1 Anruftaste mit Statusanzeige
- 2 Ladebuchse (micro-USB)
- 3 Mikrofonöffnung
- 4 Gummiring
- 5 Klebeband (optional)

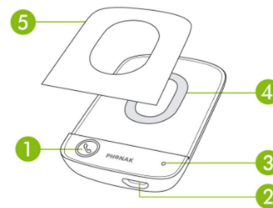

Funktionen

- Auspacken und verwenden – keine Anpassung erforderlich
- Für alle bluetoothfähigen Mobiltelefone (auch Nicht-Smartphones)
- Einfach am Mobiltelefon anbringen und immer dabei haben
- Bis zu 8 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 10 Tage im Standby-Modus

Kompatibilität

- Phonak EasyCall ist mit wirelessfähigen Spice, Spice+ und Quest Hörgeräten kompatibel
- Phonak EasyCall II ist mit wirelessfähigen Venture Hörgeräten kompatibel

Allgemein

Maße (LxBxH):	69 x 45 x 12 mm
Gewicht:	24 g
Farbe:	Schwarz
Betriebsbedingungen:	Dieses Produkt ist so ausgelegt, dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ohne Probleme und Einschränkungen funktioniert, sofern nichts anderes in der Gebrauchsanweisung vermerkt ist. 0° bis 40° Celsius (32° bis +104° Fahrenheit) und relative Feuchtigkeit <85% (nicht-kondensierend).
Transport- und Lagerbedingungen:	-20° bis 60° Celsius (-4° bis +140° Fahrenheit) und eine relative Luftfeuchtigkeit von <70% über einen längeren Zeitraum. Transport: <90% (nicht-kondensierend)

Statusanzeige

Einschalten:	2 Sekunden grün
Ausschalten:	2 Sekunden rot
Bluetooth Kopplungsmodus:	Blinkt schnell blau
Laufendes Telefongespräch:	Konstant blau
Bluetooth verbunden:	Blinkt 1 Minute lang alle 5 Sekunden blau
Eingeschaltet und bereit zum verbinden:	Blinkt 1 Stunde lang alle 5 Sekunden grün
Niedriger Akku-Stand:	13x kurzes rotes Blinken jede Minute 13x kurzes rotes Blinken nach Tastendruck bei nicht laufendem Anruf (ca. 45 Minuten Sprechzeit nach der ersten Anzeige „Niedriger Akku-Stand“ übrig)
Akku wird geladen:	Konstant rot
Voll geladen, während das Ladegerät angeschlossen ist:	Konstant grün nach kompletter Ladung Anmerkung: Der Ladestand kann während eines Telefonats nicht angezeigt werden



Strom- und Akkudaten

Batterie:	Lithium-Polymer, 3,7 V Eingebaut, nicht entfernbar Kapazität: 320 mAh (typ.)
Betriebszeit:	Bis zu 8 Stunden Gesprächszeit Bis zu 10 Tage Standby-Modus
Hinweise zum Ladevorgang:	Eingangsspannung: Stabilisiert 5 V Gleichspannung +/- 5% Micro-USB-Anschluss Eingangsstrom: max. 300 mA Ladezeit von leerem Akku: 2 h 45 min
Wichtiger Hinweis:	Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Ladegeräte von Phonak oder stabilisierte Ladegeräte mit 5 V Gleichspannung, min. 300 mA. Der Akku kann nicht überladen werden. Er kann während des Ladevorgangs warm werden.
Anmerkung:	Betriebs- und Ladezeiten können von der Temperatur und dem Alter des Geräts abhängen.

Audiodaten

Audioeingang:	Sprache, omnidirektionales Mikrofon
Verbindung mit Telefon:	Bluetooth (nur Sprache, keine Musik). Breitband-Sprachübertragung möglich (HD Voice), sofern vom Telefon unterstützt.

Bluetooth

Bluetooth® Profile:	Headset Profil (HSP) Hands Free Profil (HFP)
Frequenzbereich:	2402,0 bis 2480,0 MHz
HF Leistung:	1 mW max.
Übertragungsbereich zum Mobiltelefon:	Bis zu 1 m
Bluetooth-Kompatibilität:	Bluetooth Version 3.0, Class 3
Max. Anzahl gekoppelter Geräte:	8

Funkdaten

Antennentyp:	Ferrit-Antenne
Typ:	Induktiv ("HiBAN")
Betriebsfrequenz:	10,6 MHz
Modulation:	8-DPSK
Belegte Bandbreite:	474,2 kHz
Feldstärke:	37,59dBµV/M@3m
Reichweite zu Hörgeräten:	Bis zu 25 cm

Angewandte Standards

Europa:	EN 300 328 EN 300 330 EN 301 489 EN 60950-1 EN 62479
Kanada:	RSS-210 Issue 8 RSS-102 Issue 4 RSS-GEN Issue 3
Japan:	ARIB-T66 (Bluetooth) EWPE (HiBAN)
USA:	FCC 47 CFR Part 15.209 (HiBAN) FCC 47 CFR part 15.247 (Bluetooth) FCC OET Bulletin No.65



Der Name Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Phonak erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

Informationen zur Bluetooth-Kopplung

Drücken Sie die Anruf-Taste und halten Sie sie gedrückt (2 Sekunden), um den EasyCall ein- oder auszuschalten.



Ein EasyCall, der noch nie gekoppelt wurde, befindet sich nach dem Einschalten automatisch 60 Minuten lang im Kopplungsmodus. Das wird durch eine schnell blinkende blaue Statusanzeige angezeigt.

Um den Kopplungsprozess manuell zu starten, drücken Sie die Anruf-Taste und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige anfängt, schnell blau zu blinken. Wählen Sie „Phonak EasyCall“ aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte in Ihrem Telefon und geben Sie „0000“ (vier Nullen) ein, wenn ein Code verlangt wird.