

# Phonak Fast Facts



## TV Connector

### Was ist das?

Der TV Connector ist ein Streamer, der Phonak Audéo™ B-Direct Hörgeräte durch einfaches ‚Plug and Play‘ mit einem Fernseher oder einem Mediaplayer verbindet, ohne einen Streamer am Körper tragen zu müssen. Mit der AirStream™-Technologie, dem neuen firmeneigenen Phonak 2,4-GHz-Streaming-Protokoll, ermöglicht der TV Connector eine direkte Audio-Streaming-Verbindung mit hervorragender Stereo-Klangqualität zwischen einem Fernseh- oder einem Audiogerät und dem Audéo B-Direct.

### Wozu dient es?

#### Vorteile für Ihre Kunden

- Es ist kein am Körper getragener Streamer erforderlich
- Verwandelt Audéo B-Direct Hörgeräte in Wireless-Stereo-Headset
- Einfaches Plug-and-Play
- Überträgt Sprache und Musik in hoher Qualität, unabhängig von der Quelle.
- Mittels Streaming-Balance kann die Verstärkung des Streaming-Signals oder der Umgebungsgeräusche angepasst werden
- Bietet die einzigartige Möglichkeit, mehrere Zuhörer gleichzeitig mit dem gleichen Audiosignal zu verbinden.
- Bis zu 80 Stunden Fernseh-Hörgenuss mit einer Hörgerätebatterie

### Wie wird es verwendet?

Der TV Connector wird direkt mittels Plug-and-Play mit einem beliebigen Fernsehgerät mit optischem oder 3,5-mm-Anschluss verbunden. Die Hörgeräte werden automatisch mit dem TV Connector gekoppelt. Falls die Kopplung nicht automatisch erfolgt, werden Hörgeräte in einem Umkreis von 1 m durch Drücken der Kopplungstaste des TV Connector erkannt und verbunden. Um mehrere Zuhörer zu verbinden, drücken Sie die Kopplungstaste des TV Connector, sodass Hörgeräteträger in einem Umkreis von 1 m automatisch mit dem TV Connector gekoppelt werden. Wird der Fernseher eingeschaltet und befindet sich der Hörgeräteträger im Bereich (15 m) des TV Connector, beginnt das Streaming automatisch.



Weitere Informationen zum TV Connector finden Sie unter [www.phonakpro.com/tvconnector](http://www.phonakpro.com/tvconnector)