


# WallPilot™


GB Switching the WallPilot on/off  
D Ein-/Ausschalten

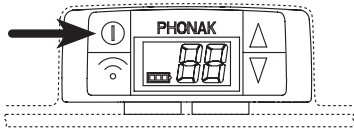

GB To switch on:  
Press the button ① for 2 seconds  
To switch off:  
Press the button ① for 2 seconds

D Einschalten:  
Taste ① 2 Sekunden drücken.  
Ausschalten:  
Taste ① 2 Sekunden drücken.


GB Range  
D Reichweite

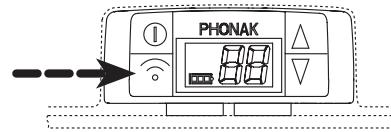

GB The range can be adjusted in three different grades by lightly pressing the button ②. -> F1 -> F2 -> F3. The shortest range is on F1, the longest on F3.

D Mit leichtem Druck auf die Taste ② kann die Reichweite des WallPilotes auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden. -> F1 -> F2 -> F3. Die kürzeste Reichweite erhalten Sie bei F1, die längste bei F3.

GB Keylock  
D Tastensperre

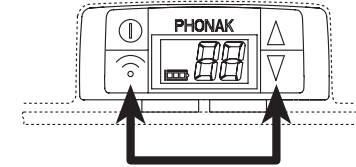


GB As with mobile phones WallPilot is equipped with a Keylock function to prevent accidental activation of the keys.

- To lock keys: Simultaneously press the two keys indicated by the arrows for 2 seconds. The 🔒 symbol appears in the display.
- To unlock keys: Simultaneously press the same two keys for 2 seconds.

D Wie bei einem Mobiltelefon kann mit einer Tastensperre einem unbeabsichtigten Betätigen der Tasten vorgebeugt werden.

- Tasten sperren: Beide Tasten (siehe Pfeile) gleichzeitig für 2 Sekunden drücken. Das Zeichen 🔒 erscheint im LCD Display.
- Tastensperre aufheben: Die selben Tasten gleichzeitig 2 Sekunden drücken.


GB Programming of the WallPilot  
D Programmierung des WallPilot

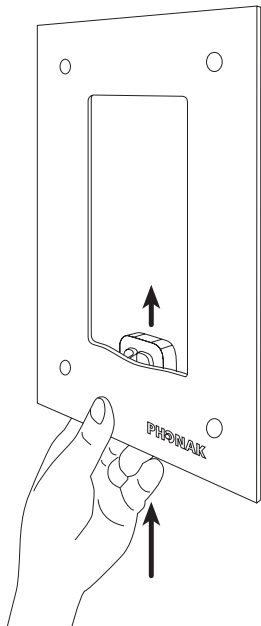

①

GB Unplug the power cord and carefully push the WallPilot module upwards, out of the frame.


D Das Netzkabel entfernen, danach das WallPilot Modul vorsichtig mit der Hand von unten nach oben schieben.

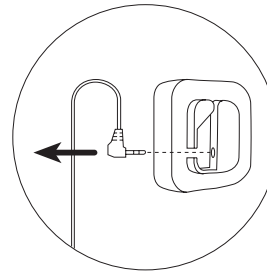

②

GB Unplug the aerial cable in the WallPilot module.

D Das Antennenkabel entfernen am WallPilot Modul entfernen.

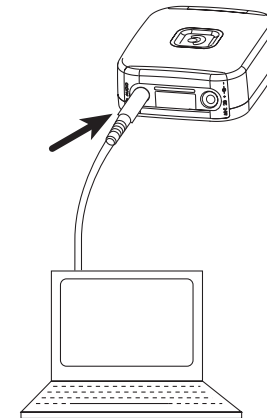

③

GB Plug in the programming cable and program the chosen channel set using the Phonak FM programming software.

D Nun das Programmierkabel einstecken und mit der FM Programming Software die gewünschten Kanäle programmieren.