


Phonak Target™ 1.0

Anpassanleitung

Vorbereitung der Hörgeräte für die Anpassung

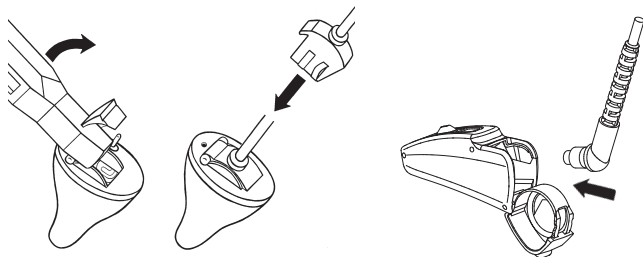


iCube

Setzen Sie die Batterie ein. Das Hörgerät wird durch das Schließen des Batteriefaches eingeschaltet.

NOAHlink oder HI-PRO

Verbinden Sie die Hörgeräte und die Programmierschnittstelle mit den Programmierkabeln.

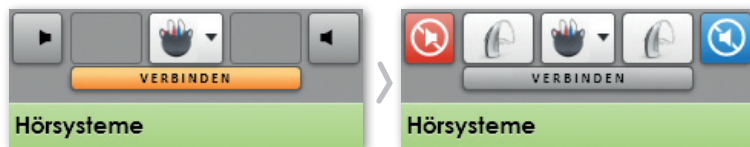


1.

Wählen Sie iCube, NOAHlink oder HI-PRO aus dem Menü aus. Klicken Sie **[VERBINDEN]**, um mit der Anpassung zu beginnen. Die verbundenen Hörgeräte werden angezeigt.

2.

1. Klicken Sie auf den Reiter **[Anpassung]**.


2. Im Bildschirm **[Rückkopplungs- und InSitu-Test]** klicken Sie **[Test starten]**, um den Test durchzuführen. Wählen Sie **[Geschätzte RECD und Bohrung benutzen]**, um die Testergebnisse für die Berechnung der akustischen Parameter zu nutzen.

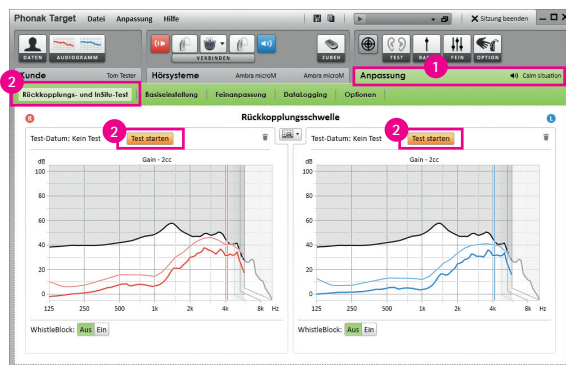

3.

1. Gehen Sie in die **[Basiseinstellung]**, um die **[Verstärkungsstufe]**, die **[Okklusions-Kompensation]** und den **[BassBoost]** anzupassen.


2. Klicken Sie **[Sitzung beenden]**, um die Einstellungen in die Hörgeräte und in die Datenbank zu speichern.

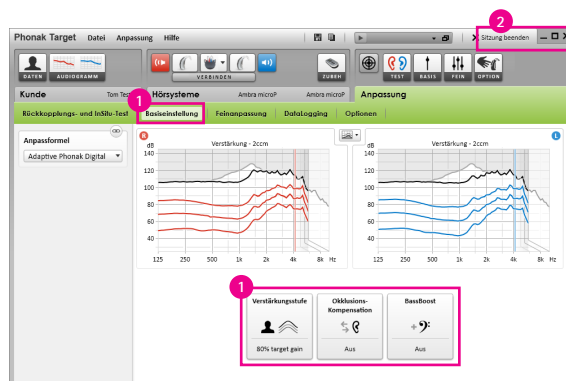

Phonak Target™ 1.0

Tipps und Tricks

Zubehör anpassen

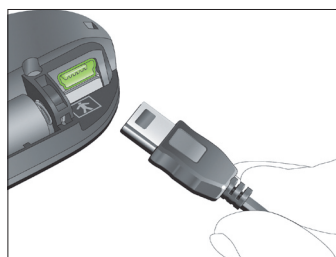

Phonak Target™ erkennt verbundenes Zubehör automatisch, wenn es während der Anpasssitzung angeschlossen wird. Das erkannte Zubehör wird neben den verbundenen Hörgeräten angezeigt.

Zubehör kann im Reiter **[Hörsysteme] > [Zubehör]** auch manuell ausgewählt werden.

Stellen Sie sicher, dass das Zubehör mit einem USB-Kabel an Ihrem Anpass-Computer angeschlossen ist.

Während des Abspeicherns wird das Zubehör im Informationsdialog angezeigt.

Anzeigen des Sprachspektrums für die Beratung



Klicken Sie auf den Reiter **[Kunde] > [Audiogramm]**.

Wählen Sie im Bereich Audiogramm **[Sprachspektrum anzeigen]**, um die Hörminderung im Sprachspektrum darzustellen.