


Phonak Target™ 1.0

Tilpasningsveiledning

Gjør klar høreapparatene til tilpasning

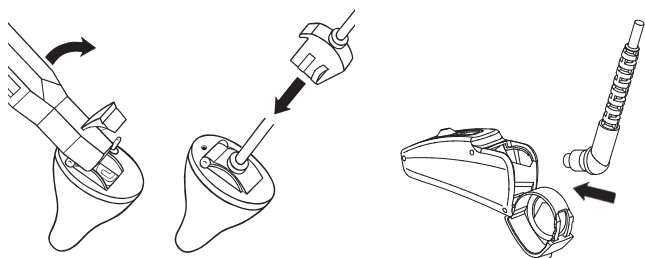

iCube

Sett inn batteriet og slå på høreapparatene ved å lukke batteriluken.

NOAHlink eller HI-PRO

Koble programkablene til tilpasningsenheten.




1.

Bekreft tilpasningsenheten. Du kan endre denne i menyen. Klikk **[TILKOBLE]** for å starte tilpasningen. Tilkoblede høreapparater vil vises.

2.

1. Trykk **[Tilpasning]**.


2. I skjermbildet **[Feedback test]** trykk **[Start test]** for å starte testen. For å benytte testresultatet til å kalkulere tilpasningsparameterne velger du **[Bruk estimert RECD og vent]**.

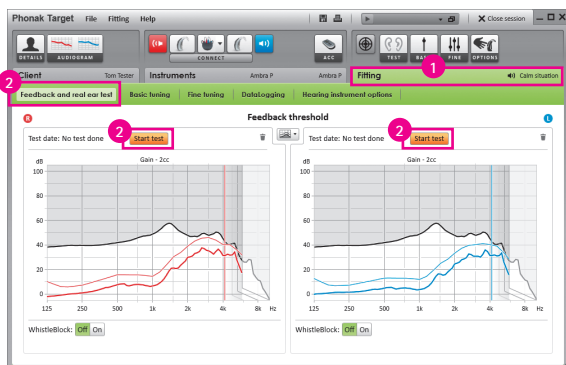

3.

1. Gå til **[Fininnstilling]** hvis justeringer i **[Erfaringsnivå]**, **[Okklusjon]** eller **[BassBoost]** er nødvendig.

2. Trykk **[Lukk]** for å lagre innstillingene i høreapparatene og til databasen.

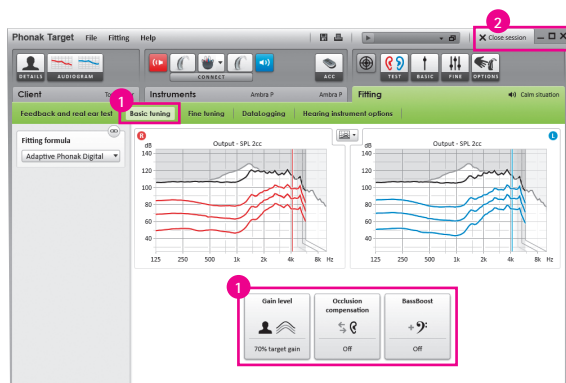

PHONAK

life is on

Phonak Target™ 1.0

Tilpasningsveiledning

Tilbehør



Phonak Target™ gjenkjenner tilkoblet tilbehør automatisk; bare koble dem til under tilpasningen. Gjenkjent tilbehør vises på skjermen ved siden av tilkoblede høreapparater.

Tilbehør kan også velges manuelt under **[Instrumenter] > [Tilbehør]**.

Forsikre deg om at utstyret er tilkoblet via USB kablen til PC'n.

Under lagringsprosessen listes tilbehøret opp.

For å bruke talebananen under konsultasjonen



Trykk **[Klient] > [Audiogram]**.

Velg **[Vis høreprøve]** i audiogrammet for å legge høreprøven inn i talebananen.