


Phonak Target™ 1.0

Aanpasgids

Vorbereidingen eerste aanpassing

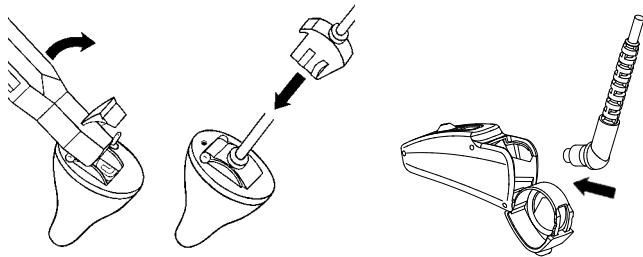


iCube

Plaats de batterij en sluit de lade.

NOAHlink of HI-PRO

Sluit de programmeerkabels aan.

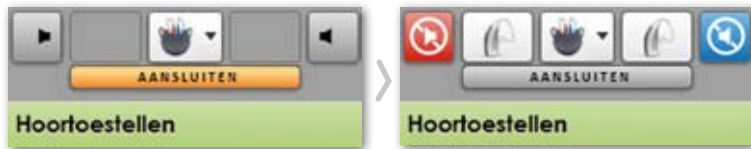

1.

Kies de juiste interface. Klik op het zwarte driehoekje om dit te wijzigen. Kies **[AANSLUITEN]**. De toestellen worden gedetecteerd.



2.

1. Klik op de tab **[Aanpassing]**.

2. In het scherm **[Feedback en Real ear test]** kiest u **[Start test]** voor de meting. Vink de optie **[Gebruik geschatte RECD en venting]** aan als u de resultaten van de meting wilt gebruiken voor berekening van de akoestische eigenschappen.



3.

1. Ga naar **[Eerste aanpassing]** als u de **[Versterking]**, **[Occlusie compensatie]** of **[BassBoost]** wilt wijzigen.

2. Kies **[Sessie sluiten]** om op te slaan in de hoortoestellen en NOAH.

Phonak Target™ 1.0

Tips en trucs

Om accessoires te programmeren



De Phonak Target™ software herkent aangesloten accessoires vanzelf; eenvoudigweg aansluiten tijdens de aanpassing is voldoende. De accessoire verschijnt in het dashboard boven in het scherm.

Accessoires kunnen ook handmatig gekozen worden in de tab **[Toestellen] > [Accessoires]**.

Zorg ervoor dat de accessoires via de USB kabel aangesloten zijn.

Tijdens het opslaan wordt de accessoire weergegeven in het scherm.

Het gebruik van de spraakspectrum tijdens counseling



Klik op tab **[Cliënt] > [Audiogram]**.

Kies **[Toon spraakspectrum]** in de audiogramsectie om het gehoorverlies weer te geven.