


Phonak Target™ 1.0

Guia de ajuste rápido

Para preparar os aparelhos auditivos para o ajuste

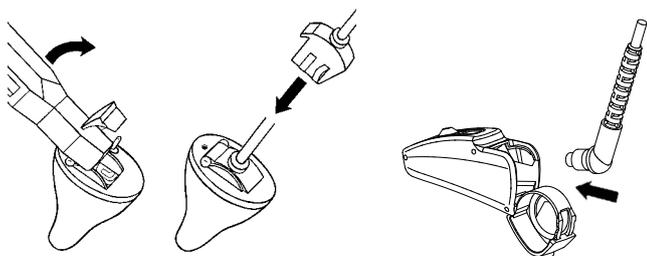

iCube

Coloque a pilha e ligue os aparelhos auditivos fechando o compartimento de pilha.

NOAHlink ou HI-PRO

Conecte o cabo de programação nos aparelhos auditivos e na interface de programação.



1.

Confirme se a interface de programação está disponível na tela. Para alterar o dispositivo de programação utilize o menu suspenso. Clique em **[CONECTAR]** para iniciar o ajuste. Os aparelhos conectados irão aparecer.



2.

1. Clique em **[Ajuste]**.

2. Na tela **[Teste de Microfonia e Ouvido Real]** clique em **[Iniciar teste]** para realizar o teste. Para utilizar os resultados do teste para calcular os ajustes dos parâmetros acústicos, selecione **[RECD e ventilação estimados]**.



3.

1. Vá para **[Ajuste básico]** se você deseja alterar **[Ganho]**, **[Compensação de oclusão]** ou **[Aumento de graves]**.

2. Clique em **[Fechar sessão]** para salvar os ajustes no aparelho auditivo e no banco de dados.

Phonak Target™ 1.0

Dicas

Para programar os acessórios



O software Phonak Target™ identifica os acessórios conectados automaticamente; apenas conectando-os durante a sessão de ajuste. O acessório identificado será mostrado no painel próximo aos aparelhos conectados.

Os acessórios também podem ser selecionados manualmente na tecla **[Aparelho Auditivo]** > **[Phonak AcessLine]**.

Certifique-se de que os acessórios estão conectados ao computador via cabo USB.

Durante o processo de salvar, os acessórios são listados na caixa de diálogo.

Para utilizar a espectro de fala para aconselhamento



Clique em **[Cliente]** > **[Audiograma]**.

Selecione **[Mostrar espectro de fala]** na seleção de audiograma para demonstrar a perda auditiva do cliente com a Banana da Fala.