


Phonak Target™ 1.0

Programmeringsguide

För att förbereda hörapparaten inför anpassningen

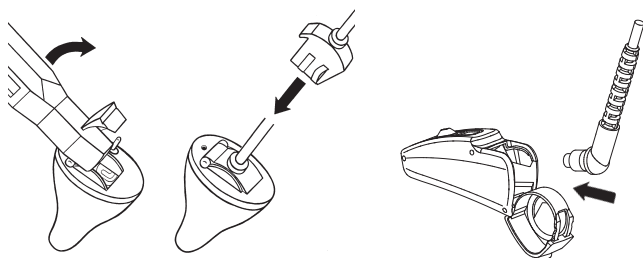

iCube

Sätt i batteriet och slå på hörapparaten genom att stänga batterifacket.


NOAHlink eller HI-PRO

Anslut programmeringskabeln till hörapparaten och till programmeringsenheten.



1.


Bekräfta att rätt programmeringsenhet visas. För att ändra programmeringsenhet, använd rullgardinsmenyn. Klicka på **[ANSLUT]** för att starta anpassningen. Ansluten hörapparat kommer att visas.

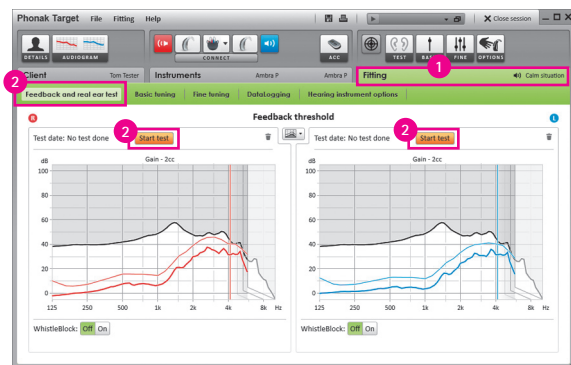

2.

1. Klicka på **[Anpassning]**.

2. I skärmbilden **[Återkopplings- och real ear-test]** klicka **[Starta test]** för att utföra testet. För att använda resultatet för att beräkna inställningar för akustiska parametrar, välj **[Använd beräknad RECD och vent]**.

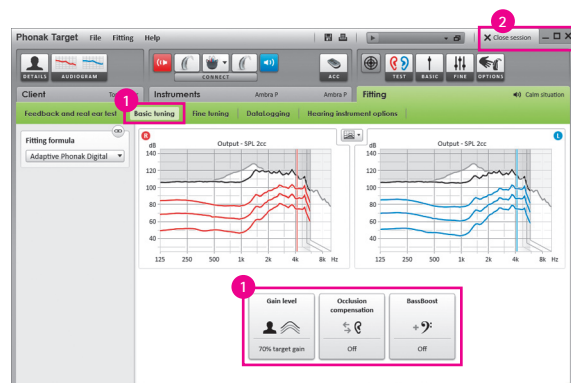

3.

1. Gå till **[Grundinställning]** om du behöver göra justeringar av **[Förstärkning]**, **[Ocklusionskompensation]** eller **[BassBoost]**.

2. Klicka på **[Stäng session]** för att spara inställningar till hörapparat och databas.


PHONAK

life is on

Phonak Target™ 1.0

Programmeringsguide

För att anpassa tillbehör

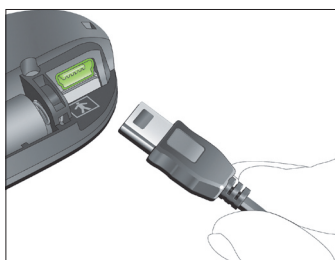


Phonak Target™ identifierar anslutna tillbehör automatiskt, koppla bara in dem bara under anpassningen. De identifierade tillbehören visas bredvid ansluten hörapparat.

Tillbehör kan också väljas manuellt under **[Hörapparater] > [Tillbehör]**.

Kontrollera att tillbehören är anslutna till datorn via USB-kabel.

Under Spara-proceduren, listas tillbehören i Spara-dialogen.

För att använda talspektrum under anpassningen

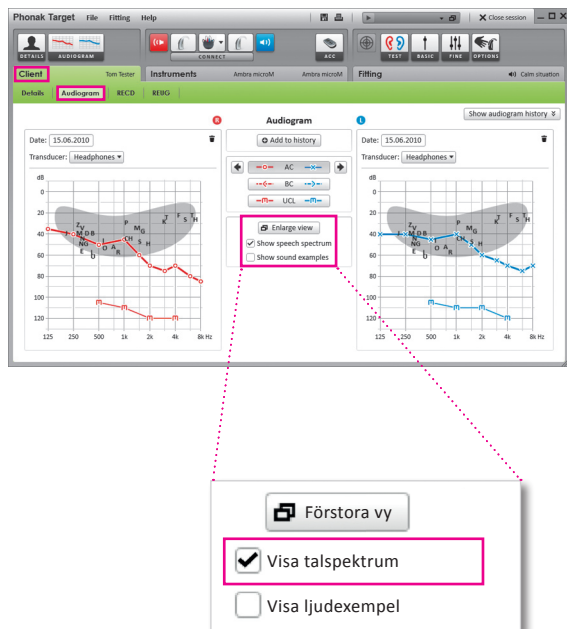

Klicka på **[Klient] > [Audiogram]**.

Välj **[Visa talspektrum]** i audiogramsektionen för att visa klientens hörselnedsättning i talspektrumen.