


# Phonak Target™ 1.2

## Guía rápida de adaptación

Preparación de los audífonos para la sesión de adaptación.

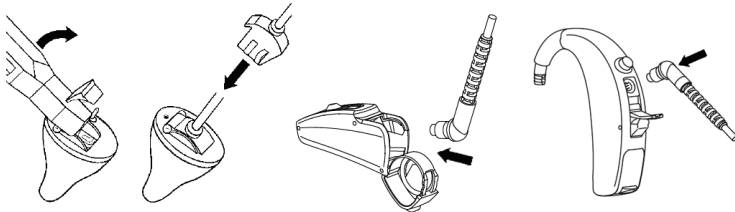

### iCube


Inserte la pila y encienda el audífono tras cerrar el portapilas.

### NOAHlink o HI-PRO

Conecte los cables de programación a los audífonos y al dispositivo de adaptación.




Confirme que aparece el dispositivo de adaptación correcto. Para cambiar el dispositivo de adaptación utilice el menú desplegable. Haga clic en **[CONECTAR]** para comenzar la adaptación. Aparecerán los audífonos conectados.

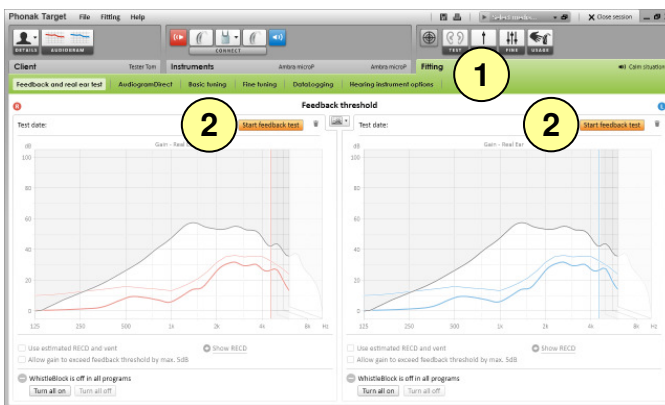

1. Haga clic en la pestaña **[Adaptación]**.
2. En la pantalla **[Realimentación y Test de oído real]** haga clic en **[Comenzar test]** para ejecutar el test.

Para utilizar los resultados del test para calcular el RECD estimado y los ajustes de los parámetros acústicos, seleccione la casilla de verificación **[Usar RECD y ventilación estimada]**.

Se recomienda realizar el test de realimentación y oído real antes de realizar pruebas con AudiogramDirect.

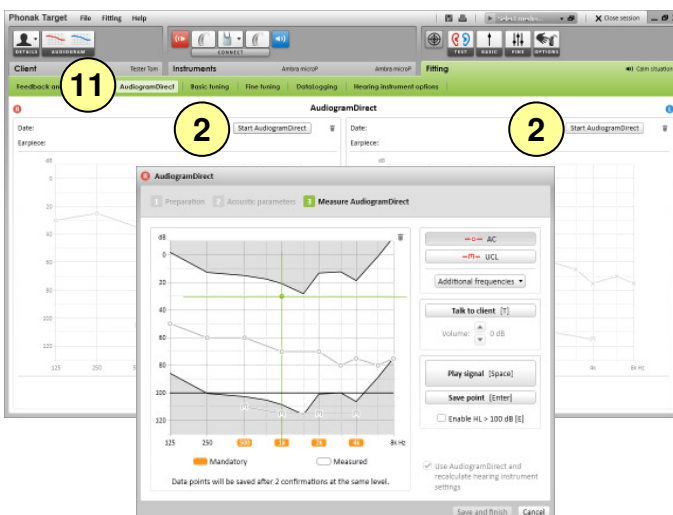

1. Haga clic en **[AudiogramDirect]** para hacer la medida del umbral auditivo y el UCL con los audífonos conectados.
2. Haga clic en **[Iniciar AudiogramDirect]** y siga las instrucciones.



1. Vaya a **[Ajuste básico]** si necesita realizar ajustes en **[Nivel de ganancia]**, **[Compensación de oclusión]**, **[BassBoost]** o el botón de **[configuración de compresión]**.

Los ajustes del nivel de ganancia y la compresión se basan en la experiencia de uso del cliente y en la fórmula de adaptación.

2. Haga clic en **[Cerrar Sesión]** para guardar los ajustes en el audífono y la base de datos.

## Información de utilidad para programar los accesorios



Phonak Target™ identifica automáticamente los accesorios conectados con solo conectarlos durante la sesión de adaptación.

Para PilotOne extraiga siempre la pila antes de conectar el cable USB.

Los accesorios identificados se muestran en el panel de control junto a los audífonos conectados.



También pueden seleccionarse los accesorios manualmente en la pestaña **[Audífonos]** > **[Accesorios]**.

Durante el proceso de guardado los accesorios se muestran en el cuadro de diálogo de guardado.



## Consejos y trucos

La sección Ajuste básico de Phonak Target™ proporciona herramientas fundamentales para realizar correctamente la adaptación. Una novedad de la versión 1.2 de Phonak Target™ es la herramienta de configuración de compresión que sirve para realizar cambios globales en las características de compresión. Para acceder a esta herramienta, haga clic en el ficha **[Adaptación]** > **[Ajuste básico]** y seleccione el botón de **[configuración de compresión]**.

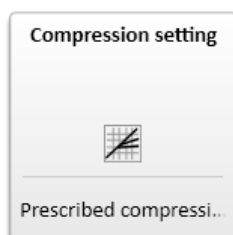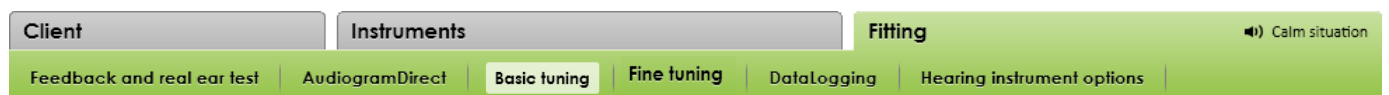


Phonak Target™ selecciona los ajustes globales de la compresión en función de la experiencia de uso del cliente y la fórmula de adaptación.


Compresión calculada estará seleccionado a no ser que el cliente sea un usuario experto del procesamiento de señales lineales; en este caso, estará seleccionado Semi-lineal. Esta opción hace que los ajustes de compresión sean más lineales que lo que recomienda la fórmula de adaptación seleccionada; esto contribuye a simplificar la transición desde el procesamiento de señales lineales.

También puede seleccionar Lineal manualmente. Esta opción mantiene los objetivos de la fórmula de adaptación seleccionada al tiempo que hace que todos los ajustes de compresión sean lo más lineales posible.

La sección de ajuste de precisión de Phonak Target™ incluye la opción de ajustar las herramientas para adaptarlas a las necesidades del cliente de forma rápida y precisa. Haga clic en la pestaña **[Adaptación]** > **[Ajuste fino]** para acceder a las siguientes herramientas de adaptación.

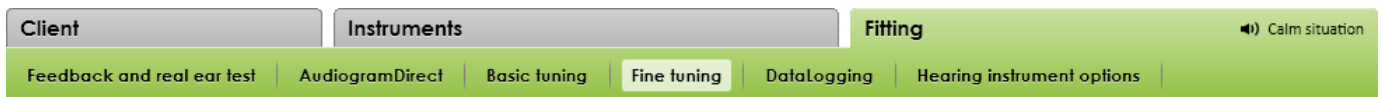


Cada programa de la estructura de programas puede ajustarse con precisión, incluyendo los programas de transmisión de cada caso de uso inalámbrico.

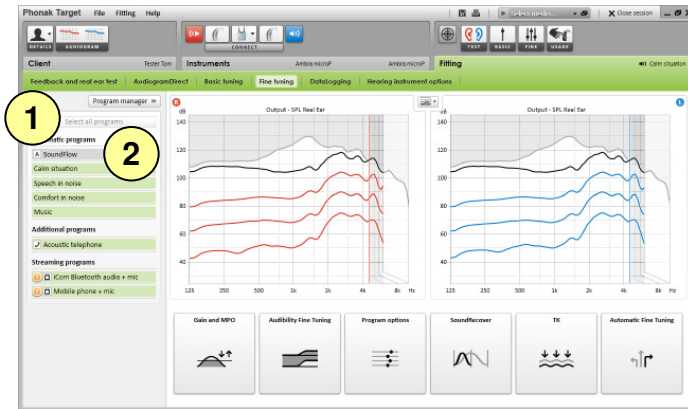

Seleccione el programa que desea ajustar.

1. Haga clic en **[Seleccionar todos los programas]** para ajustar todos los programas al mismo tiempo.
2. Haga clic en **[SoundFlow]** para modificar solo los programas automáticos.

Haga clic en un programa de la lista, por ejemplo, Ambiente tranquilo para ajustar únicamente este programa.

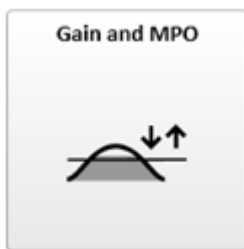

Seleccione los valores de ganancia con el cursor para ajustarlos. Los valores de ganancia pueden ajustarse para sonidos de entrada suaves (G40), moderados (G60) e intensos (G80).

El rango óptimo de adaptación está disponible si los valores de UCL individuales se introducen en el audiograma del cliente.


Para modificar el MPO en todos los canales al mismo tiempo, haga clic en **[MPO]** a la izquierda junto a los valores de MPO. La ganancia global puede modificarse al hacer clic en **[Ganancia]**.

El ratio de compresión de cada canal se muestra directamente en la fila que se encuentra debajo de los valores de ganancia.



Las muestras de sonido que pueden ser elegidas y las ganancias relacionadas se muestran en la pantalla de curvas. Las muestras de sonido pueden reproducirse para simular un entorno sonoro específico.

Los ajustes sólo afectan a los niveles de ganancia y frecuencias que sean relevantes para mejorar la audibilidad de los estímulos seleccionados.

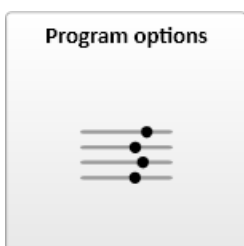

Ahora las funciones de limpieza de sonido pueden ajustarse con precisión individualmente siempre y cuando sea necesario. Los ajustes actuales están posicionados en escalas numeradas entre 0 y 20 y los rangos disponibles dentro de cada escala son visibles.

Cuando se necesita un programa personalizado haga clic en: **[Gestor de Programas]** > **[Añadir nuevo programa]** > **[Programa a medida]**.


Los ajustes de limpieza del sonido realizados con FlexControl se mostrarán en las sesiones de seguimiento si los datos registrados (DataLoggin) están disponibles.



La configuración individual de SoundRecover establecida durante el cálculo previo puede ajustarse con precisión.

Para adaptaciones binaurales la frecuencia de corte y la compresión frecuencial se calculan en relación al oído con menor pérdida auditiva. Compruebe la configuración de SoundRecover en caso de que vayan a adaptarse audífonos incompatibles al mismo tiempo en una única sesión de adaptación binaural.

La cantidad de compresión frecuencial puede aumentar o disminuir según se desee para mejorar la inteligibilidad y audibilidad verbal.

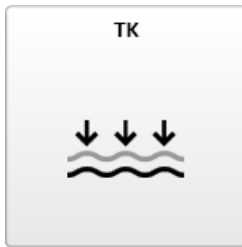

La amplificación de sonidos de entrada muy suaves (G20) puede ajustarse con la herramienta de ajuste [TK]. Un aumento de la ganancia en sonidos de entrada muy suaves disminuye el punto de activación del umbral (TK) y viceversa. Seleccione los valores con el cursor para ajustarlos. Debajo de los valores de ganancia se muestran los valores de TK para cada canal.

La curva de ganancia / presión de salida para sonidos de entrada muy suaves se muestra en la pantalla de curvas.




**[Ajuste fino automático]** es una herramienta de ajuste de precisión basada en la situación. Los ajustes disponibles dependen de la evaluación del entorno sonoro del cliente.

Los pasos a seguir para la realización de un ajuste de precisión se muestran claramente antes de que el audioprotesista proceda a realizarlo. Dependiendo del programa seleccionado se recomendará una muestra de sonido.

Las muestras de sonido pueden reproducirse para simular el entorno sonoro.

## Información útil para utilizar el espectro verbal

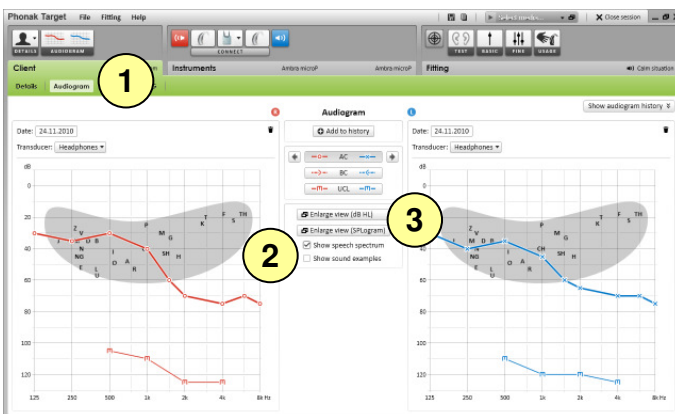

1. Haga clic en la pestaña **[Cliente]** > **[Audiograma]**.
2. Seleccione **[Mostrar espectro del habla]** en la sección del audiograma para mostrar la pérdida auditiva del cliente en el espectro verbal.
3. Haga clic en **[Ampliar pantalla]** para compartir la pantalla del audiograma simplificado entre el cliente y acompañantes.

Para imprimir instantáneamente la vista mostrada durante la consulta del cliente, haga clic en el icono de impresión situado en la esquina superior derecha de la vista ampliada.