


Phonak

Auricular ActiveVent™

Instrucciones de montaje

Artículos necesarios

1. Auricular ActiveVent: MAV izquierda (azul) o derecha (rojo)
2. Carcasa: SlimTip Titanium AV
3. Tubo: SlimTip Link AV
4. Filtro de cera HF3: izquierdo (azul) o derecho (rojo), incl. herramienta de cambio de filtro
5. Herramienta de corte, por ejemplo, pinzas pequeñas
6. Herramienta de manipulación del auricular

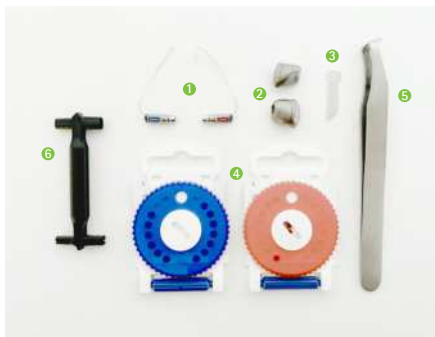

Inserción de SlimTip Link AV

1. Inserte el tubo (SlimTip Link AV) en la carcasa (SlimTip Titanium AV).



2. Tire del tubo y muévelo en la carcasa hasta que encaje en su posición.



3. Corte el tubo lo más cerca y plano posible en relación al aro.



4. Carcasa SlimTip Titanium AV rematada con SlimTip Link AV.



Inserción del auricular ActiveVent (MAV) en SlimTip Titanium AV

1. Inserte el auricular ActiveVent en la herramienta de manipulación. Utilice el mango en el que pone "MAV".



2. Empuje el auricular en el tubo de la carcasa hasta que note resistencia.



3. El pico del auricular debe estar alineado con el aro del tubo.



029-1156-06/V2.00/2021/NLG © 2021 Sonova AG All rights reserved