

# Phonak Fast Facts



## Phonak Mini Chargeur

### De quoi s'agit-il ?

Le Mini Chargeur est l'option de charge petite et compacte pour les aides auditives rechargeables Phonak Belong™. Grâce à sa taille, il prend peu de place, ce qui en fait un petit chargeur idéal à transporter ou un chargeur de secours.

### Quels sont les avantages ?

Le Mini Chargeur est la solution idéale pour les patients qui souhaitent un chargeur petit, compact et plus pratique à transporter.

### Comment l'utiliser ?

Pour charger les aides auditives, il suffit de les placer dans les emplacements de chargement du Mini Chargeur et elles s'éteignent automatiquement. Le voyant lumineux vert clignote doucement pour indiquer que les aides auditives sont en train de charger. Lorsque le voyant cesse de clignoter et reste allumé, cela signifie que les aides auditives sont complètement chargées et qu'elles sont prêtes à l'emploi. La durée de recharge d'une aide auditive complètement déchargée est de 3 heures.



Pour plus d'informations sur les aides auditives rechargeables Phonak Belong et les options de charge, consultez [www.phonakpro.com/audeo-b](http://www.phonakpro.com/audeo-b) ou contactez votre représentant Phonak.