

Phonak Fast Facts



Phonak Audéo™ B-Direct

De quoi s'agit-il ?

Audéo B-Direct est la première aide auditive Made for All* (MFA) de Phonak qui offre une connectivité directe avec n'importe quel téléphone portable** sans nécessiter le port d'un appareil de diffusion. Équipée de la puce SWORD™, la puce radio de 2,4 GHz brevetée de Phonak et de la plateforme Belong, l'aide auditive Audéo B-Direct élargit la gamme Phonak en proposant une solution de connectivité directe.

Quels sont les avantages ?

L'aide auditive Audéo B-Direct présente les avantages suivants :

- Connectivité directe à tous les téléphones Bluetooth®**, quel que soit le système d'exploitation ou la marque. Les patients souhaitant profiter de la connectivité directe n'ont pas besoin de changer de téléphone
- De véritables appels mains-libres. Les patients entendent le téléphone sonner dans leurs aides auditives et peuvent répondre à l'appel sans manipuler leur téléphone
- Connexion automatique au TV Connector pour écouter la télévision en profitant d'un son stéréo de haute qualité
- La balance environnementale permet de régler le volume ambiant et le volume du signal diffusé



Comment l'utiliser ?

L'aide auditive Audéo B-Direct est réglée grâce au nouvel appareil de programmation standard de l'industrie, Noahlink Wireless, et à Target 5.2 ou une version ultérieure. Une fois programmée, l'aide auditive est prête à être connectée directement à n'importe quel téléphone portable compatible Bluetooth*. Il est facile d'accepter ou de rejeter des appels d'une simple pression sur le bouton de l'aide auditive. Le téléphone doit être à portée pour que le patient puisse s'y connecter et avoir une conversation mains-libres. La connexion à la télévision est facile grâce à la configuration prête à l'emploi. Une fois que les aides auditives sont à portée, elles se connectent automatiquement au TV Connector pour une excellente expérience auditive.

*Universelle **Téléphone compatible avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens.

Pour en savoir plus sur les aides auditives Phonak Audéo B-Direct, rendez-vous sur

www.phonakpro.fr/audeo-b-direct.