

Phonak Fast Facts



Situation réverbérante pour AutoSense OS

De quoi s'agit-il ?


Situation réverbérante est un programme du système d'exploitation automatique de Phonak, AutoSense OS. En présence de réverbération de l'écho, AutoSense OS active le programme Situation réverbérante qui réduit les effets perturbateurs de la réverbération et facilite l'écoute.

Quels sont les avantages ?

En toutes circonstances, les aides auditives du patient reconnaîtront automatiquement un écho dérangeant et réduiront cette sensation désagréable en favorisant un environnement d'écoute confortable, en réduisant l'effort auditif et en améliorant la compréhension de la parole.

Comment fonctionne-t-il ?

Dans le logiciel d'adaptation Phonak Target 4.0, le programme Situation réverbérante peut être paramétré facilement via l'écran d'options de programmes automatiques. Cela permet d'effectuer certains ajustements du programme, sans incidence sur aucun autre programme d'AutoSense OS.

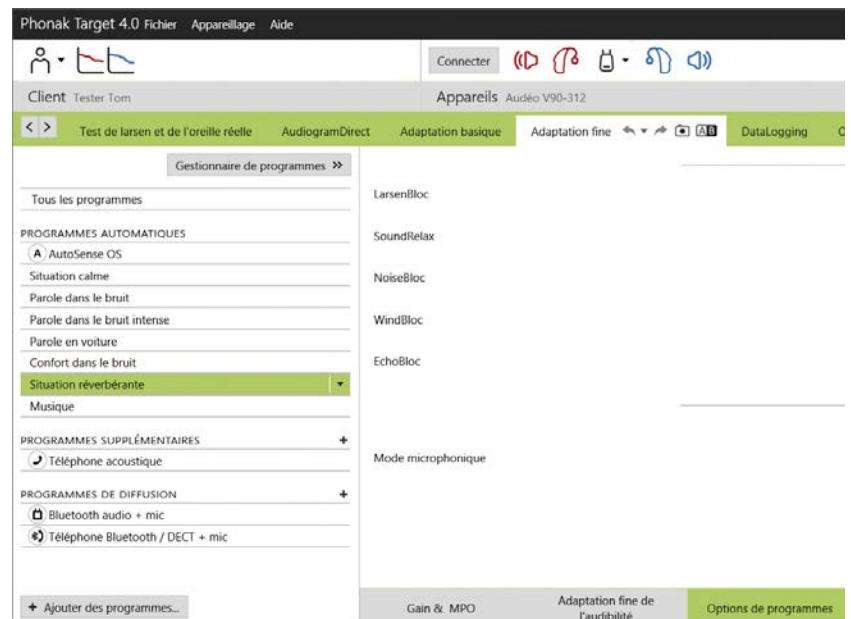

Pour plus d'informations sur Situation réverbérante, AutoSense OS et Phonak Venture, rendez-vous sur www.phonakpro.fr