

# Phonak Fast Facts



## Noahlink Wireless

### De quoi s'agit-il ?

Noahlink Wireless est le nouvel appareil de programmation standard conçu pour les aides auditives compatibles avec la technologie Bluetooth® à basse consommation (Bluetooth Low Energy ou BLE). Fabriqué par HIMSA, l'appareil transfère sans fil les données d'appareillage de l'ordinateur aux aides auditives compatibles BLE (telles que les aides auditives Phonak Audéo™ B-Direct) sans utiliser de câble.

### Quels sont les avantages ?

Noahlink Wireless simplifie le processus d'appareillage :

- Il s'agit d'un appareil de programmation universel, ce qui évite d'avoir à utiliser des dispositifs de programmation brevetés
- Il offre la souplesse nécessaire pour ajuster les réglages des aides auditives sans fil compatibles BLE, sans utiliser de câble
- Exclusivité Phonak : l'aide auditive Audéo B-Direct peut être facilement identifiée. Appuyez sur le bouton-poussoir de l'aide auditive pour la sélectionner dans la liste des appareils disponibles



### Comment l'utiliser ?

Noahlink Wireless est facile à utiliser et à configurer. Installez Phonak Target 5.2 ou une version supérieure et branchez le câble USB de Noahlink Wireless sur l'ordinateur d'appareillage. Noahlink Wireless est automatiquement installé et peut être facilement sélectionné dans le menu déroulant des dispositifs d'appareillage disponibles.

Ouvrez et fermez le compartiment pile, puis cliquez sur **[Connecter]** pour détecter l'aide auditive Phonak Audéo B-Direct. Les appareils à portée sont affichés. Appuyez sur **[Diffuser le bip]** ou sur le bouton-poussoir des aides auditives pour confirmer le(s) côté(s) que vous souhaitez attribuer à un patient.

Pour en savoir plus sur les aides auditives Phonak Audéo B-Direct, rendez-vous sur [www.phonakpro.fr/auideo-b-direct](http://www.phonakpro.fr/auideo-b-direct)

Pour en savoir plus sur Noahlink Wireless, veuillez consulter les FAQ du site Web de HIMSA <https://www.himsa.com/Products/NoahlinkWireless/ProductInformationSheets/tabid/4794/language/en-US/Default.aspx>