

Lyric™ 3

Mode d'emploi



PHONAK
life is on

Ce mode d'emploi s'applique au modèle d'aide auditive suivant:

Modèle non-compatible **Marquage CE**
"connectivité sans fil"

Lyric3 2014



Sommaire

1. Présentation de Lyric	6
1.1 Qu'est-ce qui rend Lyric si différent	7
1.2 Que pouvez-vous attendre de votre nouveau Lyric	7
2. Ajustement et retrait de Lyric	10
2.1 Utilisation de SoundLync™	10
2.2 Mise en mode VEILLE de Lyric	12
2.3 Mise à l'ARRÊT de Lyric	12
2.4 Mise en MARCHÉ de Lyric	13
2.5 Réglage du volume sonore	13
2.6 Guide rapide SoundLync	14
2.7 Instructions pour retirer soi-même Lyric	15
3. Suivi et remplacement	19
4. Foire aux questions	22
5. Services et garantie	29
6. Déclaration de conformité	30
7. Informations et explications des symboles	31

8. Politique de confidentialité	36
9. Informations importantes sur la sécurité	38
9.1 Identification des risques	38
9.2 Informations sur la sécurité du produit	42


Merci d'avoir choisi Lyric, la première aide auditive à port continu 100% invisible. Votre aide auditive Lyric nécessite beaucoup moins d'interactions et de manipulations que les aides auditives conventionnelles. Nous sommes convaincus que votre aide auditive Lyric vous procurera de précieux bénéfices dans votre vie quotidienne.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi pour utiliser votre aide auditive Lyric en toute sécurité et bénéficier de toutes les possibilités qu'elle peut vous offrir.

En cas de questions, veuillez consulter votre audioprothésiste. **Phonak – et la vie s'exprime !**

1. Présentation de Lyric

L'introduction suivante décrit Lyric, la première aide auditive 100% invisible.

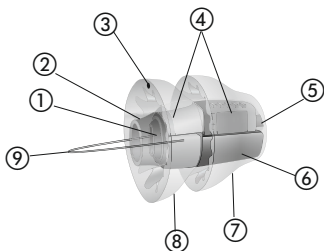

- ① Poignée d'insertion
- ② Protection du micro
- ③ Indication «ce côté vers le haut»
- ④ Microphone et processeur de signal

- ⑤ Ecouleur
- ⑥ Pile
- ⑦ Corolle médiale
- ⑧ Corolle latérale
- ⑨ Boucle d'extraction

1.1 Qu'est-ce qui rend Lyric si différent

Lyric est placé confortablement dans le conduit auditif par un audioprothésiste spécialisé Lyric, et peut être utilisé en continu 24 heures par jour et 7 jours par semaine, pendant plusieurs mois d'affilée. Aucune intervention chirurgicale ni anesthésie ne sont requises. Contrairement à beaucoup d'autres aides auditives, Lyric se place entièrement dans le conduit auditif et exploite l'anatomie de votre oreille pour vous procurer une qualité sonore naturelle.


1.2 Que pouvez-vous attendre de votre nouveau Lyric

Habituez-vous à vos nouvelles aides auditives

Comme toutes les aides auditives, Lyric nécessite une période d'adaptation. Lyric devient confortable après quelques jours chez la plupart des utilisateurs. Pour d'autres, il faut compter jusqu'à deux semaines pour s'habituer à Lyric.

Vous pourrez ressentir au début un peu d'inconfort en dormant. Essayez de dormir en exerçant le moins possible de pression directe sur vos oreilles. L'idéal est de dormir sur le dos.

Si votre oreille vous démange, ne la grattez pas et ne tirez pas dessus, mais massez délicatement le côté de votre visage à proximité de votre oreille.

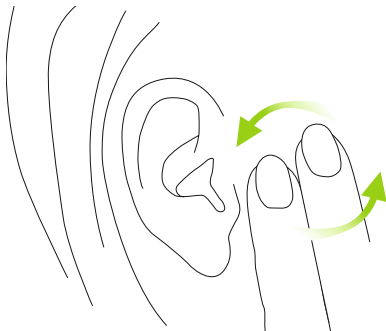

Habituez-vous aux nouveaux sons et à la nouvelle qualité sonore

En général, une perte auditive évolue lentement au cours des années. Il n'est donc pas anormal que les sons paraissent un peu forts ou bizarres quand vous portez Lyric pour la première fois. Les voix de vos amis ou de votre entourage – et même peut-être la vôtre – pourront vous paraître différentes pendant un certain temps.


Au début, vous pourrez aussi remarquer les sons ambiants usuels tels que le bruit du réfrigérateur, celui des pneus d'une voiture sur la route, des claquements de talons en marchant. Vous y ferez rapidement moins attention car ils feront partie de votre univers auditif quotidien.

2. Ajustement et retrait de Lyric

Le chapitre suivant vous renseigne sur l'utilisation de votre Lyric. Nous vous conseillons de le lire très attentivement.

2.1 Utilisation de SoundLync


SoundLync contient un petit aimant noir qui agit comme une télécommande pour modifier les réglages de votre Lyric (voir les instructions chapitres 2.2 à 2.5).

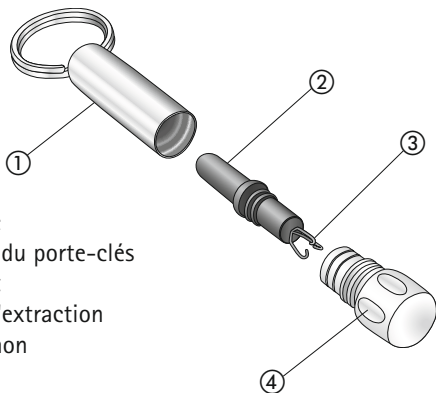

SoundLync

- ① Boîtier du porte-clés
- ② Aimant
- ③ Outil d'extraction
- ④ Capuchon

- Pour utiliser SoundLync, dévissez l'aimant du boîtier du porte-clés et présentez-le dans votre conduit auditif, sans toucher l'aide auditive.

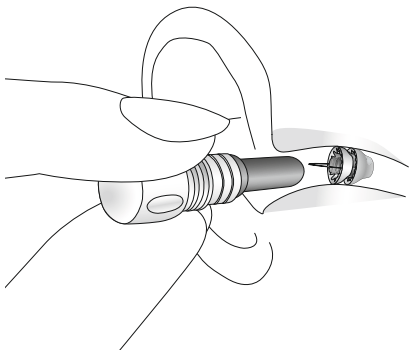

- Un petit outil est fixé à l'autre extrémité de l'aimant. Cet outil peut être utilisé pour retirer en toute sécurité Lyric de votre oreille en cas d'urgence.

Remarque: veuillez noter que Lyric passe en VEILLE pendant 1 seconde après chaque bip de confirmation. Lyric est également en VEILLE pendant la série de bips lors du changement de volume.

2.2 Mise en mode VEILLE de Lyric

- L'aide auditive étant en MARCHE, présentez l'aimant dans votre conduit auditif sans toucher l'aide auditive.
- Vous allez entendre 2 bips.
- Retirez l'aimant de votre oreille.

Remarque: lorsque vous êtes en mode VEILLE, Lyric devient «transparent». Vous ne ressentez aucun phénomène d'occlusion.

2.3 Mise à l'ARRÊT de Lyric

- L'aide auditive étant en MARCHE, présentez l'aimant dans votre conduit auditif sans toucher l'aide auditive.
- Attendez jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips.
- Maintenez l'aimant dans votre conduit auditif jusqu'à ce que vous entendiez 4 bips supplémentaires (il y a une courte pause entre les 2 premiers bips et les 4 derniers).

- Retirez l'aimant de votre oreille.

Remarque: n'oubliez pas que quand Lyric est à l'ARRÊT, il se comporte comme un bouchon d'oreille.

2.4 Mise en MARCHE de Lyric

Pour mettre Lyric en MARCHE, soit du mode VEILLE, soit de l'ARRÊT, présentez l'aimant dans votre conduit auditif sans toucher l'aide auditive.

- Attendez jusqu'à ce que vous entendiez **1 bip**.
- Retirez l'aimant de votre oreille.

2.5 Réglage du volume sonore

- Placez l'aide auditive en mode VEILLE – **2 bips**. Retirez l'aimant de votre conduit auditif.
- Attendez que la sourdine de Lyric soit annulée.
- Remettez l'aimant dans votre conduit auditif et mettez l'aide auditive en MARCHE – **1 bip**. **Ne retirez pas l'aimant de votre conduit auditif.**

- **Maintenez l'aimant dans votre conduit auditif.** Lyric va augmenter le volume d'un niveau par rapport à son réglage précédent. Chaque niveau est représenté par un bip. Lorsque vous atteignez le niveau maximum, Lyric émet un double bip. Si vous laissez l'aimant dans votre conduit auditif, Lyric recommencera le cycle au volume le plus faible et augmentera le volume jusqu'au niveau maximum.
- **Retirez l'aimant de votre oreille quand vous avez atteint le volume sonore souhaité**

Remarque: quand vous mettez Lyric en MARCHE ou quand vous quittez le mode VEILLE, le volume sonore se règle automatiquement au dernier niveau choisi.

2.6 Guide rapide SoundLync


MARCHE	1 bip
VEILLE	2 bips
ARRÊT	2 bips (maintenir l'aimant) 4 bips
Volume	2 bips (retirer l'aimant) 1 bip (maintenir l'aimant et attendre) Séquence de bips Double bip (volume maximum)

2.7 Instructions pour retirer soi-même Lyric


Retirer Lyric

Vous ne devriez pas avoir à retirer Lyric entre deux consultations de suivi. Si vous deviez toutefois le faire, pour quelque raison que ce soit, et qu'aucun audioprothésiste spécialisé Lyric ne soit disponible, vous pouvez enlever vous-même l'aide auditive ou vous faire aider par un membre de votre famille ou un ami. Une fois Lyric ôté de votre oreille, il ne peut pas être réinséré.


Etape 1. Si Lyric est encore en MARCHÉ, arrêtez-le à l'aide de l'aimant (voir les instructions du chapitre 2.3).

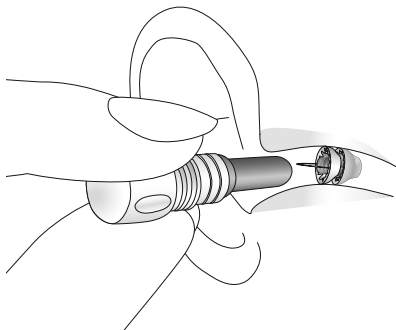


Etape 2. Dévissez le capuchon de l'aimant pour dégager l'outil d'extraction. Tenez fermement l'outil d'extraction comme vous tiendriez un stylo, votre main prenant appui sur votre joue. Insérez lentement et délicatement l'outil d'extraction dans votre conduit auditif jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'aide auditive.

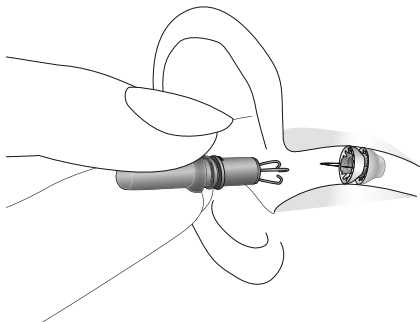

Etape 3. Exercez un léger mouvement de rotation pour engager l'outil dans la boucle d'extraction. Vous devez sentir une légère résistance quand vous l'aurez agrippée. Retirez délicatement l'aide auditive en exerçant un mouvement de rotation progressif.

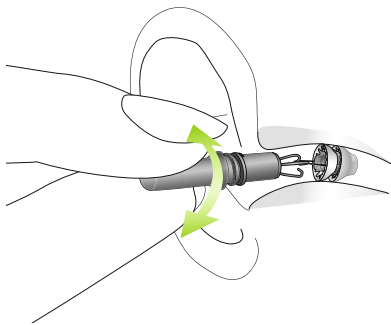

Etape 4. Quand vous aurez retiré l'aide auditive de votre oreille, placez-la dans son coffret. Consultez dès que possible votre audioprothésiste spécialisé Lyric pour qu'il examine votre conduit auditif. Veuillez rendre l'aide auditive usagée à votre audioprothésiste.

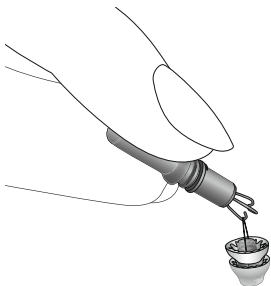

Remarque: si l'outil d'extraction n'est pas disponible, Lyric peut aussi se retirer à l'aide de brucelles à bout arrondi. Saisir les boucles d'extraction de l'aide auditive à l'aide des brucelles et retirez délicatement l'aide auditive en exerçant un mouvement de rotation. Pour cela, vous devrez vous faire aider par un ami ou un membre de votre famille. Veillez à bien expliquer à la personne qui vous aide que pour retirer Lyric, elle doit agir lentement, en exerçant un mouvement de rotation.

3. Suivi et remplacement

Après avoir placé Lyric dans votre (vos) oreille(s), votre audioprothésiste spécialisé Lyric vous fixera un rendez-vous de suivi pour procéder à tous les ajustements nécessaires et répondre à vos questions.

Pour le remplacement de l'aide auditive, votre audioprothésiste spécialisé Lyric pourra vous demander de prendre rendez-vous dès que l'aide auditive cessera de fonctionner ou vous fixera un rendez-vous pour la remplacer à une date prédéterminée. Quand l'aide auditive cesse de fonctionner, elle doit être retirée de l'oreille dans les 24 heures.

S'il n'est pas possible de faire enlever Lyric par votre audioprothésiste dans les 24 heures, vous pouvez retirer vous-même l'aide auditive ou vous faire aider par un ami ou un membre de votre famille. Les instructions pour retirer Lyric se trouvent au chapitre 2.7.

Entretien de Lyric

Lyric peut être porté 24h/7j, pendant des mois, même sous la douche. Lyric est résistant à l'eau, mais n'est pas étanche et ne doit pas être complètement immergé dans l'eau. Ne plongez pas la tête dans l'eau à moins que vous n'utilisiez un bouchon d'oreille sur-mesure pour protéger Lyric de l'exposition à l'eau.

Vous pouvez protéger Lyric en évitant de l'exposer aux sprays pour les cheveux, assouplissants, gels, eau de Cologne, séchoirs ou liquides corrosifs. Pour protéger SoundLync, évitez de le faire tomber sur des surfaces dures, de l'exposer à une chaleur excessive ou de le soumettre à toute activité qui pourrait le démagnétiser.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre audio-prothésiste spécialisé Lyric.

Maximiser la durée de vie de la pile

En utilisation normale, la pile peut durer jusqu'à plusieurs mois d'affilée. Mettre Lyric en mode VEILLE pour la nuit prolongera la durée d'utilisation.

4. Foire aux questions

Puis-je utiliser des casques / des oreillettes avec Lyric?

Les écouteurs externes et les protections externes peuvent être utilisés. N'utilisez pas d'écouteurs intra-auriculaires, d'oreillette ou de bouchons d'oreille, car ils risqueraient de déloger l'aide auditive. Les écouteurs standards iPod peuvent être utilisés.

Une IRM, des rayons X ou une tomographie risquent-ils d'endommager Lyric ou d'être dangereux pour mes oreilles?

Lyric doit être retiré avant de passer une IRM, car l'aide auditive contient des pièces métalliques.

Par contre, des rayons X ou une tomographie ne risquent pas d'endommager ou de déloger l'aide auditive car aucun champ magnétique n'est utilisé. Toutefois, vous devez faire savoir au médecin et/ou au technicien que vous portez une aide auditive. Il peut être nécessaire de retirer l'aide auditive si vous devez passer une radiographie ou une tomographie de la tête. Si vous devez subir un acte chirurgical, quel qu'il soit, faites savoir à votre médecin que vous portez un Lyric.

Puis-je prendre l'avion avec Lyric?

Oui. Il n'y a aucun risque à prendre l'avion en portant des Lyric (pourvu que la cabine de l'avion soit pressurisée).

Puis-je nager avec Lyric?

Lyric est résistant à l'eau, mais n'est pas étanche et ne doit pas être complètement immergé dans l'eau. Ne plongez pas la tête dans l'eau à moins que vous n'utilisiez un bouchon d'oreille sur-mesure pour protéger Lyric de l'exposition à l'eau. Toutefois vous pouvez vous doucher en portant Lyric.

Que se passe-t-il si je fais de la plongée sous-marine ou du parachutisme en portant Lyric?

Vous ne devez pas porter Lyric pour faire de la plongée sous-marine ou du parachutisme. Les changements de pression qui en résultent peuvent être inconfortables

et/ou provoquer du larsen si Lyric bouge dans le conduit auditif. Si vous avez dû faire ces activités en portant Lyric, veuillez consulter votre audioprothésiste spécialisé Lyric pour qu'il examine vos conduits auditifs.


Dois-je consulter mon audioprothésiste spécialisé Lyric si la pile est usée dans une seule oreille?

Oui. Si une des aides auditives cesse de fonctionner pour quelque raison que ce soit, elle doit être retirée dans les 24 heures et un audioprothésiste spécialisé Lyric doit examiner votre conduit auditif. Si vous ne pouvez pas trouver d'audioprothésiste spécialisé Lyric dans les 24 heures, vous pouvez retirer vous-même l'aide auditive à l'aide de SoundLync.

Que dois-je faire si mes oreilles me font mal?

Vous pouvez ressentir au début un peu d'inconfort ou une certaine pression, quand vous portez Lyric pour la première fois. Dans la plupart des cas, c'est une question d'heures ou de jours et c'est plus un léger inconfort

que de la douleur. Si vous ressentez de la douleur au-delà du faible inconfort initial, veuillez consulter votre audioprothésiste spécialisé Lyric. Si vous ne pouvez pas contacter votre audioprothésiste spécialisé Lyric, cessez d'utiliser Lyric en le retirant vous-même ou en vous faisant aider par un ami ou un membre de votre famille. Veuillez alors consulter votre audioprothésiste spécialisé Lyric le plus tôt possible.

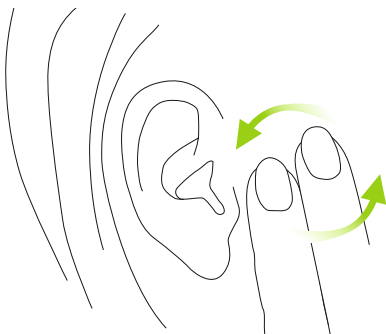

Que dois-je faire si mes oreilles me démangent?

Ne touchez pas Lyric. Si vos oreilles vous démangent, massez délicatement le côté de votre visage, devant l'oreille. Si vos oreilles continuent à vous démanger ou si la peau est irritée, consultez votre audioprothésiste spécialisé Lyric.

Comment nettoyer le cérumen de mes oreilles en portant Lyric?

Vous ne devez pas tenter de retirer le cérumen de votre conduit auditif pendant que vous portez Lyric. N'utilisez pas de coton-tige. Faites retirer le cérumen de vos oreilles par un médecin ORL.

Lyric déclenchera-t-il un détecteur de métal?

Non. Les pièces métalliques de Lyric sont trop petites pour déclencher un détecteur de métal.

Combien de temps mon aide auditive Lyric va-t-elle durer?

Lyric est conçu pour être porté jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner (c'est-à-dire qu'il n'amplifie plus) ou au maximum pendant 120 jours. Différents facteurs peuvent affecter sa durée de vie, y compris mais de façon non exhaustive, la durée pendant laquelle il est en mode VEILLE ou à l'ARRÊT, les environnements bruyants, une humidité excessive ou le cérumen.

Dois-je retourner chez mon audioprothésiste spécialisé Lyric à chaque fois que je dois remplacer mon aide auditive?

Votre audioprothésiste spécialisé Lyric doit mettre en place et programmer chaque aide auditive Lyric, après avoir examiné vos oreilles. Le remplacement des aides auditives prend environ 10 minutes.

Vais-je ressentir le moindre inconfort dans l'oreille en dormant?

Au début, vous pourrez ressentir un peu d'inconfort en dormant. Essayez de dormir en exerçant le minimum possible de pression directe sur vos oreilles. Dormir sur le dos est idéal.

Puis-je téléphoner avec Lyric?

Oui, vous pouvez téléphoner facilement avec Lyric.

5. Services et garantie

Phonak vous offre une garantie mondiale pour Lyric, à partir de sa date d'achat. Veuillez demander à votre audioprothésiste quels sont les termes de la garantie en vigueur dans le pays d'achat. La garantie couvre le remplacement des aides auditives en cas de défauts de fabrication de Lyric ou de pièces défectueuses.

Aucune réclamation sous garantie ne sera prise en considération si le système auditif présente une usure normale, s'il a été manipulé ou entretenu de façon incorrecte, s'il a été exposé à des agents chimiques, trempé dans de l'eau ou soumis à des efforts excessifs. Cette garantie ne couvre aucun des services fournis par l'audioprothésiste à son lieu de travail.

6. Déclaration de conformité

Par la présente, Phonak SA déclare que ce produit Phonak satisfait aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux appareils médicaux. Le texte complet de la déclaration de conformité peut être obtenu chez le fabricant ou le représentant local de Phonak dont l'adresse figure sur www.phonak.com (agences internationales).

Australie/Nouvelle-Zélande:



Indique qu'un produit respecte les dispositions réglementaires du RSM (Radio Spectrum Management) et de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority) pour la vente en Nouvelle-Zélande et en Australie.

7. Informations et explications des symboles



Avec le symbole CE, Phonak SA confirme que ce produit Phonak – y compris ses accessoires – satisfait aux exigences de la Directive Dispositifs Médicaux 93/42/EEC sur les appareils médicaux. Les chiffres placés sous le symbole CE correspondent aux codes des institutions certifiées consultées pour les directives ci-dessus.



Ce symbole indique que les produits décrits dans ces instructions d'utilisation respectent les exigences pour un appareil de Type B de la norme EN 60601-1. La surface de l'aide auditive est spécifiée comme un appareil de Type B.



Désigne le fabricant d'appareils médicaux, comme défini dans la directive européenne 93/42/CEE.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur lise et tienne compte des informations importantes dans ces modes d'emplois.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur tienne compte des précautions pertinentes signalées dans ces modes d'emplois.



Information importante pour la manipulation et la sécurité du produit.



Conserver au sec lors du transport.



Le symbole d'un «deux» barré indique que cette aide auditive est exclusivement à usage unique. Ne jamais la réutiliser. Rendez vos Lyric usagés à votre audioprothésiste spécialisé Lyric.

Conditions
de fonctionne-
ment

Sauf indication contraire précisée dans ces modes d'emploi, ce produit est conçu pour fonctionner sans problèmes ni restrictions s'il est utilisé comme prévu.

SN

Indique le numéro de série du fabricant pour pouvoir identifier un appareil médical spécifique.

REF

Indique le numéro de catalogue du fabricant pour pouvoir identifier l'appareil médical.



Température de transport: 0° à +50° Celsius (+32° à +122° Fahrenheit).
Température de stockage: +10° à +40° Celsius (+50° à +104° Fahrenheit).



Humidité de transport: jusqu'à 90% (sans condensation). Humidité de stockage: de 0 à 70%.



Pression atmosphérique: 500 hPA à 1100 hPA



Le symbole représentant une poubelle barrée vous indique que cette aide auditive ne devra pas être jetée comme un déchet ménager. Veuillez apporter les aides auditives usagées ou inutilisées aux points de collecte pour le recyclage des équipements électroniques ou la rendre à votre audioprothésiste. Eliminer ce produit dans les règles protégera l'environnement et la santé.



Ces symboles représentent les deux sachets emballés avec les aides auditives Lyric dans la pochette d'expédition. Ces sachets assurent un environnement optimal pour la pile Lyric pendant le transport et le stockage.



Après avoir ouvert la pochette d'expédition, jetez immédiatement ces deux sachets.



Ne pas ouvrir les deux sachets.



Ne pas ingérer le contenu des deux sachets.



Indique la date à partir de laquelle le dispositif médical ne doit plus être utilisé.



Indique la date de fabrication du dispositif médical.

8. Politique de confidentialité

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne régit la manière dont les entreprises doivent traiter vos données personnelles. Sonova, société mère de Phonak, respecte votre confidentialité et s'engage à protéger vos données personnelles. Nous tenons à vous informer de la façon dont nous traitons vos données personnelles et du degré de protection que vous confère la législation en vigueur.

Données vous concernant que nous avons reçues de la part de votre audioprothésiste

Voici la liste des données collectées et traitées par Sonova :

- Identité (prénom, nom de famille, date de naissance et sexe)
- ID Lyric
- Numéros de série des produits
- Informations sur le contrat (durée et modalités de paiement)
- Données d'adaptation Lyric

Objectifs du traitement de vos données personnelles par nos soins

Nous n'utiliserons vos données personnelles que quand la loi l'autorise. Elles sont généralement utilisées aux fins suivantes :


- Réclamations de garantie
- Traitement des plaintes
- Amélioration du produit
- Marketing et statistiques
- Rappel de produit, dans le cas peu probable d'un défaut de produit

Sonova et votre audioprothésiste sont responsables de vos données personnelles. Si vous avez des questions sur nos pratiques en matière de confidentialité ou que vous êtes en désaccord avec cette politique, merci de nous contacter à l'adresse suivante : privacy@sonova.com.

9. Informations importantes sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les informations des pages suivantes avant d'utiliser votre aide auditive. Une aide auditive ne restaure pas l'audition normale et ne prévient ni n'améliore une perte auditive due à des troubles organiques. Une utilisation épisodique de l'aide auditive ne permettra pas à l'utilisateur d'en ressentir tous les bénéfices. L'utilisation d'une aide auditive n'est qu'une partie de l'adaptation auditive et devra éventuellement être complétée par un entraînement auditif et par une formation à la lecture labiale.

9.1 Identification des risques

 Les aides auditives sont prévues pour amplifier les sons et les transmettre dans les oreilles, afin de compenser une perte auditive. Les aides auditives (spécialement programmées pour chaque perte auditive) ne doivent être utilisées que par les personnes auxquelles elles sont destinées. Elles ne doivent être utilisées par aucune autre personne, car cela risquerait d'endommager leur audition.

- ⚠ Si vous ressentez une douleur dans ou derrière l'oreille, si vous constatez une inflammation de l'oreille, une irritation cutanée ou l'accumulation accélérée de cérumen, veuillez en parler avec votre audioprothésiste ou votre médecin.
- ⚠ Tout changement ou modification de cet appareil, non expressément approuvé par Phonak, est interdit. De tels changements pourraient être préjudiciables à votre audition ou endommager votre système auditif.
- ⚠ SoundLync contient un aimant. Si vous utilisez un appareil médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté, veuillez vous reporter à leur mode d'emploi respectif pour vérifier les effets possibles d'un champ magnétique sur ce type de matériel médical. Ne placez pas SoundLync dans votre poche de chemise. Maintenez SoundLync à une distance d'au moins 15 cm de votre appareil médical.

- ⚠ Cette aide auditive n'est pas conçue pour les enfants de moins de 36 mois. Les enfants et les personnes souffrant de troubles cognitifs doivent être supervisés en permanence pendant l'utilisation de ce produit, afin de garantir leur sécurité. L'aide auditive est un appareil compact, qui contient des composants de petite taille. Ne laissez pas les enfants et les personnes souffrant de troubles cognitifs sans surveillance avec cette aide auditive. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin ou un service d'urgence, car l'aide auditive et ses composants posent un risque d'étouffement !
- ⚠ N'utilisez pas les aides auditives dans des zones où des explosions peuvent se produire (mines ou zones industrielles avec danger d'explosion).
- ⚠ Si un Lyric cesse de fonctionner pour quelque raison que ce soit, il doit être retiré dans les 24 heures et un audioprothésiste spécialisé Lyric doit examiner votre conduit auditif.

- ⚠ N'introduisez pas de coton-tige ou quoi que ce soit d'autre dans votre conduit auditif. Cela pourrait endommager l'aide auditive et/ou vous blesser l'oreille.
- ⚠ Ne faites pas de plongée sous-marine. Plonger en portant un Lyric peut vous blesser l'oreille ou endommager l'aide auditive.
- ⚠ Ne faites pas de saut en parachute tout en portant Lyric.
- ⚠ Les procédures d'imagerie médicale (par ex. imagerie médicale CT, IRM) peuvent sérieusement affecter le fonctionnement correct de votre aide auditive. Lyric doit être retiré avant de passer un examen aux rayons X car il contient des parties métalliques. Reportez-vous au chapitre 4 pour plus d'informations.
- ⚠ Lorsque vous tenez SoundLync dans votre conduit auditif, veillez à l'insérer doucement et avec précaution. Évitez tout mouvement de l'aide auditive qui pourrait vous blesser et/ou l'endommager.

9.2 Informations sur la sécurité du produit

Port de Lyric:

- ① Lyric est résistant à l'eau, mais n'est pas étanche et ne doit pas être complètement immergé dans l'eau. Ne plongez pas la tête dans l'eau à moins que vous n'utilisiez un bouchon d'oreille sur-mesure pour protéger Lyric de l'exposition à l'eau.
- ① Une fois que Lyric a été enlevé, il ne peut plus être remis en place.

Utilisation de SoundLync:

- ① SoundLync ne doit pas rester au contact de la peau des personnes allergiques au nickel.

Quand contacter votre audioprothésiste spécialisé Lyric:

- ① Si l'aide auditive fonctionne mal.
- ① Si vous ressentez une douleur au-delà de l'inconfort initial.
- ① Si vous remarquez une modification brutale ou significative de votre audition.



Fabricant:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Suisse

www.phonak.com

Votre audioprothésiste:



7 613389 247251

029-0764-04/V1.00/2018-09/ERC © 2014 – 2018 Phonak AG All rights reserved