

Naída CI Connect

Guide de réglage

Compatibilité des matériels et des logiciels

Les composants suivants sont requis pour utiliser le Naída CI Connect.

Naída CI Q90

Seul le Naída CI Q90 est compatible avec le Naída CI Connect.

Une simple mise à niveau du logiciel de réglage SoundWave™ 3.2 est requise par votre professionnel de santé pour le Naída CI afin de débloquent la fonctionnalité Naída CI Connect.

Batterie PowerCel™ 170

Il est possible de brancher le Naída CI Connect à la batterie PowerCel 170.



Configuration du Naída CI Q90

Programme par défaut

Le Naída CI Connect est compatible avec n'importe quel programme Naída CI Q90 via la fonctionnalité RogerReady. Ceci garantit que le Naída CI Connect passe automatiquement en mode transmission à chaque fois qu'un signal de transmission est reçu. Le processeur de son repassera automatiquement en mode microphone 20 secondes après la fin de la transmission.

Programme auxiliaire uniquement

Si le patient souhaite n'entendre aucun son environnemental dans les microphones Naída CI Q90, il faut créer un programme Connect/Roger dédié avec une source d'entrée auxiliaire uniquement. L'accès à ce programme requiert un changement de programme sur le Naída CI Q90.