

Phonak Sky™ Marvel

État de l'aide auditive et mode du témoin lumineux

		Sky M-M et Sky M-SP	Sky M-PR
<input type="checkbox"/> L'aide auditive est allumée	Clignotement simple répété		
<input type="checkbox"/> L'aide auditive est allumée et le système Roger™ est accessible	Clignotement double répété		
<input type="checkbox"/> La pile est faible	Clignotement continu	*	**
<input type="checkbox"/> Changement du niveau de volume ***	Clignotement unique lors du changement de volume		
<input type="checkbox"/> Changement de programme ***	Clignotement unique lors du changement de programme		

* L'alerte de pile faible apparaît environ 30 minutes avant qu'il ne soit nécessaire de changer la pile.

** L'indicateur de pile faible apparaît environ 60 minutes avant qu'il ne soit nécessaire de changer la pile.

*** À l'aide de la télécommande ou du bouton multifonctions.