






# Phonak Sky™ V

## État de l'aide auditive et indication du témoin lumineux

État de l'aide auditive	Indication du témoin lumineux	
<input type="checkbox"/> L'aide auditive fonctionne	Clignotement simple répété	
<input type="checkbox"/> L'aide auditive est activée et le système Roger est accessible	Clignotement double répété	
<input type="checkbox"/> Pile faible *	Clignotement triple répété	
<input type="checkbox"/> Changement de niveau de volume **	Clignotement simple lors du changement de volume	
<input type="checkbox"/> Changement de programme **	Clignotement simple lors du changement de programme	

\* L'indicateur de pile faible apparaît environ 30 minutes avant qu'il ne soit nécessaire de changer la pile.  
Nous vous recommandons de toujours garder une pile de rechange à portée de main.

\*\* Initié par la télécommande ou par le bouton-poussoir.