

# Phonak Fast Facts



## iCube II

### De quoi s'agit-il ?

iCube II est un appareil d'adaptation sans câble qui transfère sans fil des données d'appareillage d'un ordinateur aux aides auditives du patient. Il peut être utilisé avec n'importe quelle aide auditive sans fil Phonak (Venture, Quest, Spice+ et Spice).

### Quels sont les avantages ?

Le processus d'appareillage avec iCube II est rapide, simple et s'effectue sans câble. Très fiable et stable, l'appareil permet aux patients de se déplacer librement ou de marcher sans être entravés par des câbles.

L'adaptateur USB dédié facilite la connexion d'iCube II à l'ordinateur d'appareillage. Il est aussi simple à installer qu'une souris sans fil. Avec le nouveau collier inductif qui s'attache au centre, il est beaucoup plus aisé de mettre l'iCube II. La plus grande autonomie de la pile permet d'utiliser l'appareil pendant douze heures sans le recharger.

### Comment l'utiliser ?

iCube II est un dispositif réellement Plug&Play avec l'adaptateur USB pré-couplé. Pour commencer, il suffit de brancher l'adaptateur dans le port USB de l'ordinateur d'appareillage. La connexion s'établit automatiquement lorsque l'iCube II est sélectionné comme appareil d'adaptation dans Phonak Target 4.0 (ou version plus récente).

Il peut également être utilisé avec un câble USB ou connecté sans fil via Bluetooth avec un autre ordinateur ou une tablette.



Pour plus d'informations, visitez le site Web  
[www.phonakpro.fr/icube](http://www.phonakpro.fr/icube)