

# Création d'un réseau Roger™ dans la salle de classe


Fiche de référence

roger



Tous les appareils Roger destinés à l'enseignement ont été conçus pour être simples à utiliser les uns avec les autres. Pour qu'ils fonctionnent ensemble, il suffit simplement de les connecter à un réseau. En fonction du nombre d'appareils dont vous disposez, il existe plusieurs manières de les connecter. C'est à vous de choisir.

## Ajouter des appareils Roger via la fonction Connect

Maintenez le microphone éducatif Roger à 10 cm des appareils Roger ci-dessous pour les connecter au réseau de la classe, puis cliquez sur **Connecter** ou touchez l'icône **Connecter** .

- Récepteurs Roger au niveau de l'oreille
- Roger MyLink
- Roger Focus
- Microphones éducatifs Roger
  - Roger Touchscreen Mic
  - Roger Pass-around
  - Roger inspiro\*
  - Roger DynaMic\*
- Roger Multimedia Hub
- Roger AudioHub\*
- Haut-parleurs Roger DigiMaster 5000\*\*, 7000\*\*
- Roger DigiMaster X

\* Lorsque vous connectez ces appareils à un réseau MultiTalker avec un Touchscreen Mic comme appareil principal, touchez l'icône **Connect** et suivez les étapes qui s'affichent sur l'écran du Touchscreen Mic.

\*\* Lorsque vous connectez un haut-parleur Roger DigiMaster, placez le microphone Roger près du sommet du Roger DigiMaster.

## Ajouter des appareils Roger grâce à Roger WallPilot



**Récepteurs Roger** – Il suffit simplement que les enfants s'approchent du Roger WallPilot (oreilles et récepteurs situés à 30 cm du WallPilot) et restent face à l'appareil pendant quelques secondes.

**Microphones Roger et émetteur multimédia** – Pour connecter les microphones et émetteurs multimédia Roger, il suffit de les éteindre et de les rallumer en les plaçant à 10 cm du Roger WallPilot :

- Roger Touchscreen Mic
- Roger Pass-around
- Roger Multimedia Hub
- Roger inspiro
- Roger DynaMic

**PHONAK**  
life is on