

Utilisation du Roger™ DigiMaster X

Fiche de référence

roger



Idéal pour les salles de classe avec d'autres installations de champ sonore, pour assurer que chaque auditeur puisse profiter de la qualité de la compréhension de la parole que propose Roger. Il suffit de le brancher, de l'allumer et d'enseigner.








Configuration initiale

- Branchez le Roger DigiMaster X à une source d'alimentation électrique.
- À l'aide du câble audio et de l'adaptateur fournis, connectez le Roger DigiMaster X au système d'amplification sonore de la salle de classe.
- Maintenez le Roger Touchscreen Mic ou le Roger inspiro à 10 cm du Roger DigiMaster X et touchez ou appuyez sur **Connecter**.

Utilisation au quotidien

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt du Roger DigiMaster X pendant 2 secondes pour le mettre sous tension. Mettez en marche le microphone Roger. Parlez dans le microphone Roger.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton marche/arrêt du Roger DigiMaster X pendant 2 secondes pour le mettre hors tension.

Témoins lumineux du Roger DigiMaster X

-  Rouge continu – Roger DigiMaster X éteint
-  Bleu continu – Mode de fonctionnement standard
-  Bleu clignotant – Microphone Roger éteint ou hors de portée
-  Vert continu – Microphone Roger en sourdine
-  Vert à rouge – Volume en cours de réglage +/-
-  Jaune clignotant – Mise à jour du logiciel
-  Rouge clignotant – Contacter votre support technique Roger

