

Utilisation du Roger™ Touchscreen Mic par des petits groupes

Fiche de référence

roger



Le nouveau Mode petit groupe innovant utilise un système de 3 microphones intelligents fonctionnant ensemble de façon moderne et adaptative. Lorsque le Roger Touchscreen Mic est posé sur une table de 2 à 5 étudiants, les microphones s'orientent automatiquement vers la personne du groupe qui parle.

Mode petit groupe

- Détachez le Roger Touchscreen Mic du cordon à porter autour du cou.
- Placez le Roger Touchscreen Mic à plat sur la table, au centre du petit groupe*.
- Le microphone transmet automatiquement les voix se trouvant à proximité.
- Une fois l'activité en petit groupe terminée, rattachez le Roger Touchscreen Mic au cordon pour une utilisation comme haut-parleur.

* Lorsque le Roger Touchscreen Mic principal est utilisé en mode petit groupe, il ne transmet pas vers un haut-parleur numérique, et n'est pas utilisé sur un réseau MultiTalker.

