

# Phonak Fast Facts



## Phonak EasyCall II

### De quoi s'agit-il ?

Le Phonak EasyCall II est un accessoire sans fil unique qui connecte n'importe quel téléphone mobile ou smartphone compatible Bluetooth, quelle que soit la marque, aux aides auditives Phonak Venture. Une fois le téléphone décroché, il diffuse automatiquement et sans fil l'appel aux deux aides auditives Phonak Venture en offrant une qualité sonore exceptionnelle et une compréhension optimale.

### Quels sont les avantages ?

Avec EasyCall II, les patients bénéficient d'une intelligibilité de la parole sur leur téléphone mobile en appuyant simplement sur un bouton<sup>1</sup>.

Ils n'ont pas à se soucier de la marque du téléphone. EasyCall II fonctionne avec tous les téléphones compatibles Bluetooth, même avec les téléphones n'offrant pas les fonctionnalités d'un smartphone.

<sup>1</sup> Appleton-Huber J, (2013) 'Phonak DECT CP1 cordless phone' Field Study News. Phonak AG: 2013

### Utilisation

EasyCall II est simple à utiliser. Il est prêt à l'emploi et ne nécessite aucun appareillage. Une fois connecté au téléphone, il est toujours prêt.

Le couplage au téléphone s'effectue une seule fois. Mettez en marche EasyCall II ; il passe instantanément en mode de couplage. Dans les réglages Bluetooth du téléphone, sélectionnez et connectez EasyCall II ; c'est tout.

Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton EasyCall II et à répondre à l'appel.



Pour plus d'informations, visitez le site Web [www.phonakpro.fr/easycall](http://www.phonakpro.fr/easycall)